



Lista de materiales

Lago Care

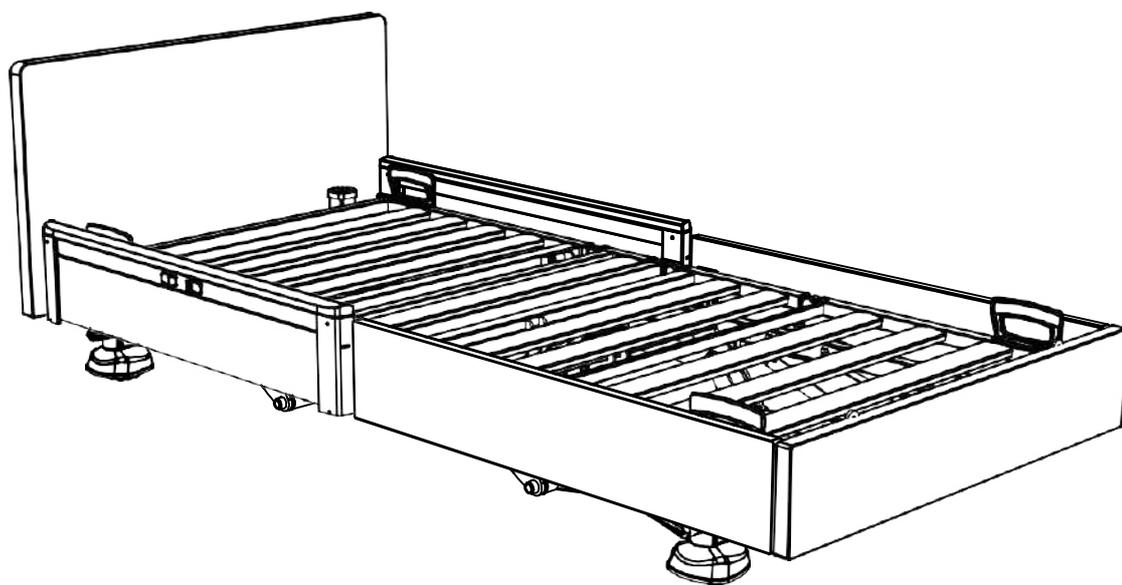

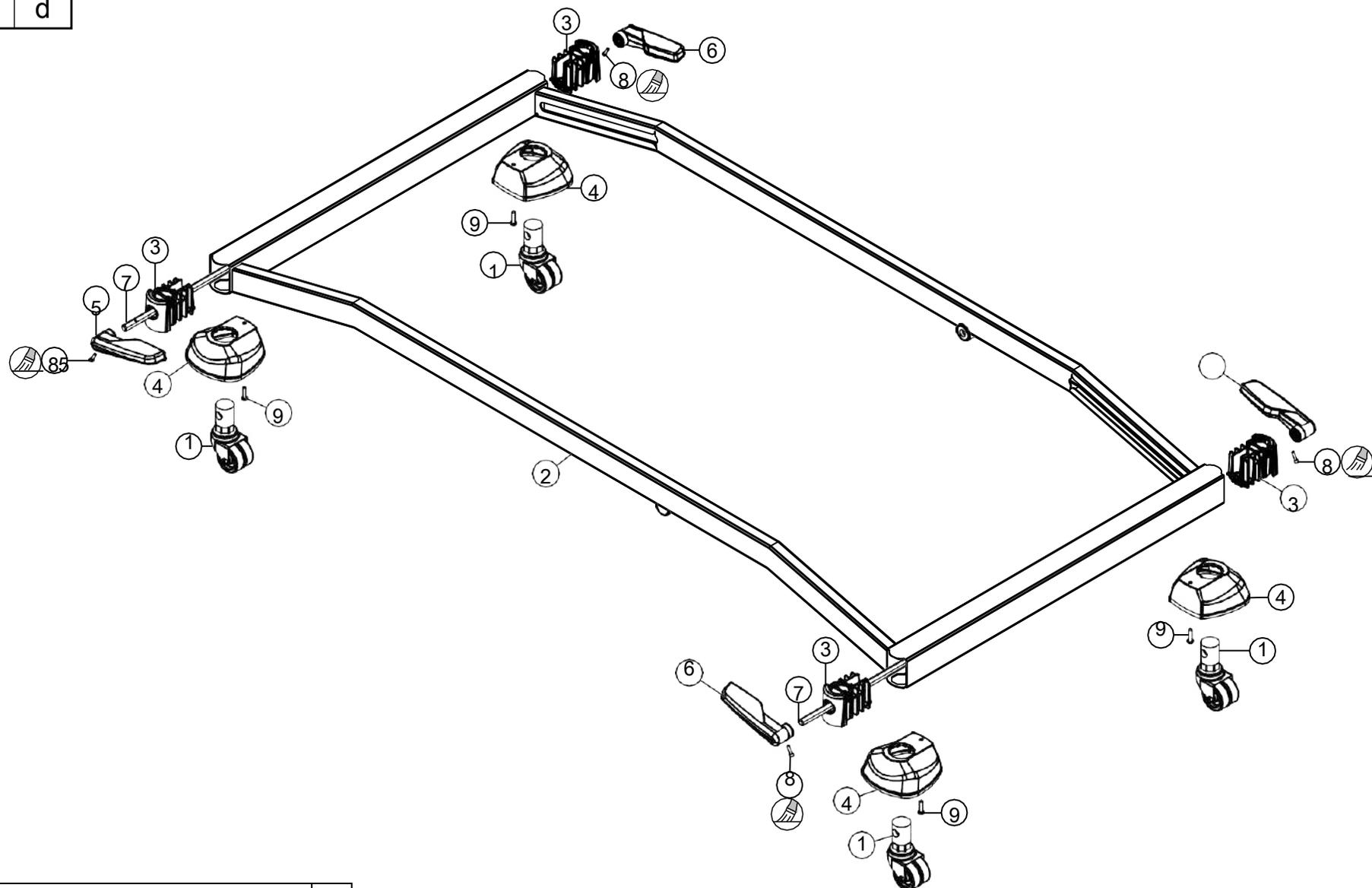

ID	Descripción	Q
1	A-012829 rueda doble-50-CB	4
2	A-025683 ruedas ocultas Lago Care	1
3	P-014396 fijación de ricino 32-CB	4
4	P-016032 tapacubos bajo	4
5	P-020838 pedal de freno simple A RAL 7042	2
6	P-021602 pedal de freno simple B RAL 7042	2
7	P-021875 varilla hexagonal Lago Care	2
8	S-015930 tornillo Din7500(TT12)-M4x16-GV	4
9	S-015945 tornillo Din7981C-5.5x25	4

		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
tren de rodaje Lago - ruedas ocultas		Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 25/02/2016	Escala: 1 : 10
		Dibujo nr: T-029251	Número de


T-025909

h


Opciones

ID.	Descripción
A	Integral S100 CC
B	Integral S 125
C	Integral S 125 CC
D	Línea 125
E	Línea 125 DC
F	Línea 150
G	Línea 150 CC
H	5ª rueda (*)
I	Zumbador de freno
J	5ª rueda/zumbador de freno/interruptor de pedal HL

(*)Sólo posible con opción Línea 150 e Integral S 125

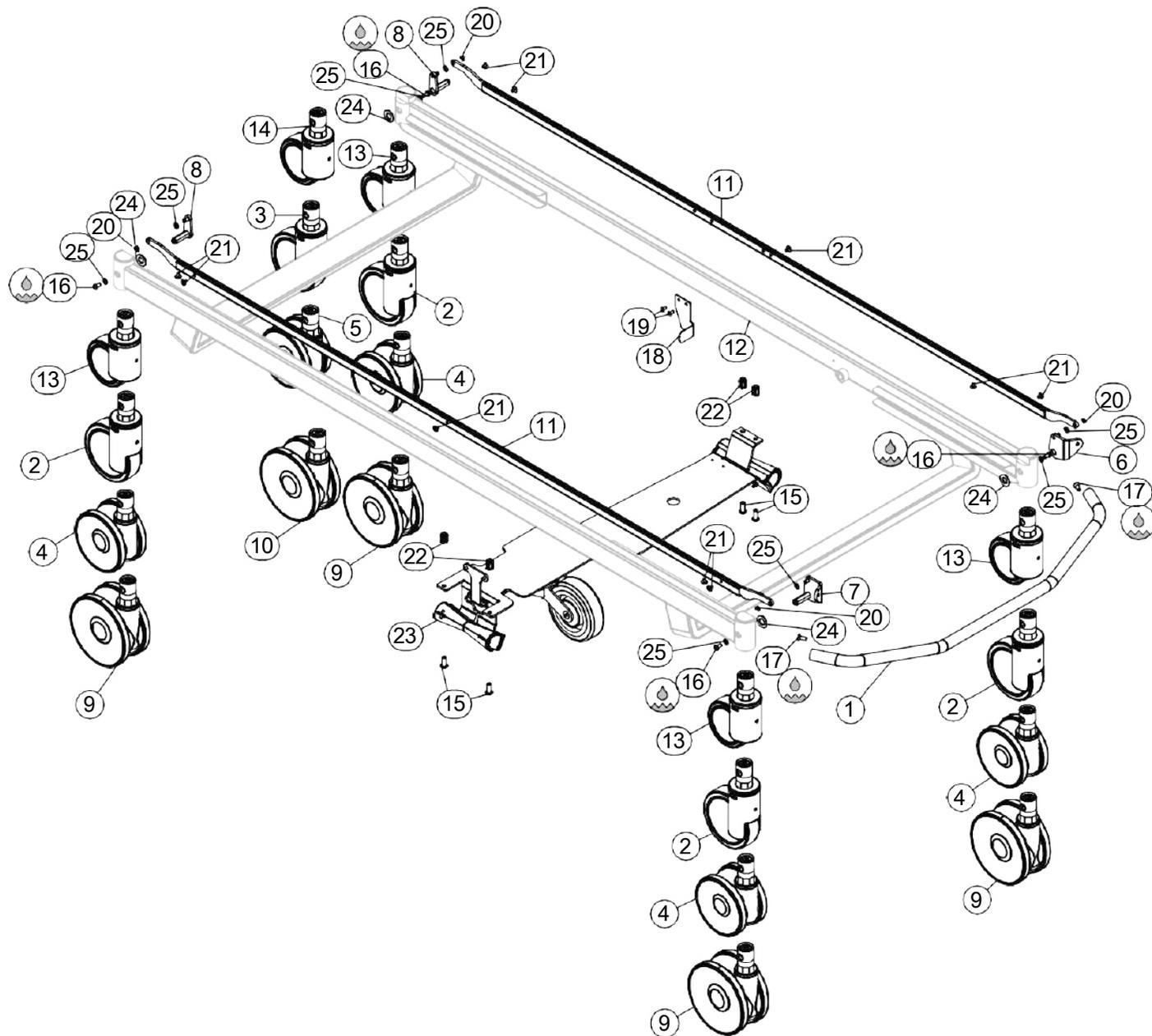

	ID	Descripción	Q
1	A-020112	barra de freno Lago CB	1
2	A-020489	Integral S 125-CB35-octagon B+4,C+3	0
3	A-020490	Integral S 125-CB35-DC-octagonal C+1	0
4	A-021970	rueda Linea-125-R36-34 S30 D+4,E+3	0
5	A-021971	rueda Linea-125-R36-34 S30-DC E+1	0
6	A-021983	palanca de freno lado pie R Lago	1
7	A-021984	palanca de freno L lado del pie Lago	1
8	A-021985	palanca de freno lado cabeza Lago	2
9	A-022813	ricino Linea-150-R36-34 S30-H155 F+4,G+3	0
10	A-022817	rueda Linea-150-R36-34 S30-H155-DC G+1	0
11	A-026139	eslabón de freno Lago 202007	2
12	A-026141	bastidor tren de rodaje Lago CB 202007	1
13	A-027275	Integral S 100-CB35-octagon-RAL9006 A-1,B,C,D,E,F,G-4	4
14	A-027276	Integral S 100-CB35-DC-octagon-RAL9006 A+1	0
15	B-001798	perno Iso7380-M8x20x20-10.9 GV blanco-LC H//J+4	0
16	B-004168	perno Iso7380-M6x12x12-10.9 GV blanco-LC	4
17	B-012599	perno Din7991-M6x16x16-8.8 GV blanco-LC	2
18	P-035871	activación del interruptor de freno Lago I+1	0
19	R-000461	remache Alu/St 4.8x10 I+2	0
20	ST000464	springfix diam.5	4
21	ST001405	tampón 12mm	10
22	ST036306	tuerca ciega hexagonal M8x18x11 cabeza baja H//J+4	0
23	T-039595	opciones carro inferior Lago CB H//J+1	0
24	VL002182	arandela Din125A-M12-PA	4
25	VL020302	arandela Din125A-M6-PA	8

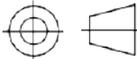			
			
Descripción: tren de rodaje Lago Care CB		Diseñador: Sebastián Ola	Fecha: 04/11/2014 Dibujo nr: T-025909
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Escala: 1 : 12	Número de


T-039595

e

Opciones

ID.	Descripción
A	5ª rueda
B	Interruptor de pedal HL

	ID	Descripción		Q
1	A-013395	SLS353	C+1	0
2	A-023387	plato giratorio 5ª rueda	A+1	0
3	A-023769	rueda dia 100	A+1	0
4	A-025334	FS3073	B+1	0
5	A-025800	placa soporte 5ª rueda y pedal HL Lago	A&B+1	0
6	A-025801	horquilla de bloqueo 5ª rueda Lago	A+1	0
7	A-027388	placa soporte 5ª rueda Lago	A+1	0
8	A-027407	sopORTE pedal HL Lago	B+1	0
9	A-027408	placa soporte freno zumbador Lago	C+1	0
10	AD019228	cap PR 7/4	A+1	0
11	B-000816	perno Iso7380-M10x16x16-10.9 GV blanco	A+1	0
12	B-005678	perno Din7991-M8x55x55-8.8 GV blanco	A+1	0
13	B-028876	perno Iso7380-M8x8x8-10.9 GV blanco	A+4	0
14	DC028070	eje de rotación horquilla 5ª rueda	A+1	0
15	DC031115	espaciador activación 5ª rueda	A+1	0
16	DC034200	perno de activación 5ª rueda Lago	A+1	0
17	M-000894	tuerca de retención Din985-M5	B +4	0
18	P-030649	muelle 5ª rueda	A+1	0
19	P-033480	activación horquilla 5ª ricino Lago	A+1	0
20	P-033722	horquilla 5ª rueda 100 mm	A+1	0
21	P-035924	placa zumbador freno Lago	C&(A/B/A&B)+1	0
22	R-003968	remache Alu/St 3.9x14	C&(A/B/A&B)+2	0
23	R-004530	remache A2/A2 4.8x10	A+2	0
24	S-014995	tornillo tipo TT12-M5x10-GV blanco	A+2	0
25	S-015930	tornillo Din7500(TT12)-M4x16-GV	C+2	0
26	ST014684	muelle 10x0,8x16/0,8 (2x doble ojo alemán)	A+1	0
27	ST035867	deslizamiento largo	A+1	0
28	VL000469	arandela Din125A-M10-PA	A+1	0

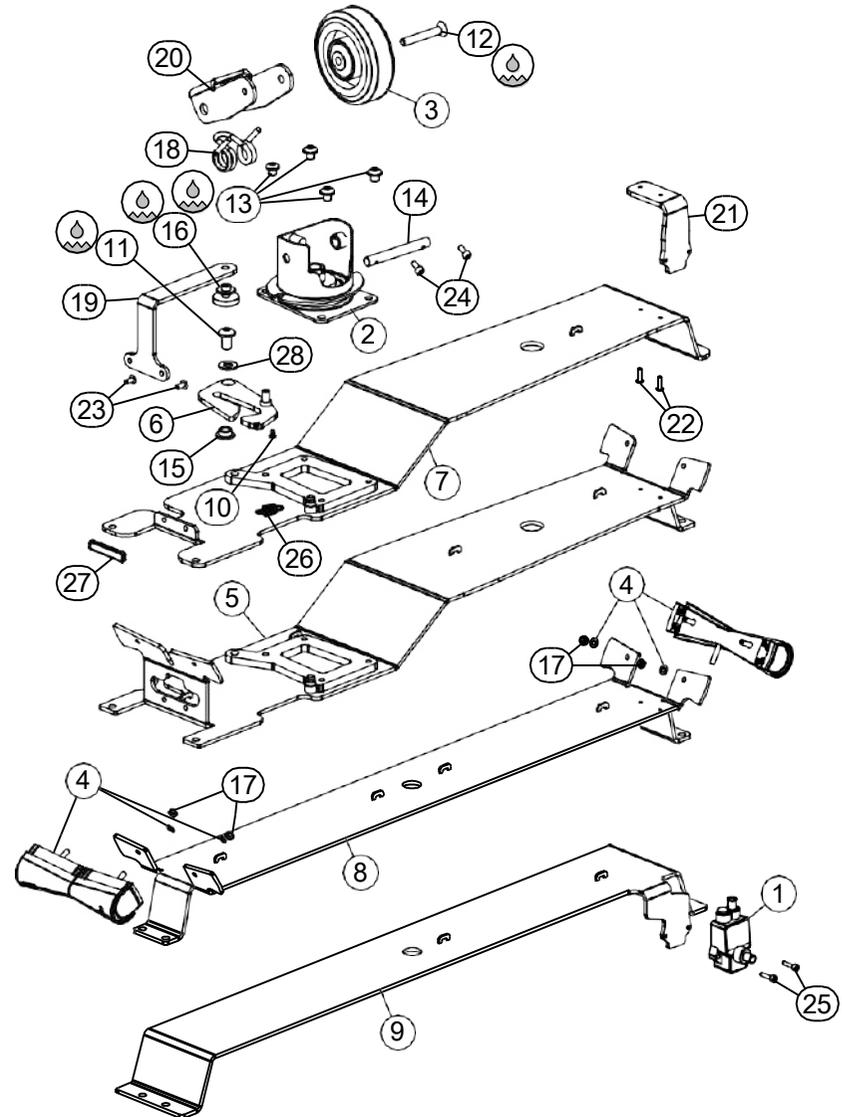


		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
opciones tren de rodaje Lago CB		Sebastián Popa	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 03/07/2020	Escala: 1 : 8
		Dibujo nr: T-039595	Número de

T-034597


e

Opciones


ID.	Descripción
A	UBL2
B	Caja de conexiones MJB
C	Batería BA21
D	Batería BA19
E	Atmósfera
F	Somier de 4 secciones
G	Ganchos para accesorios

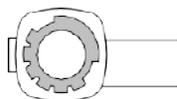

Estuche de accesorios de orientación

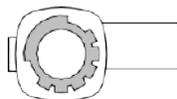

ID	Descripción	Q
1	A-022260 extensión de cama con botón de muelle	H-2 2
2	A-026147 FMP Lago Trix/Pollux/Twin 201907	E-1 1
3	A-027002 Cable de control Linak 0964461-0600	A/B +1 0
4	A-027016 Cable de batería Linak 1019W7001-00185	C+1 0
5	A-027018 Cable de batería Linak 1019W7002-01300	D+1 0
6	A-027398 FMP Lago Atmosphere 202006	E+1 0
7	A-027514 caja de conexiones MJB0005000-1023	B+1 0
8	AD000788 tapa HR 20mm	F+2 2
9	AD010725 cap inbus 17/5.2	4
10	GL000553 rodamiento 1618-12	E+8 0
11	MT027438 clip de montaje	D+1 1
12	MT027867 caja de control CO61	1
13	MT027890 batería BA21	C+1 0
14	MT028937 batería BA19	D+1 0
15	MT032007 UBL2	A+1 0
16	P-006193 soporte colchón plataforma parte	F+2 2
17	P-020901 accesorios gancho XLow	G+6 0
18	P-030632 tapa caja de control CO61	1
19	P-030638 tapa batería BA19	D+1 0
20	P-037262 maletín de accesorios 32 cuadrado	2
21	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	D/F+2,G+6 4
22	R-002190 remache Alu/St 3.9x6	D+2 2
23	S-000830 tornillo Din7981C-4.2x13	A+2 0
24	S-003134 tornillo Din7981C-4.2x32	B+2 0
25	S-004409 tornillo Din7981C-4.2x16	2
26	ST002069 clip de cable 7-8mm (push-in)	2
27	ST002070 clip de cable 9-10mm (push-in)	2
28	ST003219 clip de retención corriente	1
29	ST011063 clip de sujeción 12-14 (autoadhesivo)	1

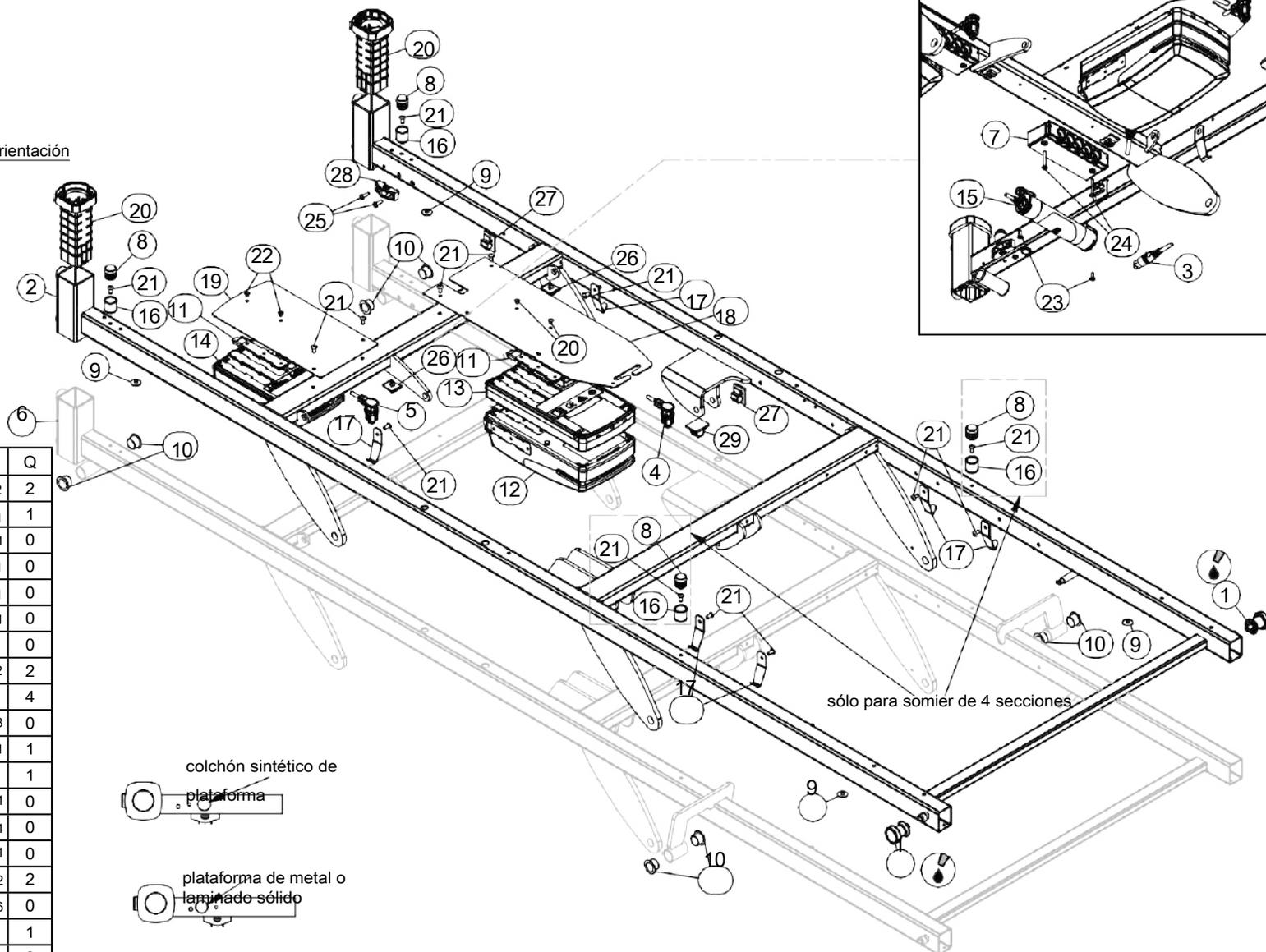colchón sintético de
plataformaplataforma de metal o
laminado sólido

sólo para somier de 4 secciones

Descripción:

MPF Lago Care Trix/Pollux/Atmosphere

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:

Ionut I.



Fecha: 03/10/2018

Escala: 1 : 10

Dibujo nr: T-034597


Número de
revisión: e

T-034598

f

ID	Descripción	Q	
1	A-022260	extensión de cama con botón de muelle	2
2	A-024478	soporte L Twin 50-50 - MP 86	G-1 1
3	A-024479	titular R Twin 50-50 - MP 86	G-1 1
4	A-024481	titular estribo R Twin 50-50 - MP 86	G-1 1
5	A-024482	titular estribo L Twin 50-50 - MP 86	G-1 1
6	A-024519	soporte L Doble desmontable 50-50 - MP86	G+1 0
7	A-024520	soporte R Doble desmontable 50-50 - MP86	G+1 0
8	A-024521	soporte estribo R Twin desmontable 50-50 - MP86	G+1 0
9	A-024522	soporte reposapiés L Twin desmontable 50-50 - MP86	G+1 0
10	A-024523	soporte doble Twin desmontable 50-50 - MP86	G+2 0
11	A-024543	doble soporte Twin 50-50 - MP 86	G-2 2
12	A-026147	FMP Lago Trix/Pollux/Twin 201907	1
13	A-027002	Cable de control Linak 0964461-0600	A/B +1 0
14	A-027016	Cable de batería Linak 1019W7001-00185	C+1 0
15	A-027018	Cable de batería Linak 1019W7002-01300	D+1 0
16	A-027514	caja de conexiones MJB0005000-1023	B+1 0
17	AD000788	tapa HR 20mm	E+2 2
18	MT027438	clip de montaje	D+1 1
19	MT027867	caja de control CO61	1
20	MT027890	batería BA21	C+1 0
21	MT028937	batería BA19	D+1 0
22	MT032007	UBL2	A+1 0
23	P-006193	soporte colchón plataforma pieza	E+2 2
24	P-020901	accesorios gancho XLow	F+6 0
25	P-030632	tapa caja de control CO61	1
26	P-030638	tapa batería BA19	D+1 0
27	P-037262	maletín de accesorios 32 cuadrado	2
28	R-000461	remache Alu/St 4.8x10	D/E+2,F+6 4
29	R-002190	remache Alu/St 3.9x6	D+2 2
30	R-030142	remache Monobolt St/St 4.8x18.2	20
31	S-000830	tornillo Din7981C-4.2x13	A+2 0
32	S-003134	tornillo Din7981C-4.2x32	B+2 0
33	S-004409	tornillo Din7981C-4.2x16	2
34	ST002069	clip de cable 7-8mm (push-in)	2
35	ST002070	clip de cable 9-10mm (push-in)	2
36	ST003219	clip de retención corriente	1
37	ST011063	clip de sujeción 12-14 (autoadhesivo)	1

Opciones	
ID.	Descripción
A	UBL2
B	Caja de conexiones MJB
C	Batería BA21
D	Batería BA19
E	Somier de 4 secciones
F	Ganchos para accesorios
G	Acabado lateral desmontable

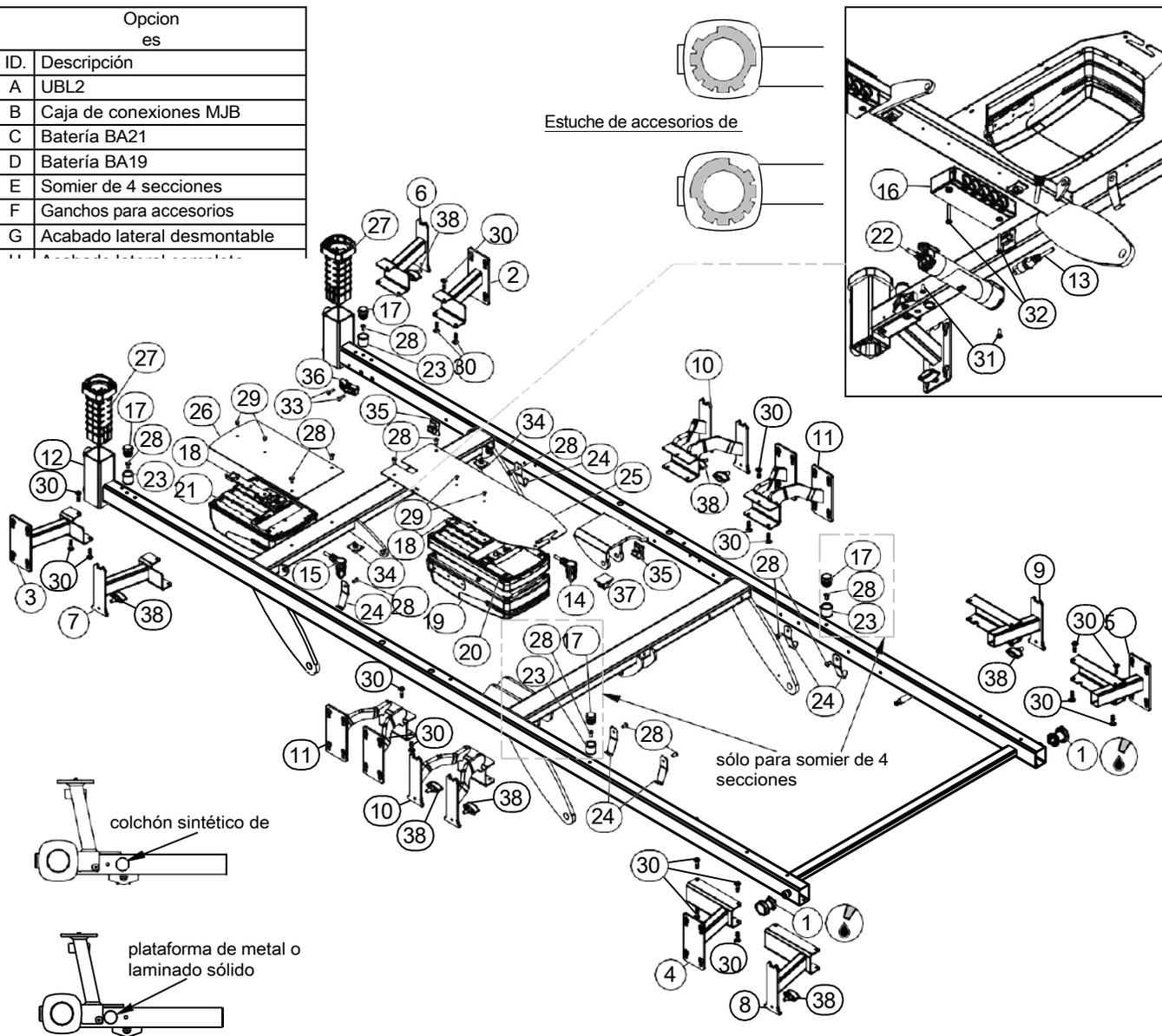

Descripción: MPF Lago Care Twin y paneles laterales			
		Diseñador: Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 03/10/2018	Escala: 1 : 13
Dibujo nr: T-034598		Número de	


T-034599


c

Opciones

ID.	Descripción
A	Gemelos
B	Microteléfono de 4 secciones
C	Microteléfono HD + llave magnética de 4 secciones
D	Microteléfono HB + retroiluminación de 4

ID	Descripción	Q
1	A-020390 HL brazo cabeza lado Lago	1
2	A-022355 actuador LA40 J08908 HL	2
3	A-025699 Microteléfono Linak CO61 4 secciones HD	C+1 0
4	A-025701 Microteléfono Linak CO61 de 4 secciones con tendencia	B+1 0
5	A-025703 Retroiluminación de 4 secciones del microteléfono Linak CO61	D+1 0
6	A-025705 Linak microteléfono CO61 de 3 secciones con tendencia	BC/D-1 1
7	A-026108 HL brazo pie lado Lago 202007	1
8	A-026274 cable Linak 2P EPR tipo E	E +1 0
9	A-026276 cable Linak 2P tipo E	E -1 1
10	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
11	A-027367 Cable de actuador Linak 00914657-0750	1
12	AD003053 tapón gris M12	8
13	B-003235 perno Din912-M12x30x20-8.8 GV blanco	6
14	B-019078 perno Din912-M12x25x16-8.8 GV blanco	2
15	DC000449 motor de eje	4
16	GI000620 rodamiento 1214-06	8
17	P-014520 rueda	4
18	P-019079 saddle base 32-35	4
19	P-033267 estabilizador Lago Care HC 202007	2
20	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	8
21	T-029251 tren de rodaje Lago - ruedas ocultas	1
22	T-034597 MPF Lago Trix/Pollux/Atmósfera	A-1 1
23	T-034598 MPF Lago Twin	A+1 0

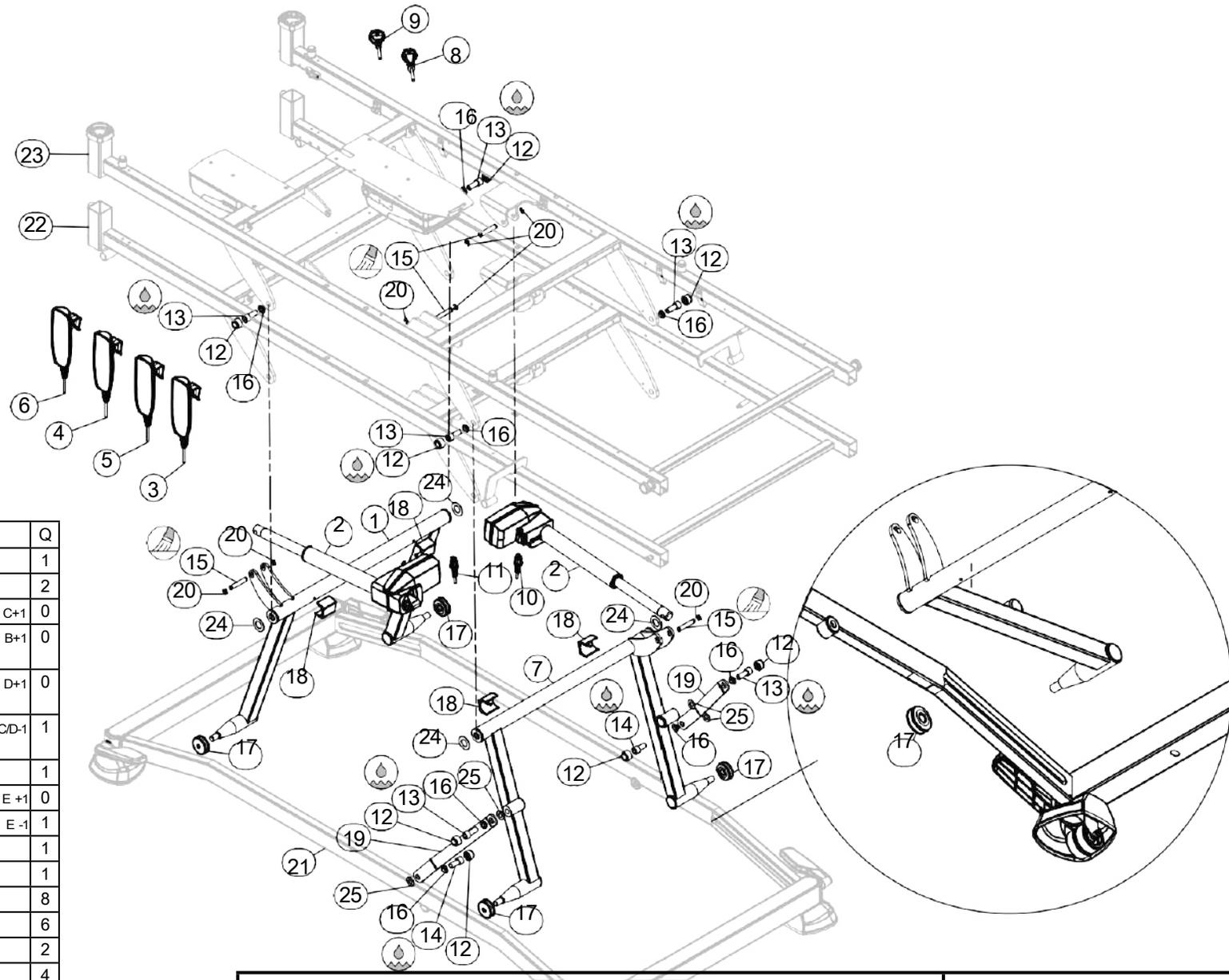

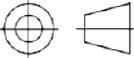Descripción: Sistema HL Lago Care ruedas ocultas			
		Diseñador: Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 4/10/2018	Escala: 1 : 8
		Dibujo nr: T-034599	Número de revisión: c


T-034640

e

Opciones

ID.	Descripción
A	Gemelos
B	Clase I
C	Microteléfono de 4 secciones
D	Microteléfono HD + llave magnética de 4 secciones
F	Microteléfono HR + retroiluminación de

ID	Descripción	Q
1	A-001971 conexión equipotencial L150	B+3 0
2	A-022355 actuador LA40 J08908 HL	2
3	A-025699 Microteléfono Linak CO61 4 secciones HD	D+1 0
4	A-025701 Microteléfono Linak CO61 de 4 secciones con tendencia	C+1 0
5	A-025703 Retroiluminación de 4 secciones del microteléfono Linak CO61	E+1 0
6	A-025705 Linak microteléfono CO61 de 3 secciones con tendencia	C/D/E-1 1
7	A-025817 HL brazo pie lado Lago CB 201907	1
8	A-025818 HL brazo cabeza lado Lago CB 201907	1
9	A-026274 cable Linak 2P EPR tipo E	F+1 0
10	A-026275 cable Linak 3P EPR pigtail tipo E - F	B+1 0
11	A-026276 cable Linak 2P tipo E	B/F-1 1
12	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	7
13	A-027367 Cable de actuador Linak 00914657-0750	1
14	AD003053 tapón gris M12	8
15	B-003235 perno Din912-M12x30x20-8.8 GV blanco	6
16	B-019078 perno Din912-M12x25x16-8.8 GV blanco	2
17	DC000449 motor de eje	4
18	DC024248 Rueda HL Lago	4
19	GI000620 rodamiento 1214-06	8
20	P-019079 saddel base 32-35	4
21	P-020279 Estabilizador HL Lago CB	B-1 2
22	P-032635 Estabilizador HL Lago CB Clase I	B+1 0
23	S-004413 tornillo Din7500 CE-M4x8	B+6 0
24	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	8
25	T-025909 tren de rodaje Lago Care CB	1
26	T-034597 MPF Lago Trix/Pollux/Atmósfera	A-1 1
27	T-034598 MPF Lago - Doble	A+1 0
28	VL002364 brida de coinete 2036-015	4

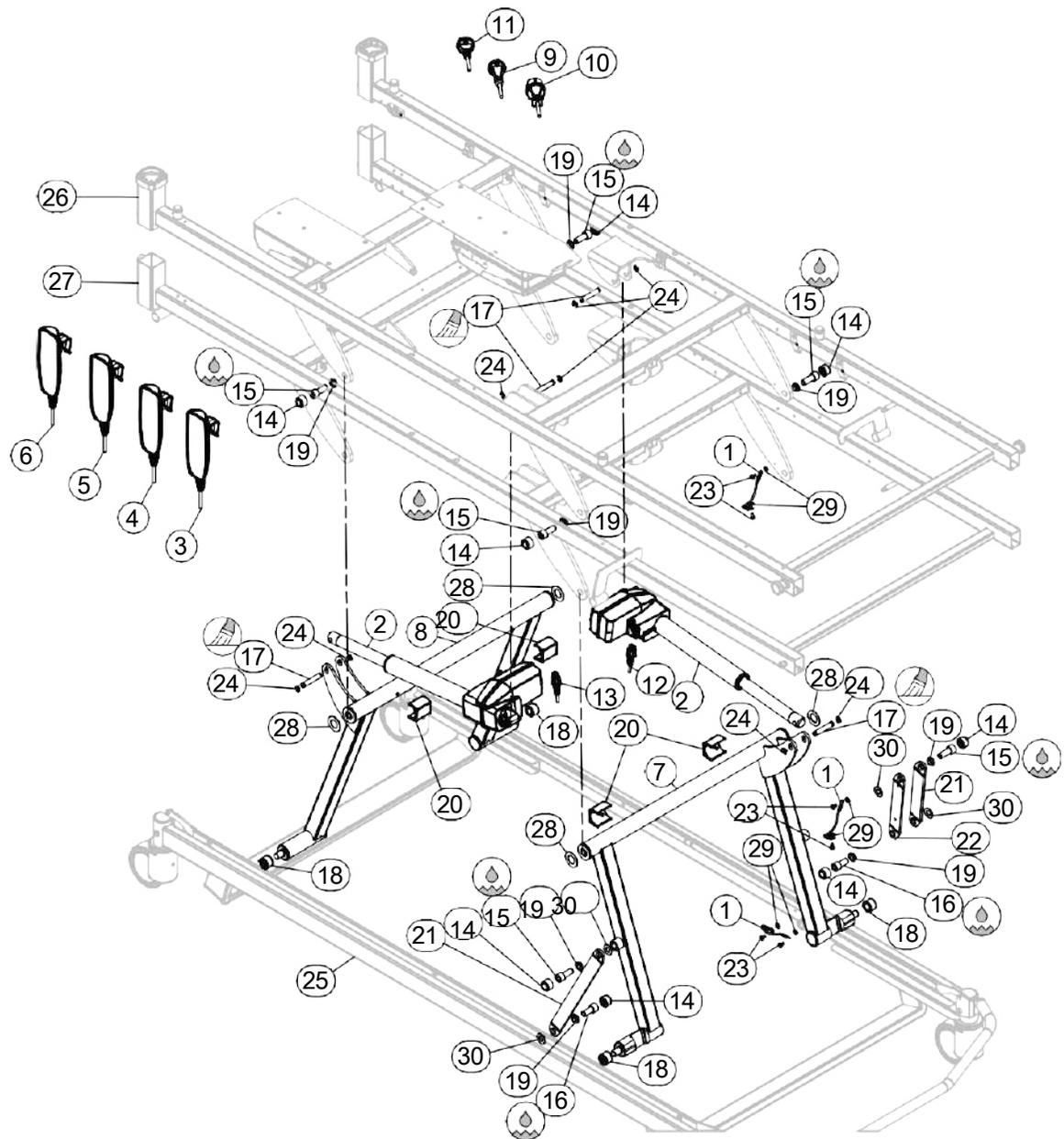

Descripción:


Sistema HL Lago Care CB

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95



Diseñador:

Ionut I.

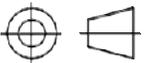

Fecha: 12/10/2018


Escala: 1 : 15

Dibujo nr: T-034640


Número de

T-037231

a

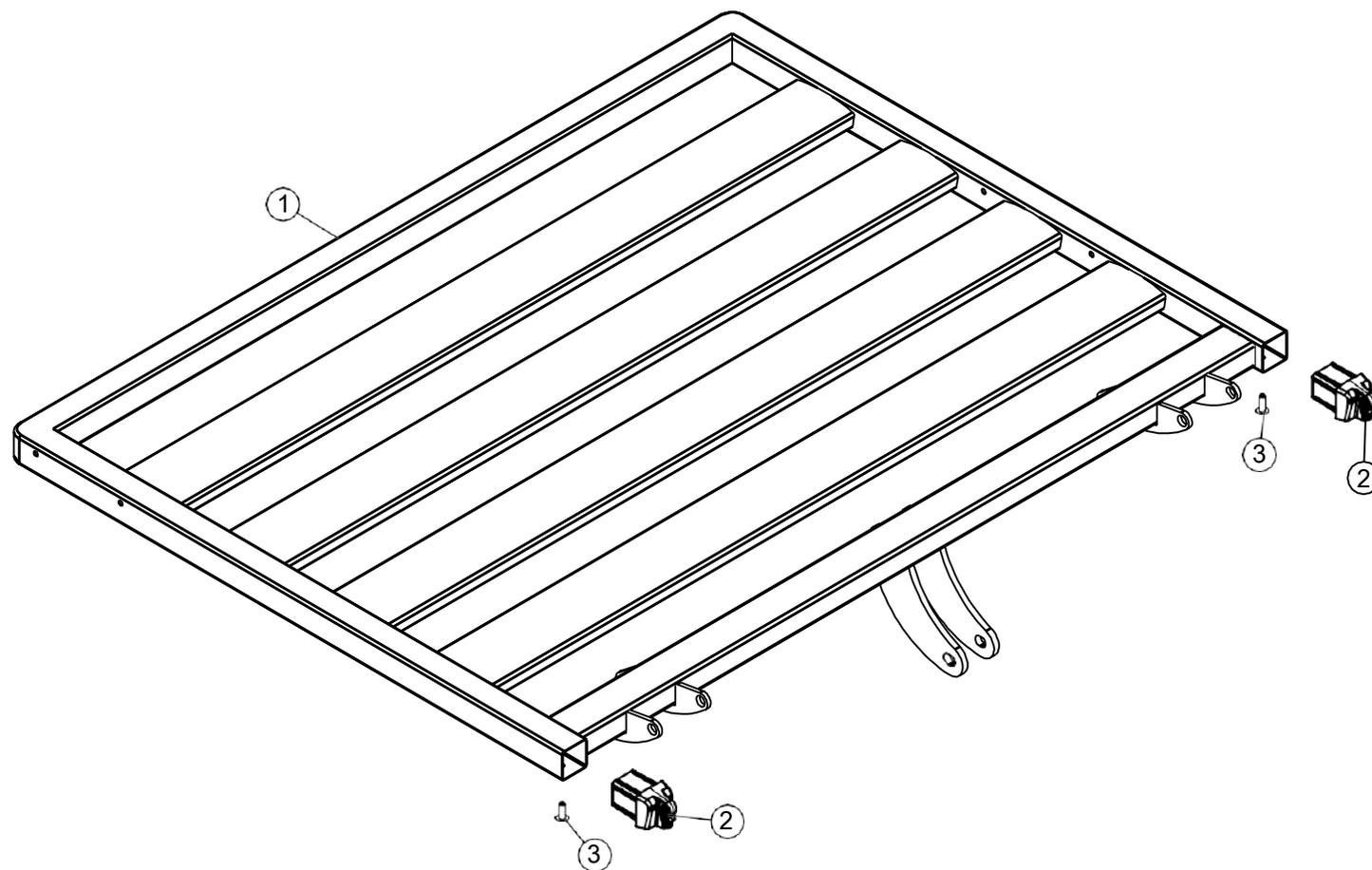


	ID	Descripción	Q
1	A-026842	bastidor respaldo metal 202003	1
2	P-018208	bisagra pivote virtual	2
3	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2

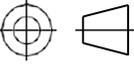
		 Haelvoet	
Descripción: respaldo metálico		Diseñador: Sebastián Popa	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 13/09/2019 Dibujo nr: T-037231	Escala: 1 : 6 Número de

T-037311

a

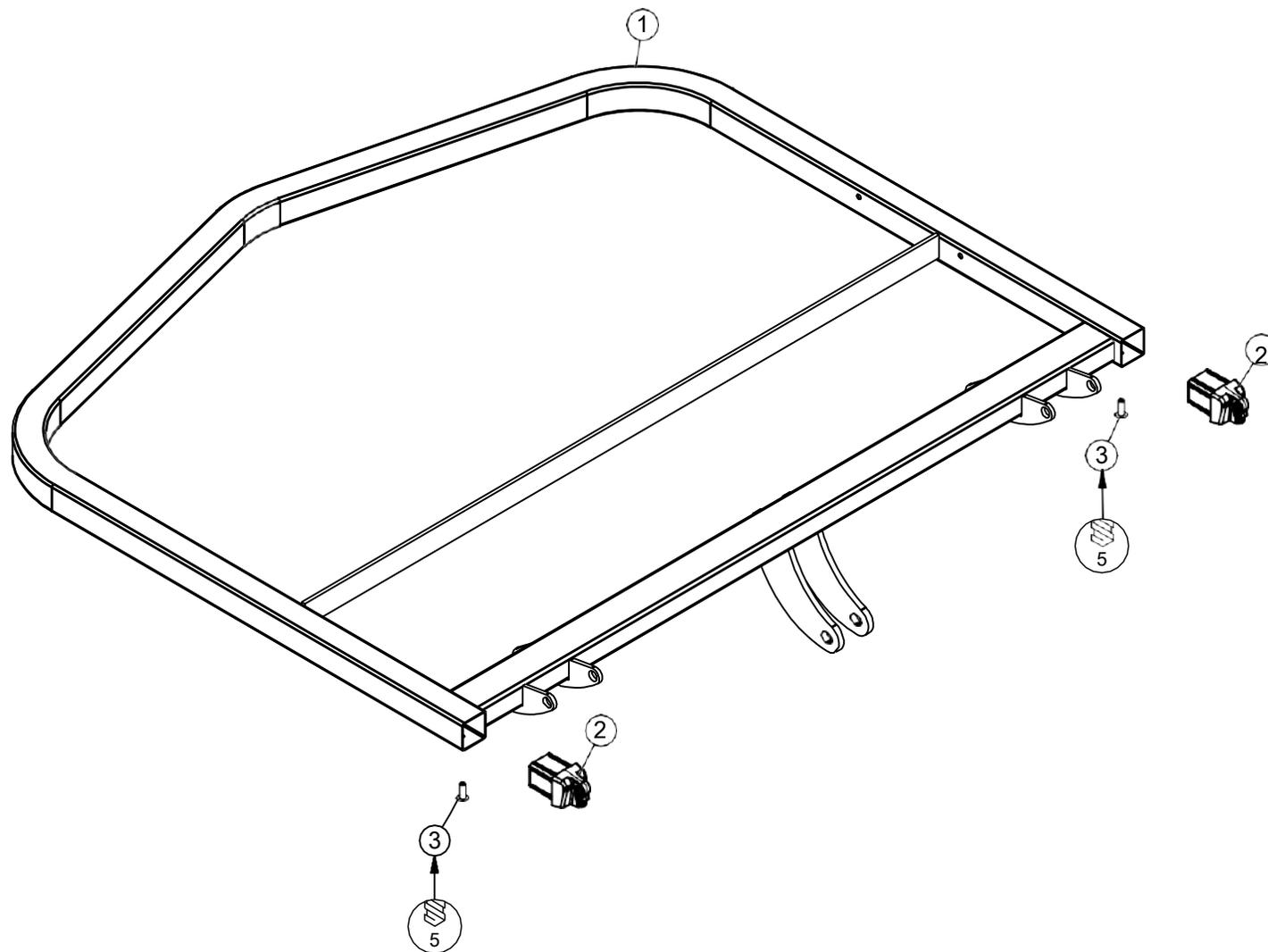


	ID	Descripción	Q
1	A-025359	armazon respaldo sintetico 202003	1
2	P-018208	bisagra pivote virtual	2
3	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2

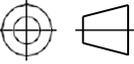
		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
respaldo sintético		Sergiu S.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 23/09/2019	Escala: 1:6
		Dibujo nr: T-037311	Número de

T-037375

b

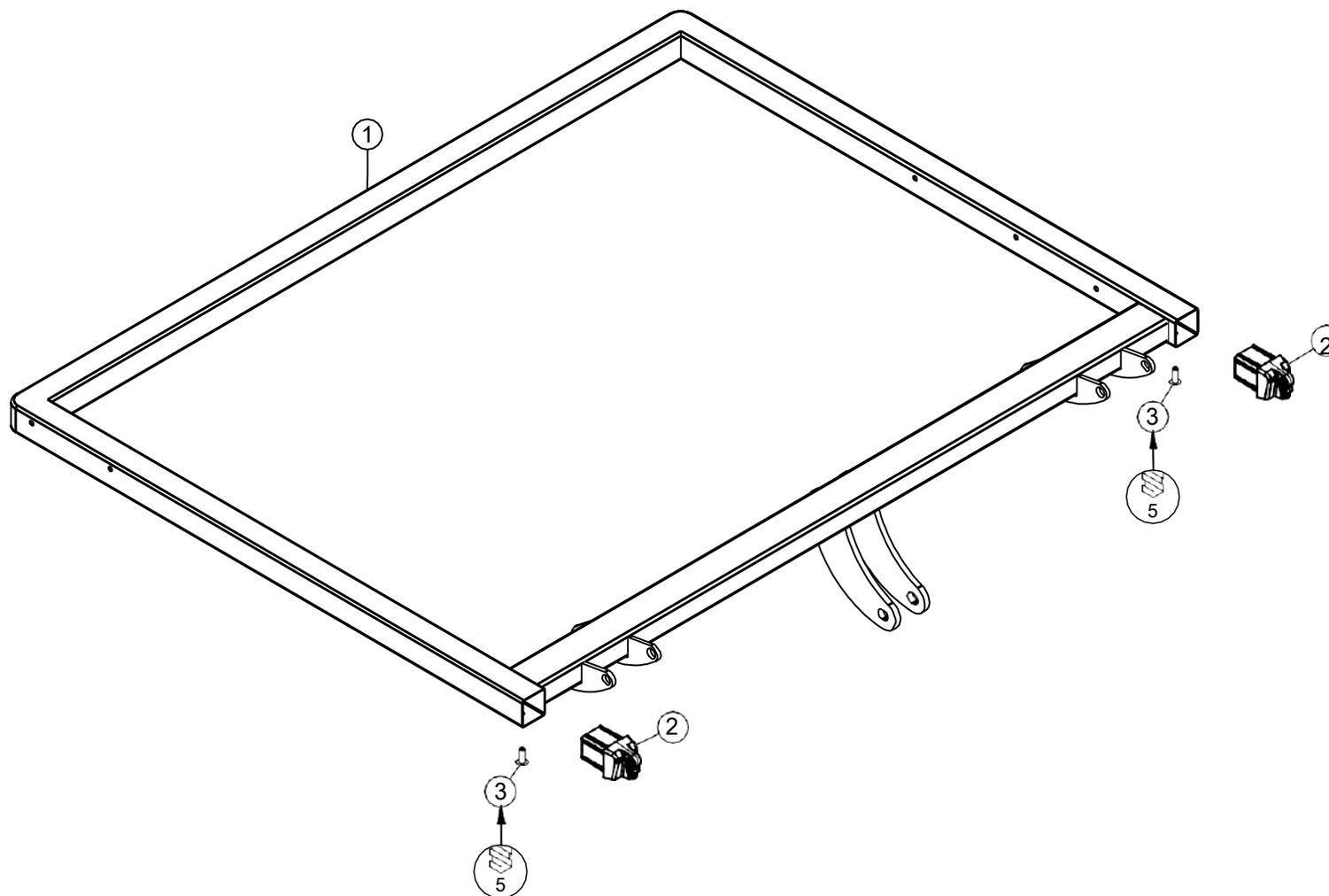

	ID	Descripción	Q
1	A-026201	bastidor respaldo laminado macizo 202003	1
2	P-018208	bisagra pivote virtual	2
3	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2

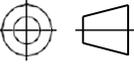		 Haelvoet	
Descripción: respaldo laminado macizo		Diseñador: Sebastián Popa	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 30/09/2019 Dibujo nr: T-037375	Escala: 1:6 Número de



T-038419

a


Opcion
es

ID.	Descripción
A	Respaldo de liberación rápida
B	EM CPR*


*No en camas Care /

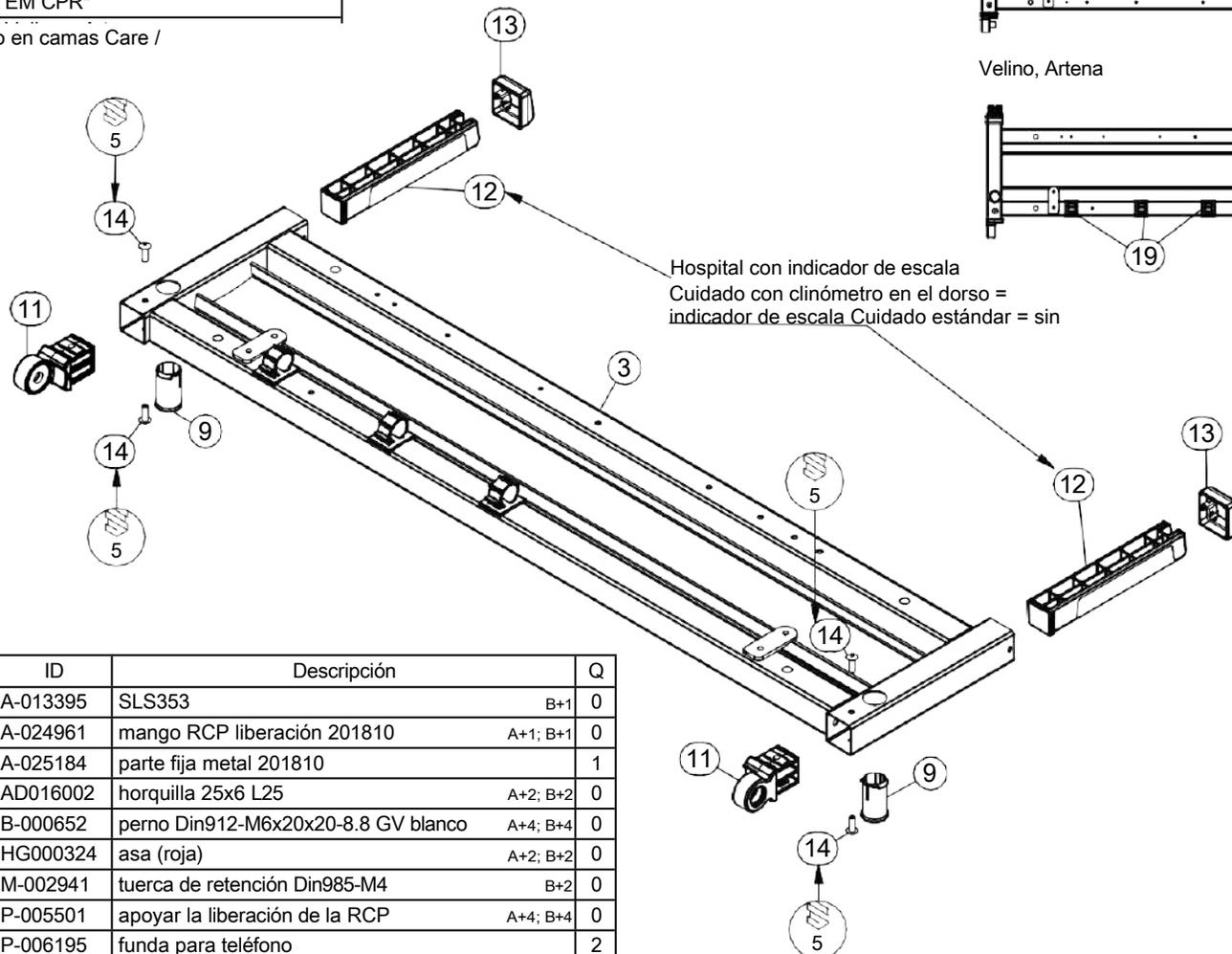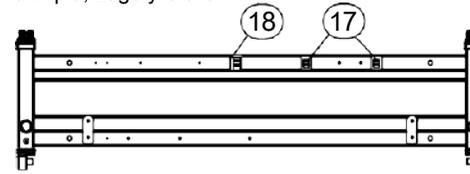Cable clips position
Olimpia, Lago y Siena


Velino, Artena

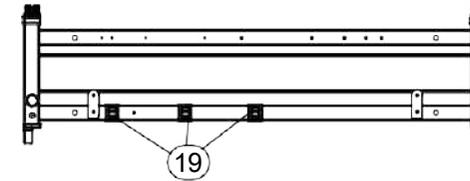

Respaldo de liberación

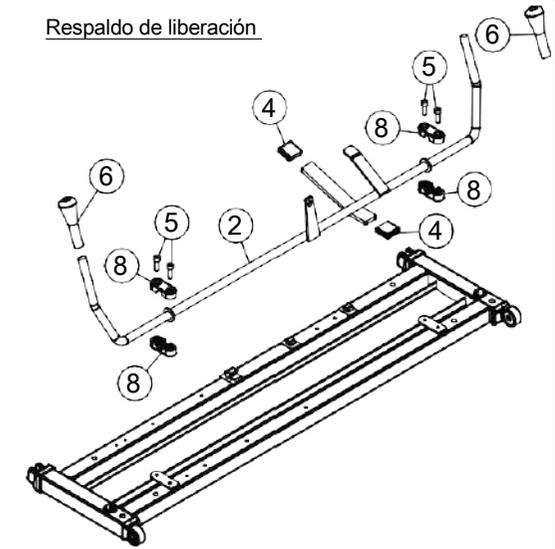

Montaje EM Control CPR

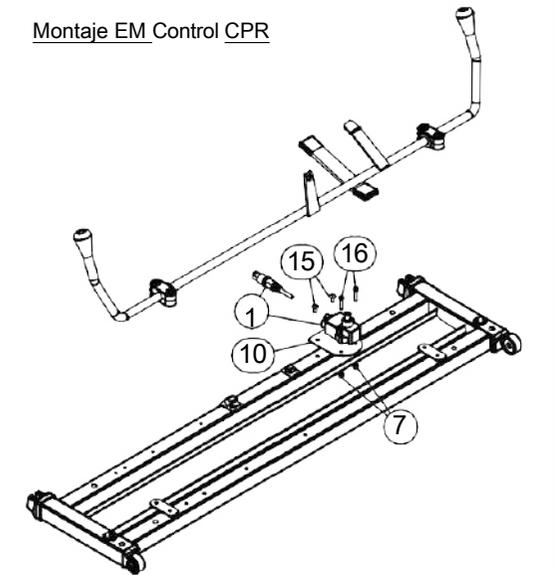

ID	Descripción	Q
1	A-013395 SLS353	B+1 0
2	A-024961 mango RCP liberación 201810	A+1; B+1 0
3	A-025184 parte fija metal 201810	1
4	AD016002 horquilla 25x6 L25	A+2; B+2 0
5	B-000652 perno Din912-M6x20x20-8.8 GV blanco	A+4; B+4 0
6	HG000324 asa (roja)	A+2; B+2 0
7	M-002941 tuerca de retención Din985-M4	B+2 0
8	P-005501 apoyar la liberación de la RCP	A+4; B+4 0
9	P-006195 funda para teléfono	2
10	P-016003 placa soporte interruptor	B+1 0
11	P-016277 somier de bisagras parte 2	2
12	P-018209 listón guía pivote virtual	2
13	P-018210 tapa parte fija	2
14	R-001694 remache A2/A2 4.8x14	4
15	R-004530 remache A2/A2 4.8x10	B+2 0
16	S-004699 tornillo Din84-4x20-4.8-GV	B+2 0
17	ST002069 clip de cable 7-8mm (push-in)	2
18	ST002070 clip de cable 9-10mm (push-in)	1
19	ST002071 clip de cable 16-18mm (push-in)	C+3 0


Descripción:

somier metálico parte fija

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del autor.

Diseñador:

Sebastián Popa

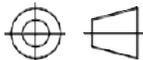

Fecha: 05/02/2020

Dibujo nr: T-038419

Escala: 1:6

Número de

T-037312

a

Opcion
es


ID.	Descripción
A	Respaldo de liberación rápida
B	EM CPR*
C	Velino y Artena

*No en camas Care /


Siena

Posición de los clips de cable



Olympia, Lago, Aron y Siena

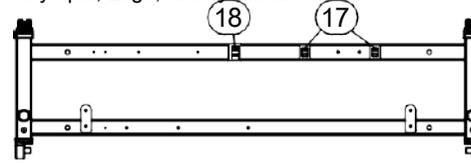


Velino, Artena

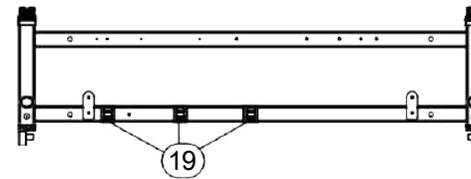

Respaldo de liberación

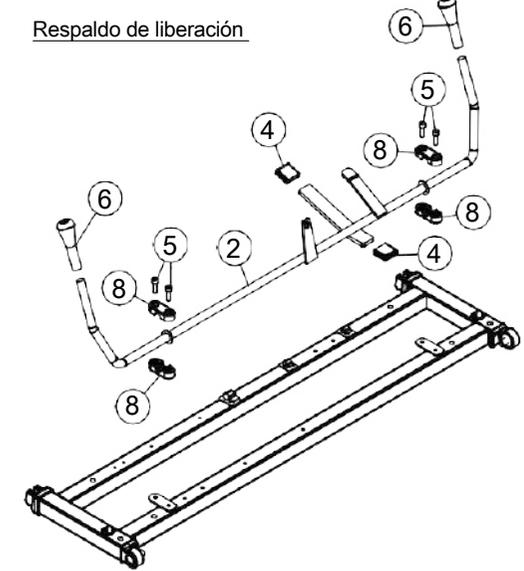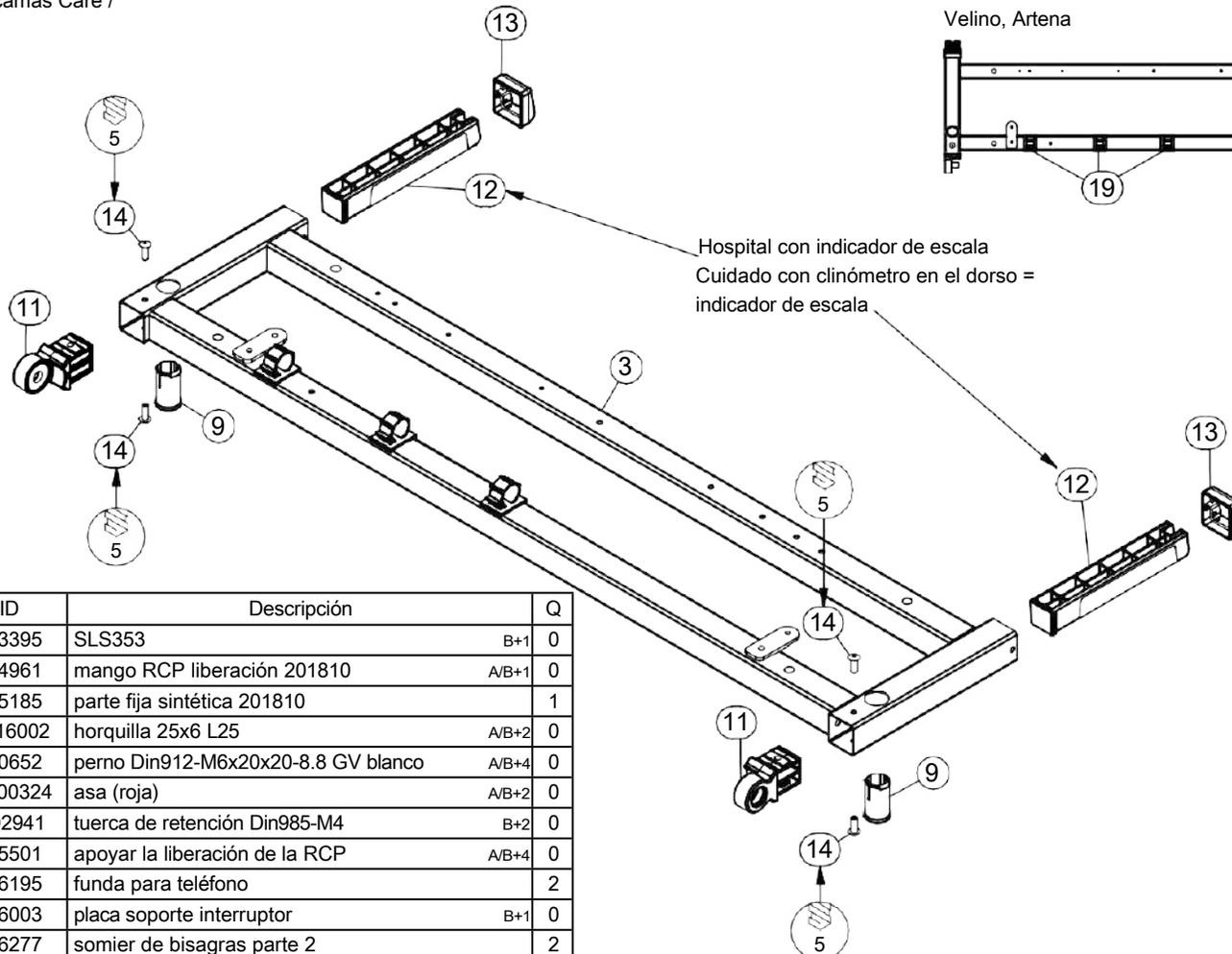Hospital con indicador de escala
Cuidado con clinómetro en el dorso =
indicador de escala

Montaje EM Control CPR

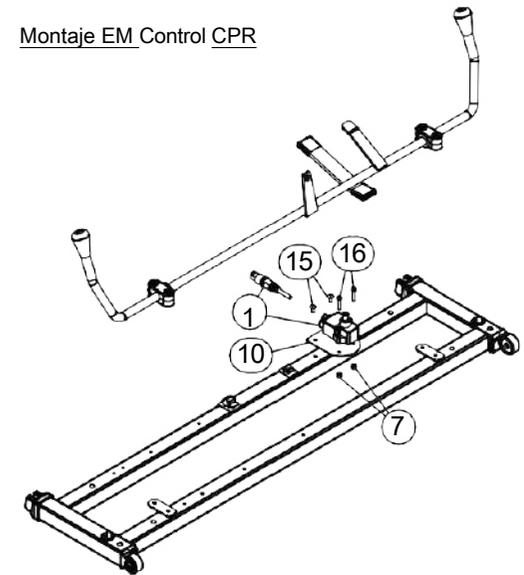


ID	Descripción	Q
1	A-013395 SLS353	B+1 0
2	A-024961 mango RCP liberación 201810	A/B+1 0
3	A-025185 parte fija sintética 201810	1
4	AD016002 horquilla 25x6 L25	A/B+2 0
5	B-000652 perno Din912-M6x20x20-8.8 GV blanco	A/B+4 0
6	HG000324 asa (roja)	A/B+2 0
7	M-002941 tuerca de retención Din985-M4	B+2 0
8	P-005501 apoyar la liberación de la RCP	A/B+4 0
9	P-006195 funda para teléfono	2
10	P-016003 placa soporte interruptor	B+1 0
11	P-016277 somier de bisagras parte 2	2
12	P-018209 listón guía pivote virtual	2
13	P-018210 tapa parte fija	2
14	R-001694 remache A2/A2 4.8x14	4
15	R-004530 remache A2/A2 4.8x10	B+2 0
16	S-004699 tornillo Din84-4x20-4.8-GV	B+2 0
17	ST002069 clip de cable 7-8mm (push-in)	2
18	ST002070 clip de cable 9-10mm (push-in)	1
19	ST002071 clip de cable 16-18mm (push-in)	C+3 0

Descripción:

parte fija laminado sintético y sólido

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

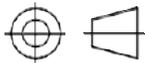Diseñador:
Sergiu S.

Fecha: 23/09/2019


Escala: 1:6

Dibujo nr: T-037312


Número de


T-037257

a

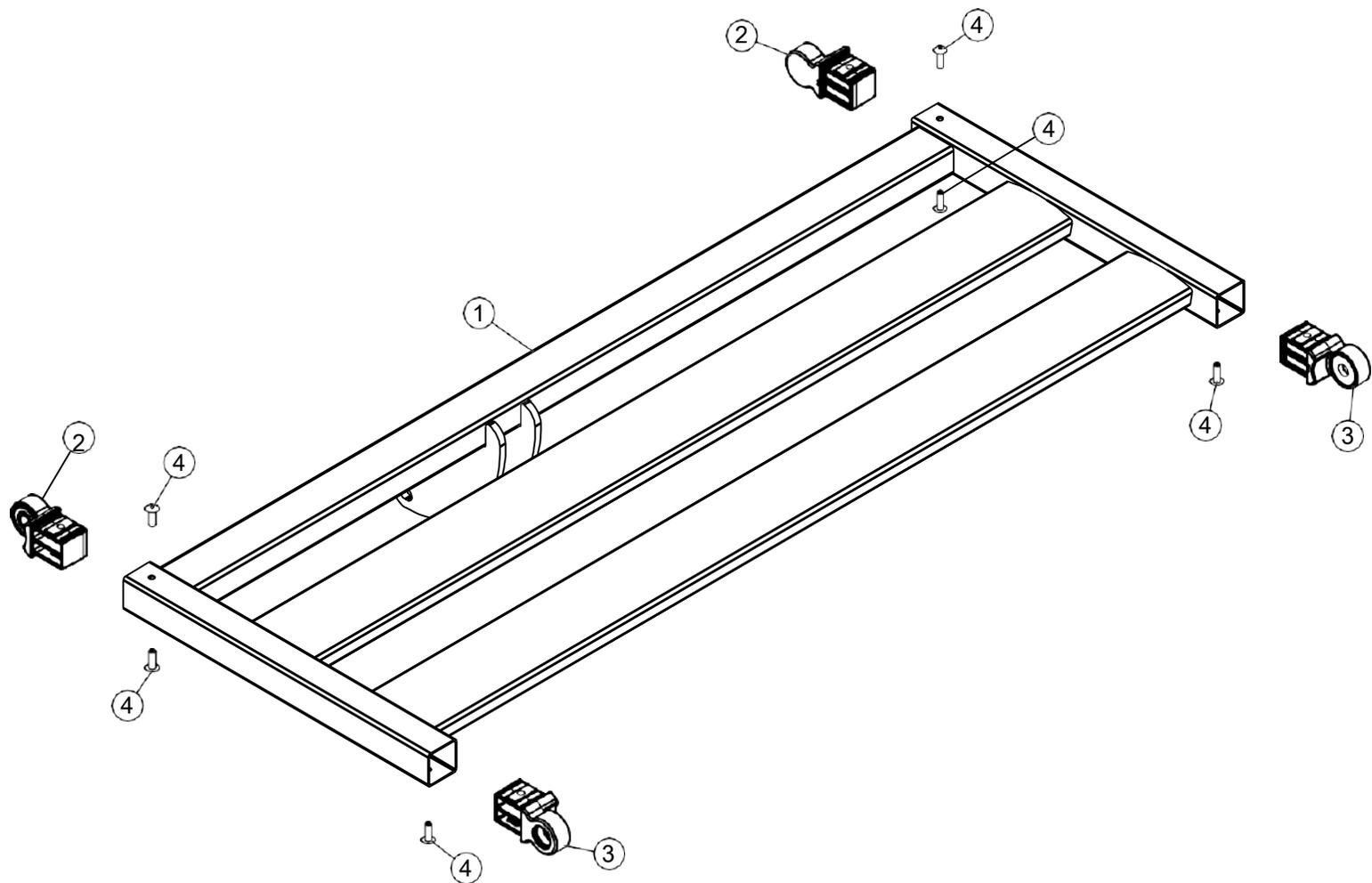


	ID	Descripción	Q
1	A-012488	marco reposa rodillas metal	1
2	P-016276	somier de bisagras parte 1	2
3	P-016277	somier de bisagras parte 2	2
4	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	6


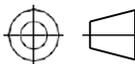
		 Haelvoet	
Descripción: reposa rodillas metal		Diseñador: Sebastián Popa	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del autor.		Fecha: 16/09/2019 Dibujo nr: T-037257	Escala: 1 :5 Número de

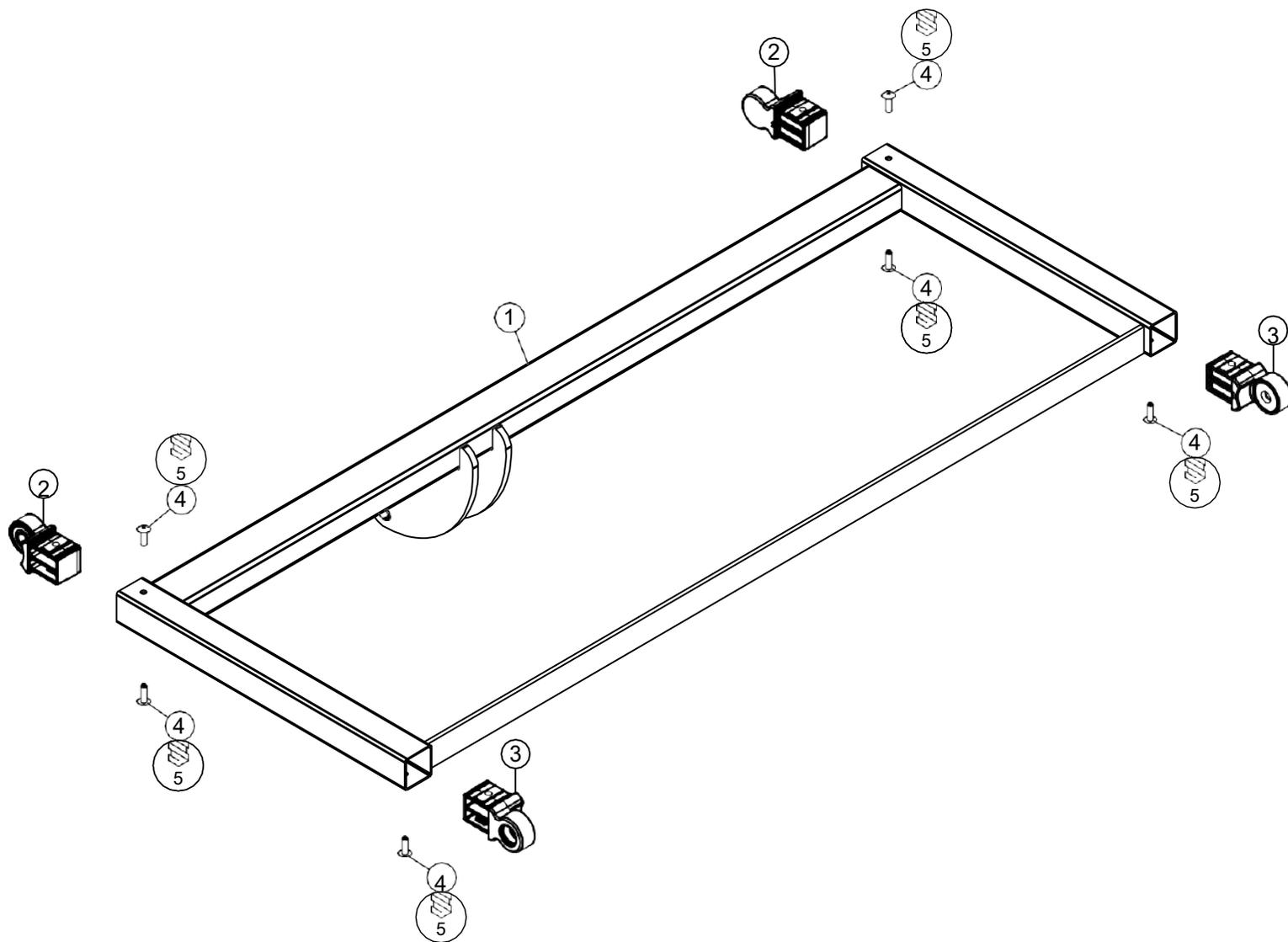


ID	Descripción	Q
1	A-012265 marco apoya rodillas sintético	1
2	P-016276 somier de bisagras parte 1	2
3	P-016277 somier de bisagras parte 2	2
4	R-001694 remache A2/A2 4.8x14	6

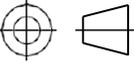		 Haelvoet	
Descripción: apoya rodillas laminado sintético y macizo		Diseñador: Sergiu S.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del autor.		Fecha: 23/09/2019 Dibujo nr: T-037309	Escala: 1:5 Número de

T-037262		a
Opciones		
ID.	Descripción	
A	extensión del reposapiés	

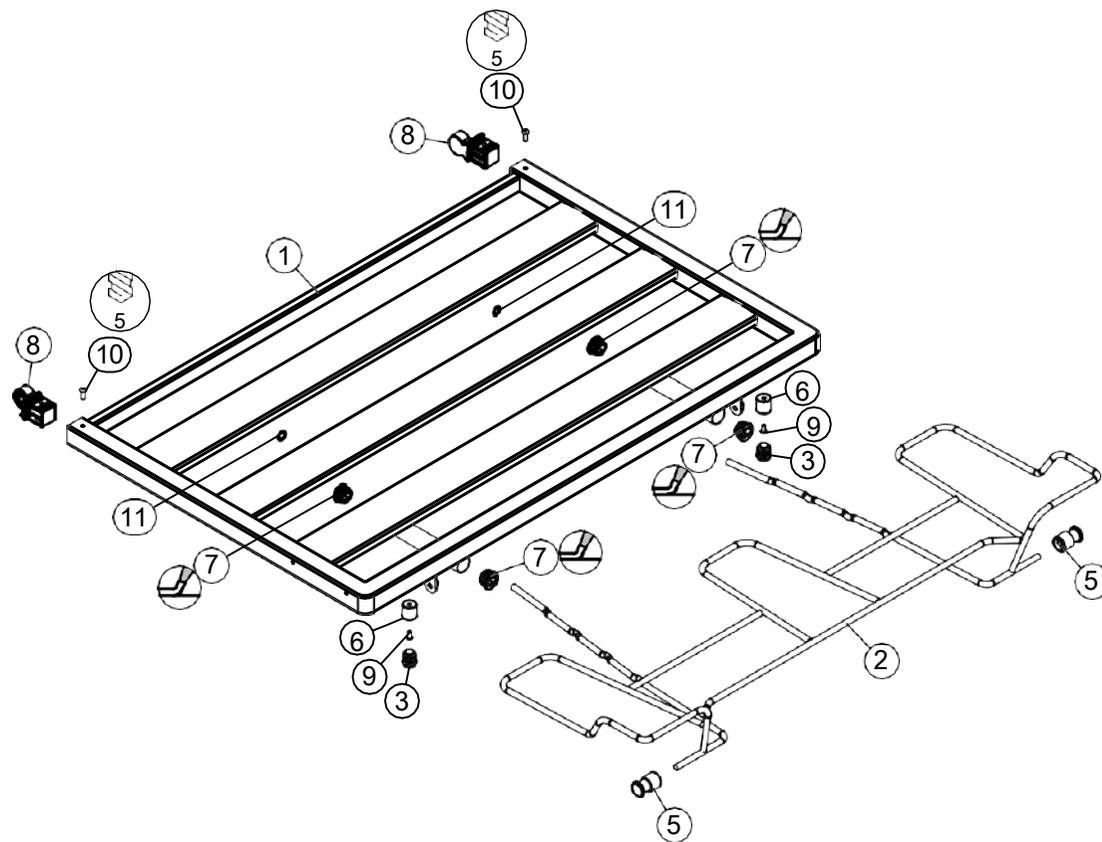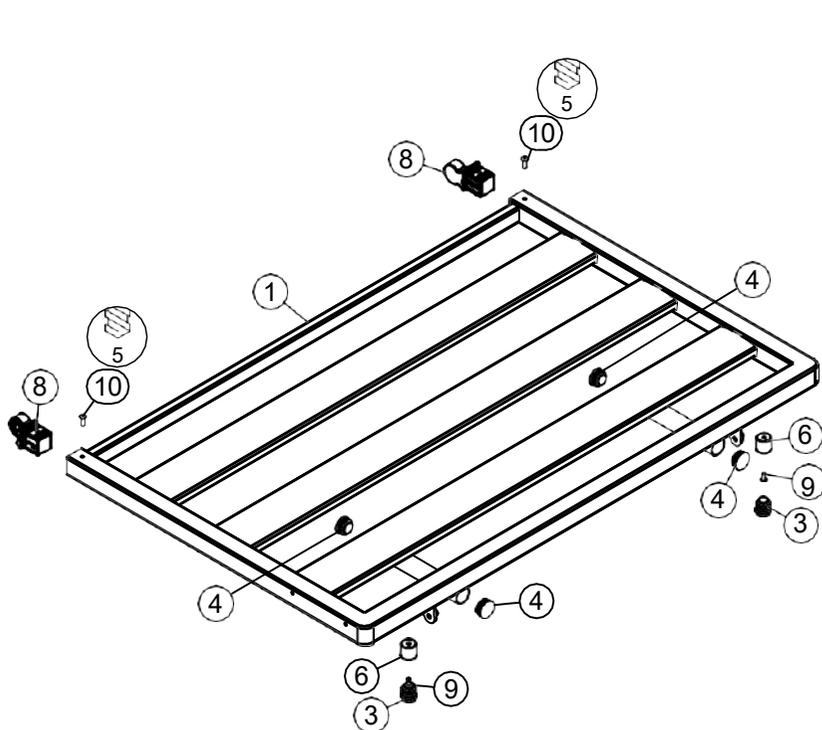


ID	Descripción		Q
1	A-012489	marco reposapiés metal	1
2	A-014443	extensión reposapiés II	A+1 0
3	AD000788	tapa HR 20mm	2
4	AD000890	tapón PR 25mm	4
5	DC032222	reposapiés rueda II	A+2 0
6	P-006193	soporte colchón plataforma parte	2
7	P-006705	tapa guía pies extensión	A+4 0
8	P-016276	somier de bisagras parte 1	2
9	R-000461	remache Alu/St 4.8x10	2
10	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2
11	ST002145	cierre a presión 8mm	A+2 0

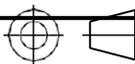
		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
reposapiés metálico		Sebastián Popa	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 16/09/2019	Escala: 1 :10
		Dibujo nr: T-037262	Número de

T-037310		a
Opciones		
ID.	Descripción	
A	extensión de cama	

Opción: extensión del reposapiés

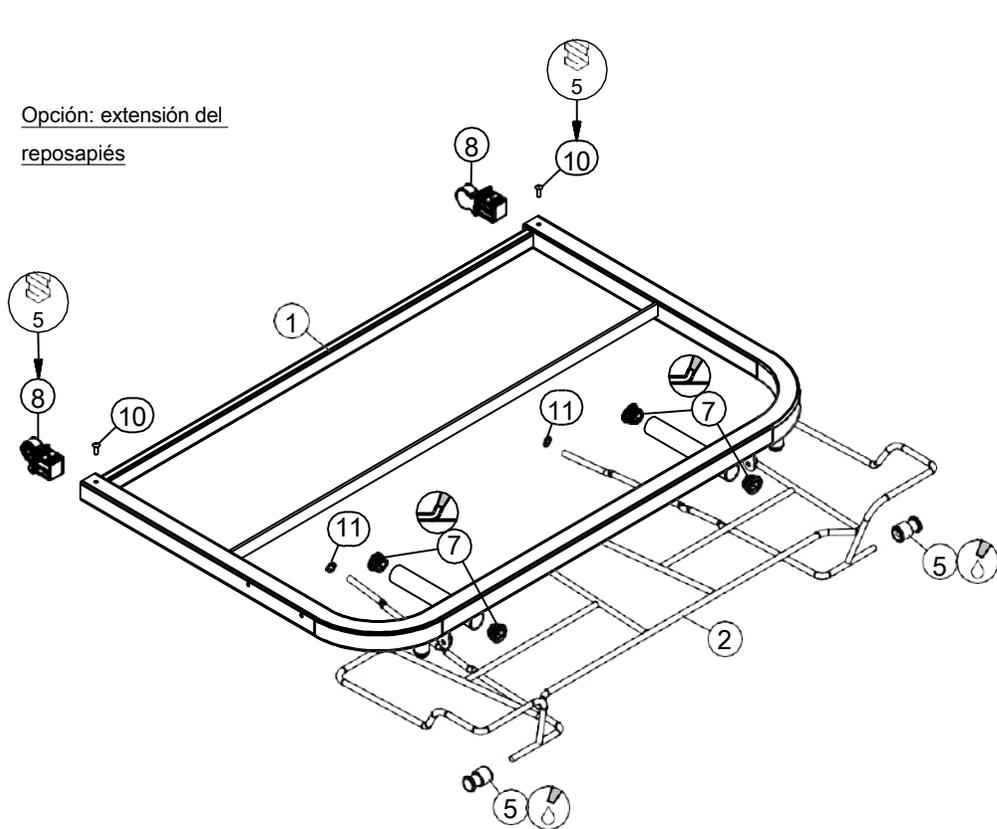

Estándar

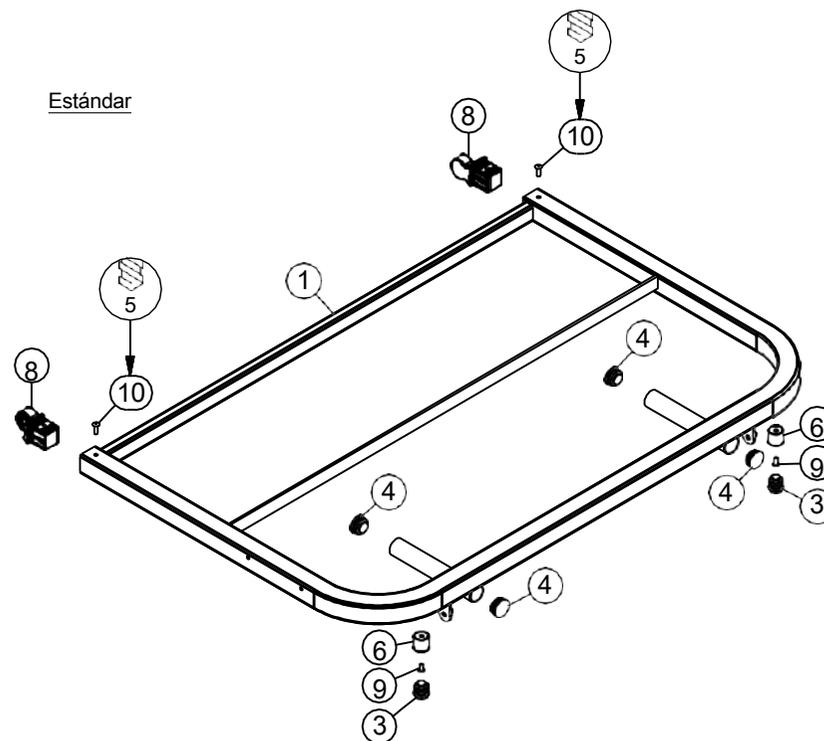


ID	Descripción		Q
1	A-012323	marco reposapiés sintético	1
2	A-014443	extensión reposapiés II	A+1 0
3	AD000788	tapa HR 20mm	2
4	AD000890	tapón PR 25mm	A -4 4
5	DC032222	reposapiés rueda II	A+2 0
6	P-006193	soporte colchón plataforma parte	2
7	P-006705	tapa guía pies extensión	A+4 0
8	P-016276	somier de bisagras parte 1	2
9	R-000461	remache Alu/St 4.8x10	2
10	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2
11	ST002145	cierre a presión 8mm	A+2 0


		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
reposapiés laminado sintético y macizo		Sergiu S.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 23/09/2019	Escala: 1:10
		Dibujo nr: T-037310	Número de

T-037238

a

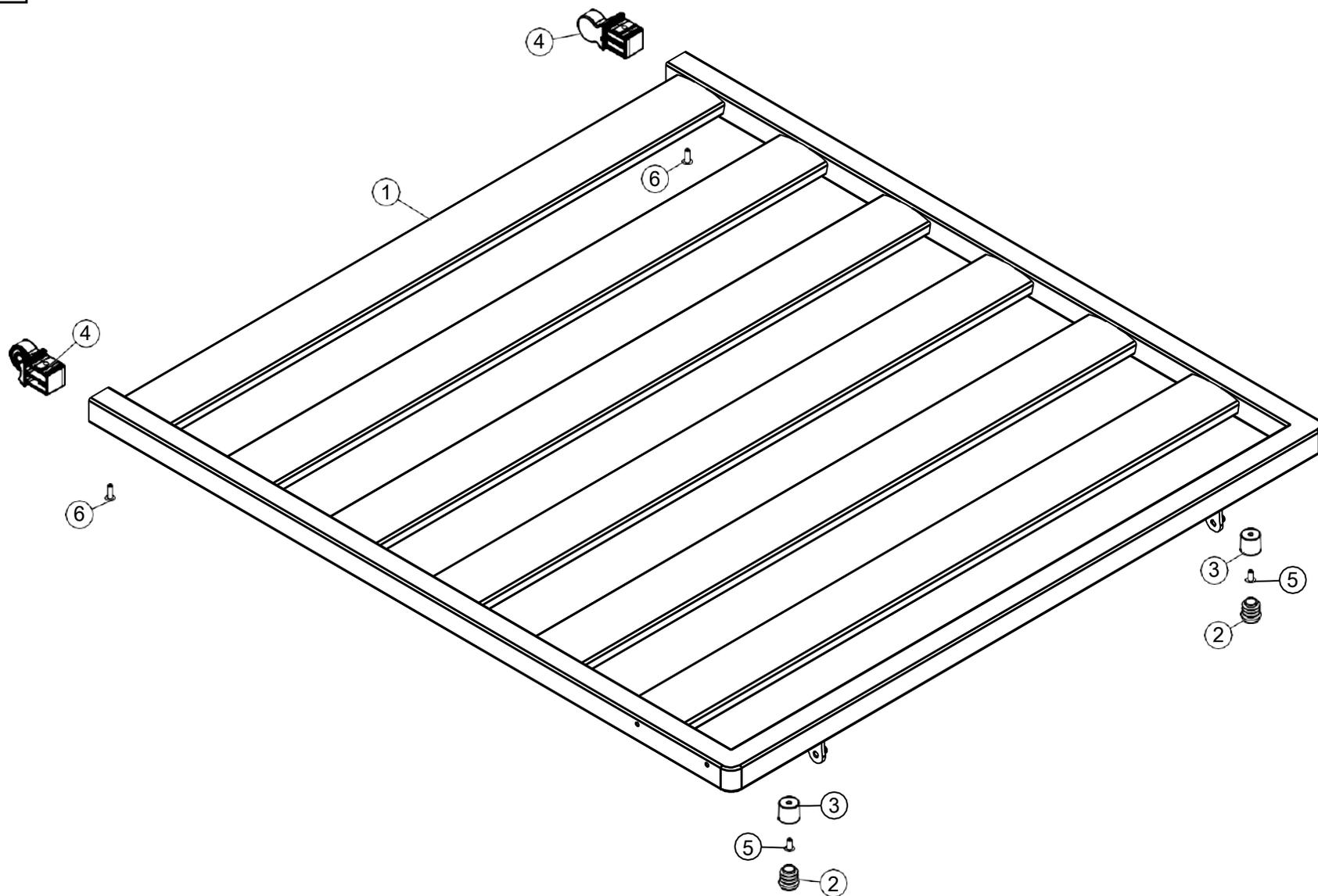


	ID	Descripción	Q
1	A-012679	marco reposapiernas metal	1
2	AD000788	tapa HR 20mm	2
3	P-006193	sopORTE colchón plataforma parte	2
4	P-016276	somier de bisagras parte 1	2
5	R-000461	remache Alu/St 4.8x10	2
6	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2

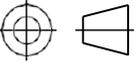		 Haelvoet	
Descripción: reposapiernas metálico		Diseñador: Sebastián Popa	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 13/09/2019 Dibujo nr: T-037238	Escala: 1 : 6 Número de

T-037679

a

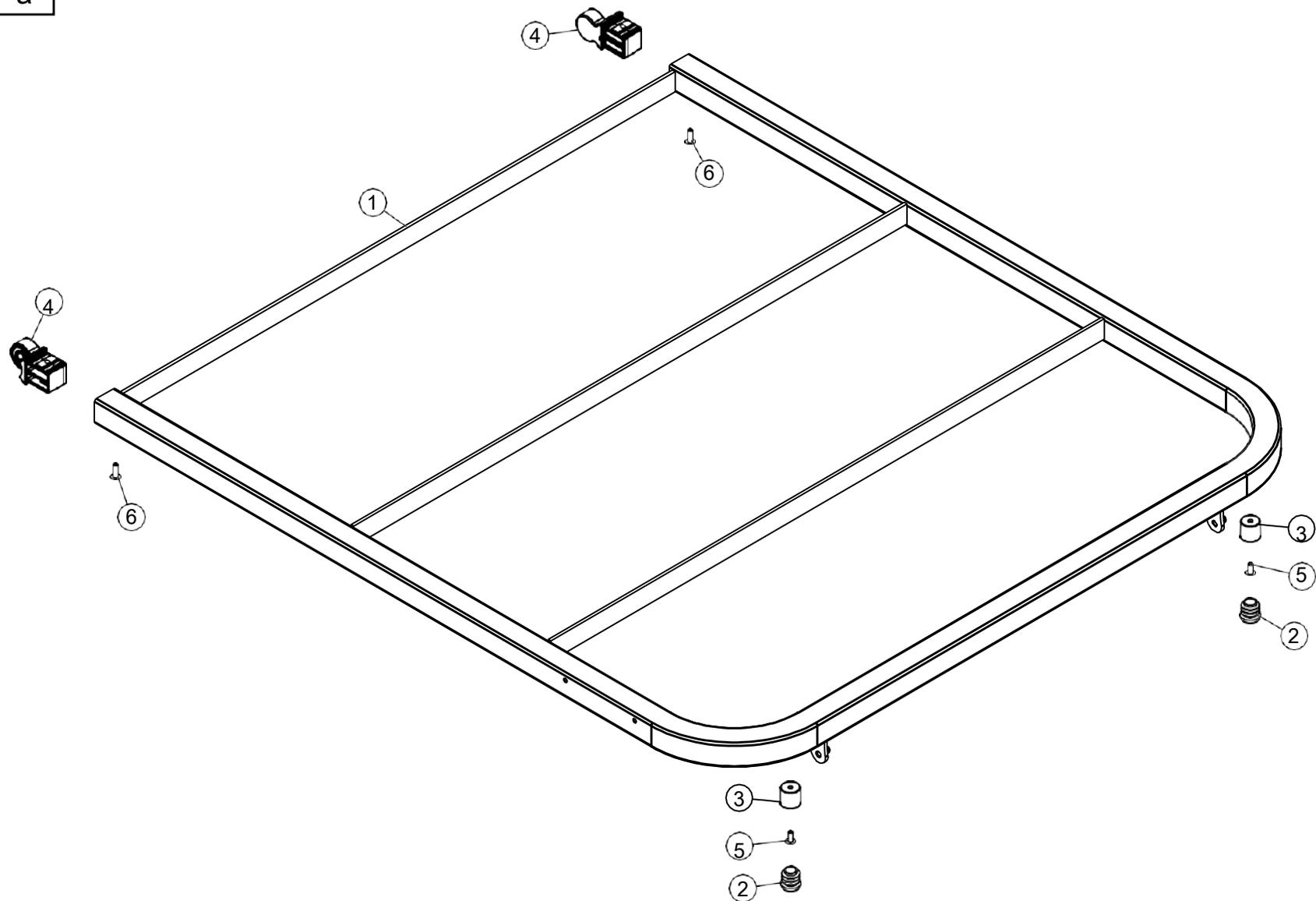

	ID	Descripción	Q
1	A-012502	marco reposapiernas sintético	1
2	AD000788	tapa HR 20mm	2
3	P-006193	sopORTE colchón plataforma parte	2
4	P-016276	somier de bisagras parte 1	2
5	R-000461	remache Alu/St 4.8x10	2
6	R-001694	remache A2/A2 4.8x14	2

		 Haelvoet	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 07/11/2019	Escala: 1 : 6
		Dibujo nr: T-037679	Número de


T-039114

b

Opcion
es

ID. Descripción

Respaldo de liberación rápida

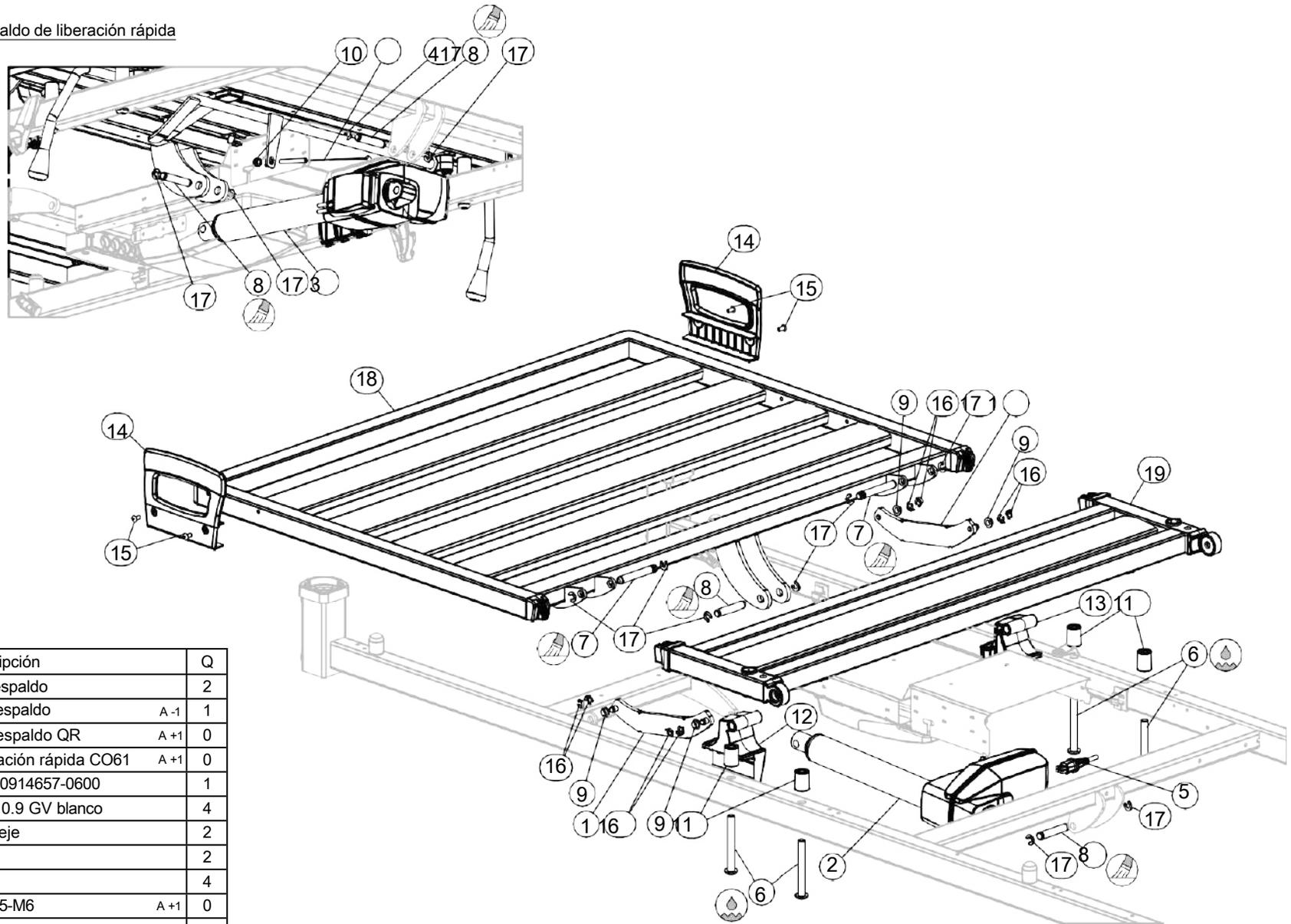

ID	Descripción	Q
1	A-012622 mecanismo de tracción respaldo	2
2	A-023486 actuador LA40 J14854 Respaldo	A -1 1
3	A-023487 actuador LA40 J14408 Respaldo QR	A +1 0
4	A-025032 cable de tracción de liberación rápida CO61	A +1 0
5	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
6	B-005769 perno Iso 7380-M10x80-10.9 GV blanco	4
7	DC006490 sistema de retracción del eje	2
8	DC015887 motor de eje	2
9	GL000510 rodamiento 081014-05	4
10	M-000137 tuerca de retención Din985-M6	A +1 0
11	P-006532 soporte parte fija	4
12	P-011301 pieza deslizante respaldo R	1
13	P-012494 pieza deslizante respaldo L	1
14	P-015467 plataforma para colchón de asas	2
15	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	4
16	ST000797 muelle de fijación diam.8	8
17	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	8
18	T-037231 respaldo metálico	1
19	T-038419 parte fija metal	1

Descripción:

montaje colchon plataforma metal - respaldo y parte fija

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

 Haelvoet
Diseñador:
David V.Fecha: 23/04/2020
Dibujo nr: T-039114Escala: 1 : 8
Número de
revisión: b


T-039121

c


Opcion
es


ID. Descripción

A Extensión del reposapiés

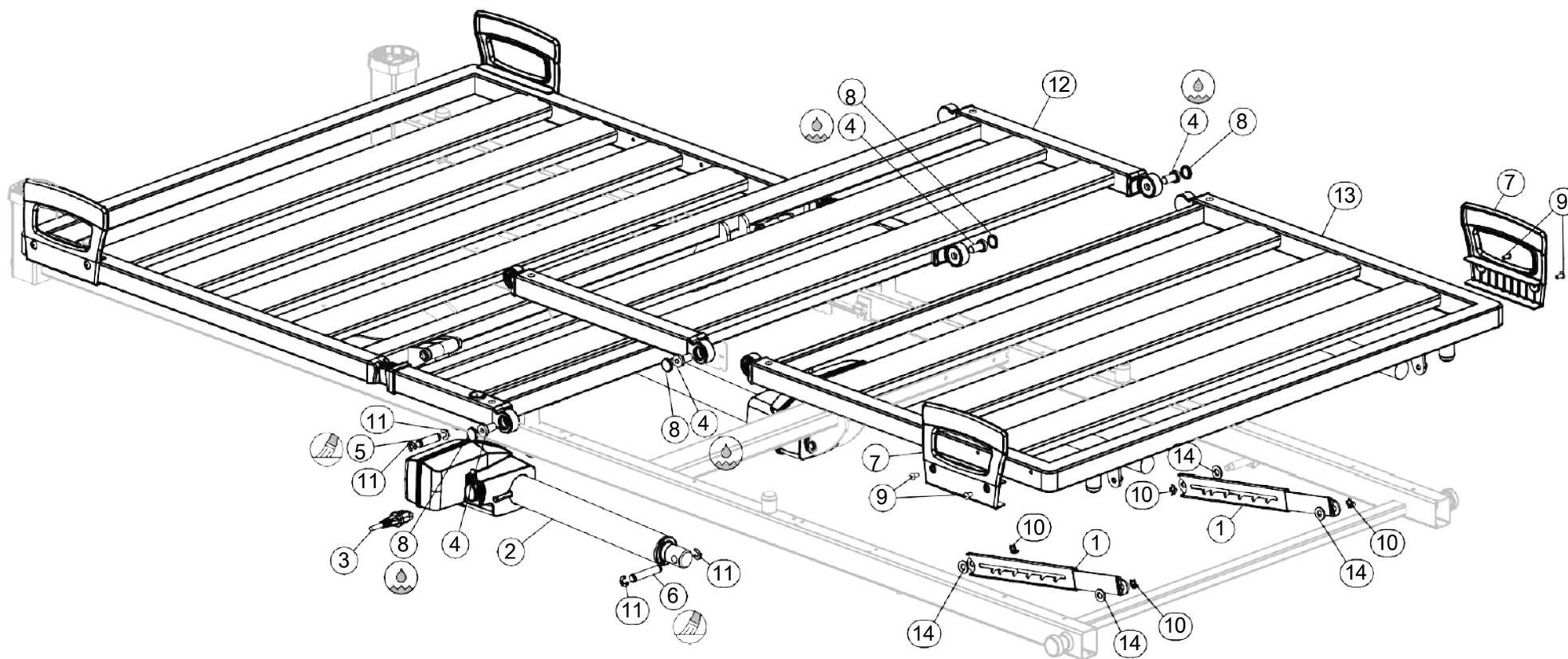


ID	Descripción	Q
1	A-000651 ajuste telescópico 215-355	2
2	A-023488 actuador LA40 J14855 Reposa rodillas	1
3	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
4	B-003317 perno-M10x18x12-GV blanco	4
5	DC010663 eje tipo 1-10x30	1
6	DC015887 motor de eje	1
7	P-015467 plataforma para colchón de asas	A-2 2
8	P-020447 tapa colchón plataforma bisagra	4
9	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	A-4 4
10	ST000797 muelle de fijación diam.8	4
11	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	4
12	T-037257 reposa rodillas metal	1
13	T-037262 reposapiés metálico	1
14	VL010643 arandela sintética 17x8.6x2	4

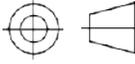		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
montaje colchon plataforma metal - reposa rodillas y reposa pies		David V.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 23/04/2020	Escala: 1 : 8
		Dibujo nr: T-039121	Número de

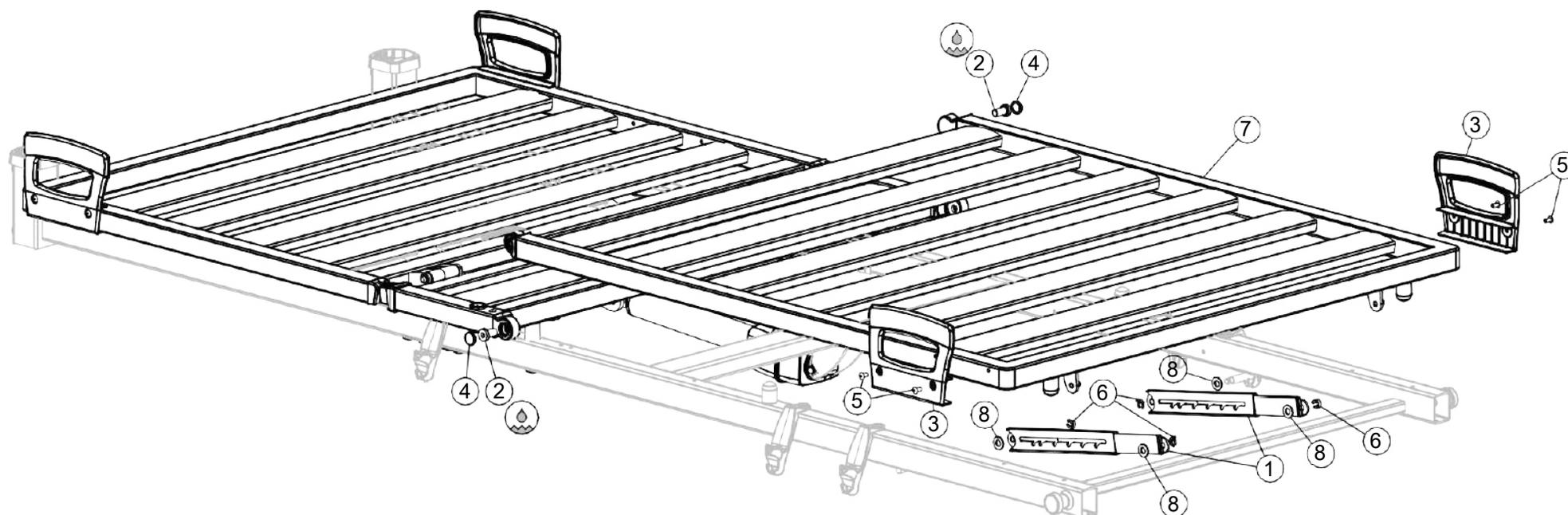

ID	Descripción	Q
1	A-000651 ajuste telescópico 215-355	2
2	B-003317 perno-M10x18x12-GV blanco	2
3	P-015467 plataforma para colchón de asas	2
4	P-020447 tapa colchón plataforma bisagra	2
5	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	4
6	ST000797 muelle de fijación diam.8	4
7	T-037238 reposapiernas metálico	1
8	VL010643 arandela sintética 17x8.6x2	4


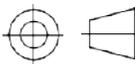
		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
montaje colchón plataforma metal - reposapiernas		David V.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 23/04/2020	Escala: 1 : 8
		Dibujo nr: T-039122	Número de

T-039149

c

Opcion
es

ID.	Descripción
A	Respaldo de liberación rápida

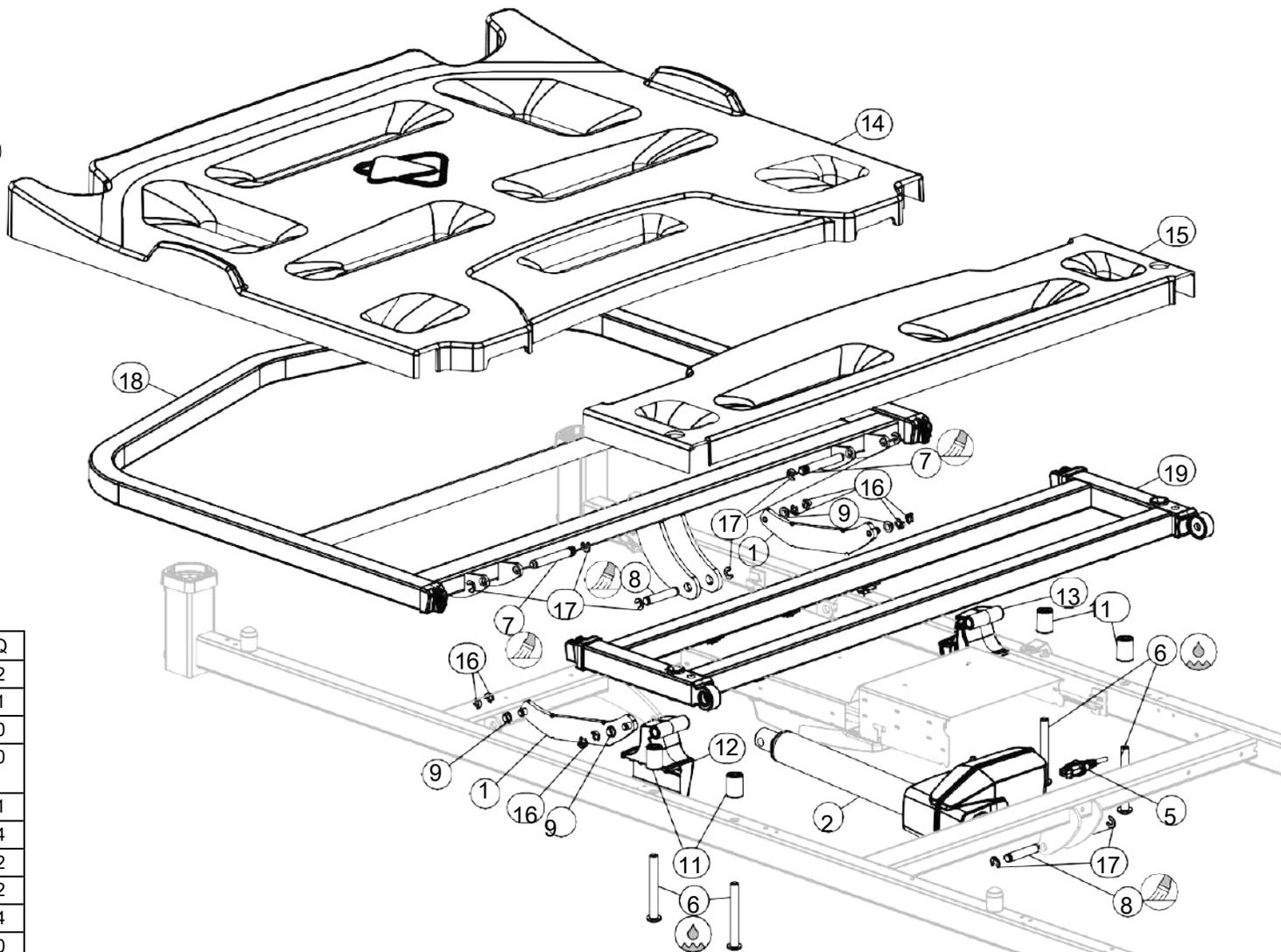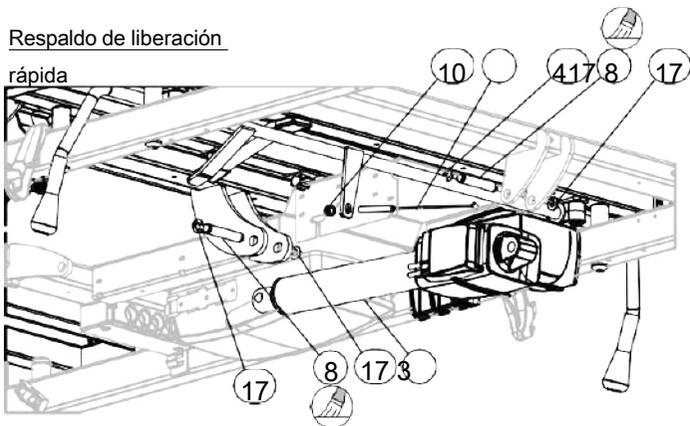Respaldo de liberación
rápida

ID	Descripción	Q
1	A-012622 mecanismo de tracción respaldo	2
2	A-023486 actuador LA40 J14854 Respaldo	A -1 1
3	A-023487 actuador LA40 J14408 Respaldo QR	A +1 0
4	A-025032 cable de tracción de liberación rápida CO61	A +1 0
5	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
6	B-005769 perno Iso 7380-M10x80-10.9 GV blanco	4
7	DC006490 sistema de retracción del eje	2
8	DC015887 motor de eje	2
9	GL000510 rodamiento 081014-05	4
10	M-000137 tuerca de retención Din985-M6	A +1 0
11	P-006532 soporte parte fija	4
12	P-011301 pieza deslizante respaldo R	1
13	P-012494 pieza deslizante respaldo L	1
14	P-018224 colchón plataforma respaldo II	1
15	P-018228 plataforma de colchones fija parte II	1
16	ST000797 muelle de fijación diam.8	8
17	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	8
18	T-037311 respaldo sintético	1


Descripción:

montaje colchón plataforma sintética - respaldo y parte fija

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito

 Haelvoet
Diseñador:
Lucas V.

Fecha: 23/04/2020

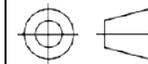


Escala: 1 : 8


del autor.
de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95


Dibujo nr: T-039149

Número de
revisión: c

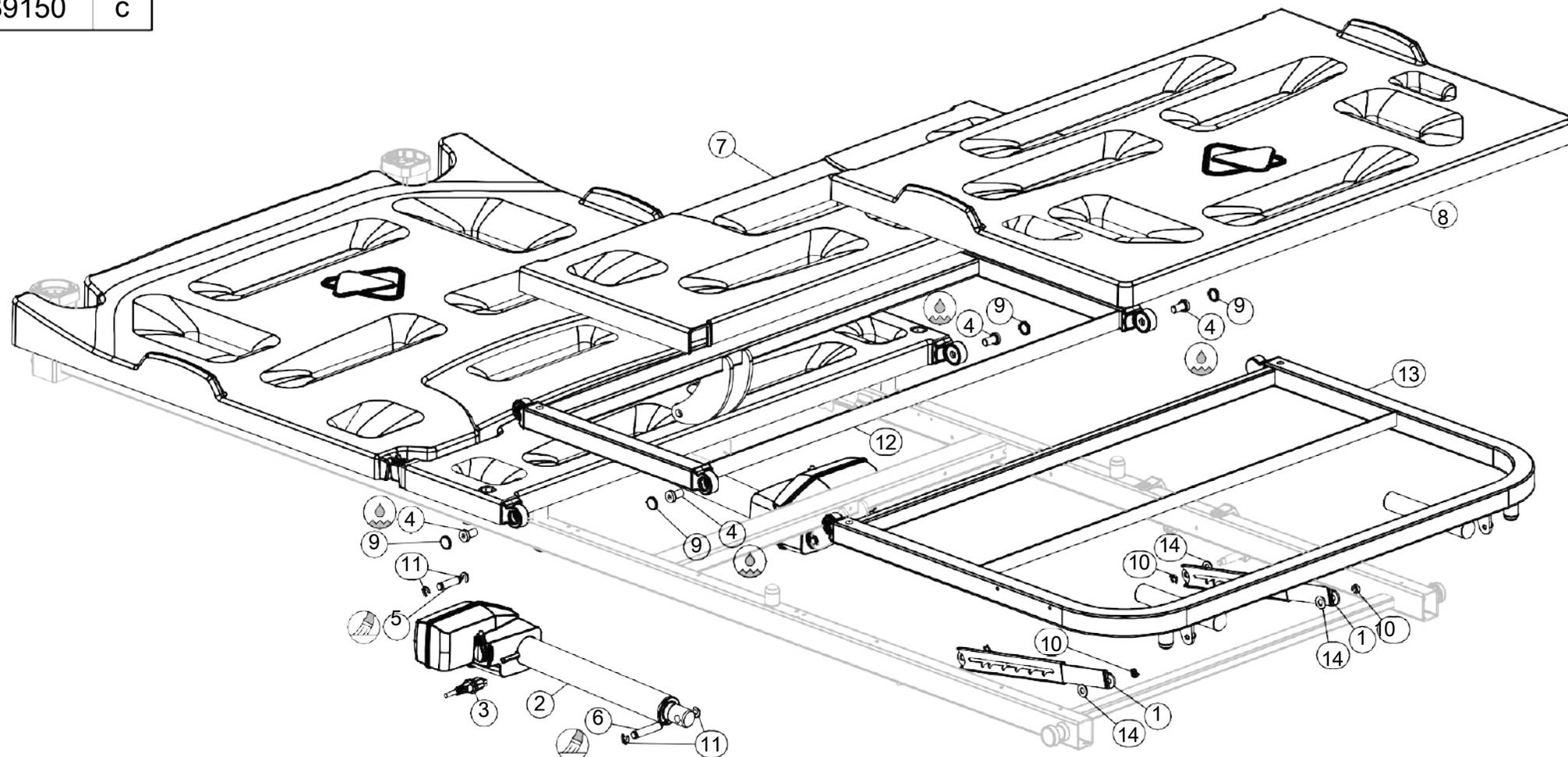


ID	Descripción	Q
1	A-000651 ajuste telescópico 215-355	2
2	A-023488 actuador LA40 J14855 Reposa rodillas	1
3	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
4	B-003317 perno-M10x18x12-GV blanco	4
5	DC010663 eje tipo 1-10x30	1
6	DC015887 motor de eje	1
7	P-010230 colchón paltform reposa rodillas/punto de rotación fijo	1
8	P-014398 colchón plataforma reposapiés	1
9	P-020447 tapa colchón plataforma bisagra	4
10	ST000797 muelle de fijación diam.8	4
11	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	4
12	T-037309 apoya rodillas laminado sintético y macizo	1
13	T-037310 reposapiés laminado sintético y macizo	1

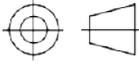			
		Descripción: montaje colchón plataforma sintético - reposa rodillas y reposa pies	Diseñador: Lucas V.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95			

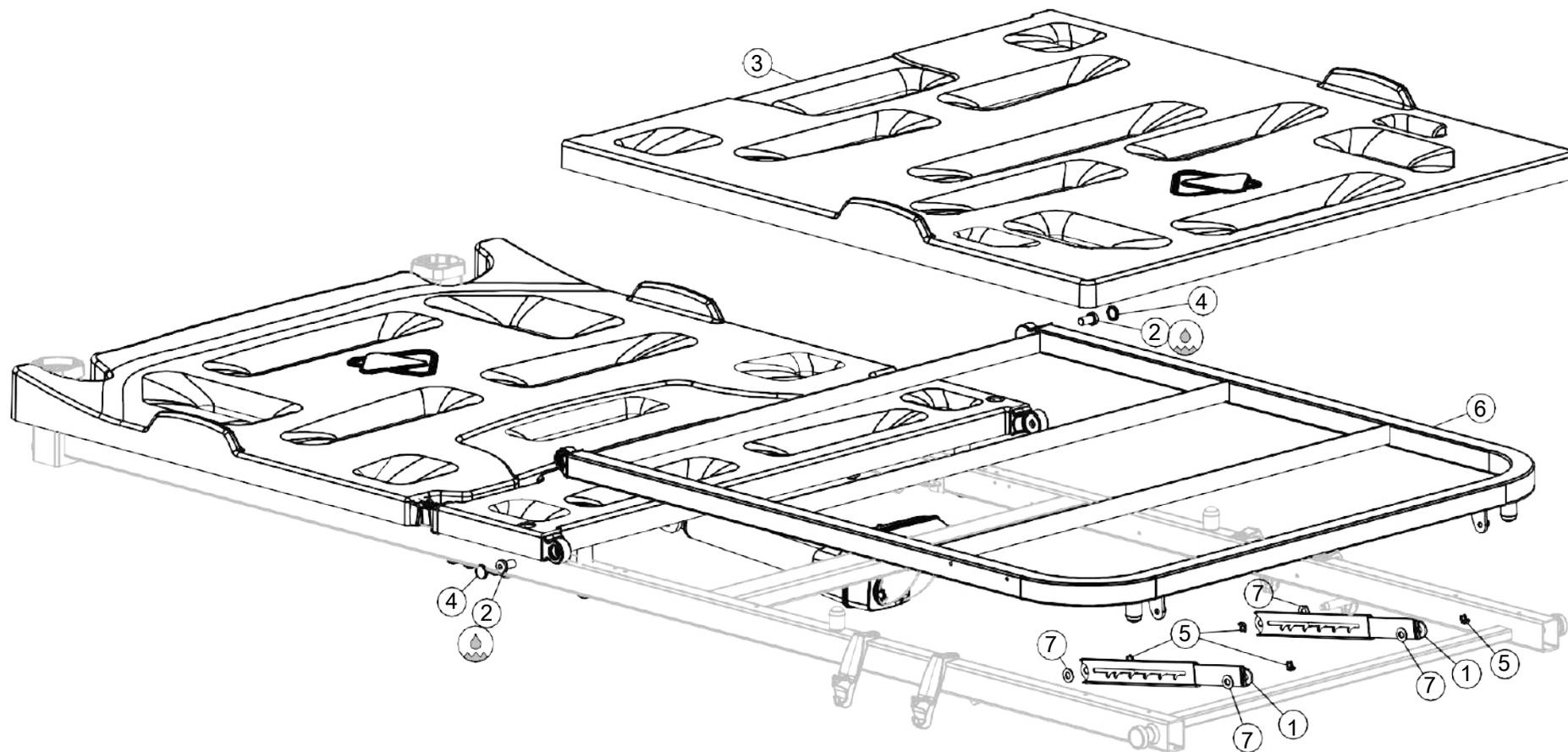

ID	Descripción	Q
1	A-000651 ajuste telescópico 215-355	2
2	B-003317 perno-M10x18x12-GV blanco	2
3	P-006021 sección de las patas del somier	1
4	P-020447 tapa colchón plataforma bisagra	2
5	ST000797 springfix diam.8	4
6	T-037679 reposapiernas laminado sintético y macizo	1
7	VL010643 arandela sintética 17x8.6x2	4

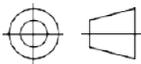Descripción: montaje colchón plataforma sintético - reposapiernas			
		Diseñador: Lucas V.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 23/04/2020	Escala: 1 : 8
		Dibujo nr: T-039153	Número de

T-039142


c

Opcion
es


ID.	Descripción
A	Respaldo de liberación rápida

Respaldo de liberación

rápida

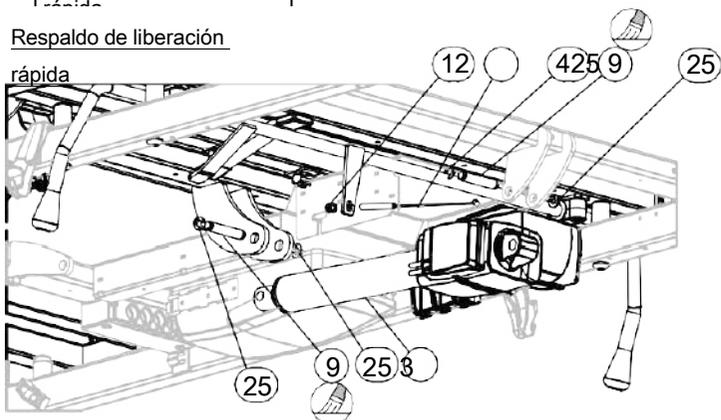


ID	Descripción	Q
1	A-012622 mecanismo de tracción respaldo	2
2	A-023486 actuador LA40 J14854 Respaldo	A-1 1
3	A-023487 actuador LA40 J14408 Respaldo QR	A+1 0
4	A-025032 cable de tracción de liberación rápida CO61	A+1 0
5	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
6	AD002198 tapa remache (gris)	8
7	B-005769 perno Iso 7380-M10x80-10.9 GV blanco	4
8	DC006490 sistema de retracción del eje	2
9	DC015887 motor de eje	2
10	DC016244 fijación HPL somier	8
11	GL000510 rodamiento 081014-05	4
12	M-000137 tuerca de retención Din985-M6	A+1 0
13	M-000894 tuerca de retención Din985-M5	B+2 0
14	P-006532 soporte parte fija	4
15	P-011301 pieza deslizando respaldo R	1
16	P-012494 pieza deslizando respaldo L	1
17	P-015467 plataforma para colchón de asas	2
18	P-016459 placa de bloqueo	B+1 0
19	P-018365 colchón plataforma tablero respaldo II	2
20	P-018366 tablero de la plataforma del colchón fijo parte II	2
21	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	4
22	R-002201 remache Alu/St 4.8x14	8
23	S-016477 tornillo Din965-M5x12-4.8 GV	B+2 0
24	ST000797 springfix diam.8	8
25	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	8
26	T-037312 parte fija sintética 201810	1
27	T-037375 bastidor respaldo laminado macizo 202003	1

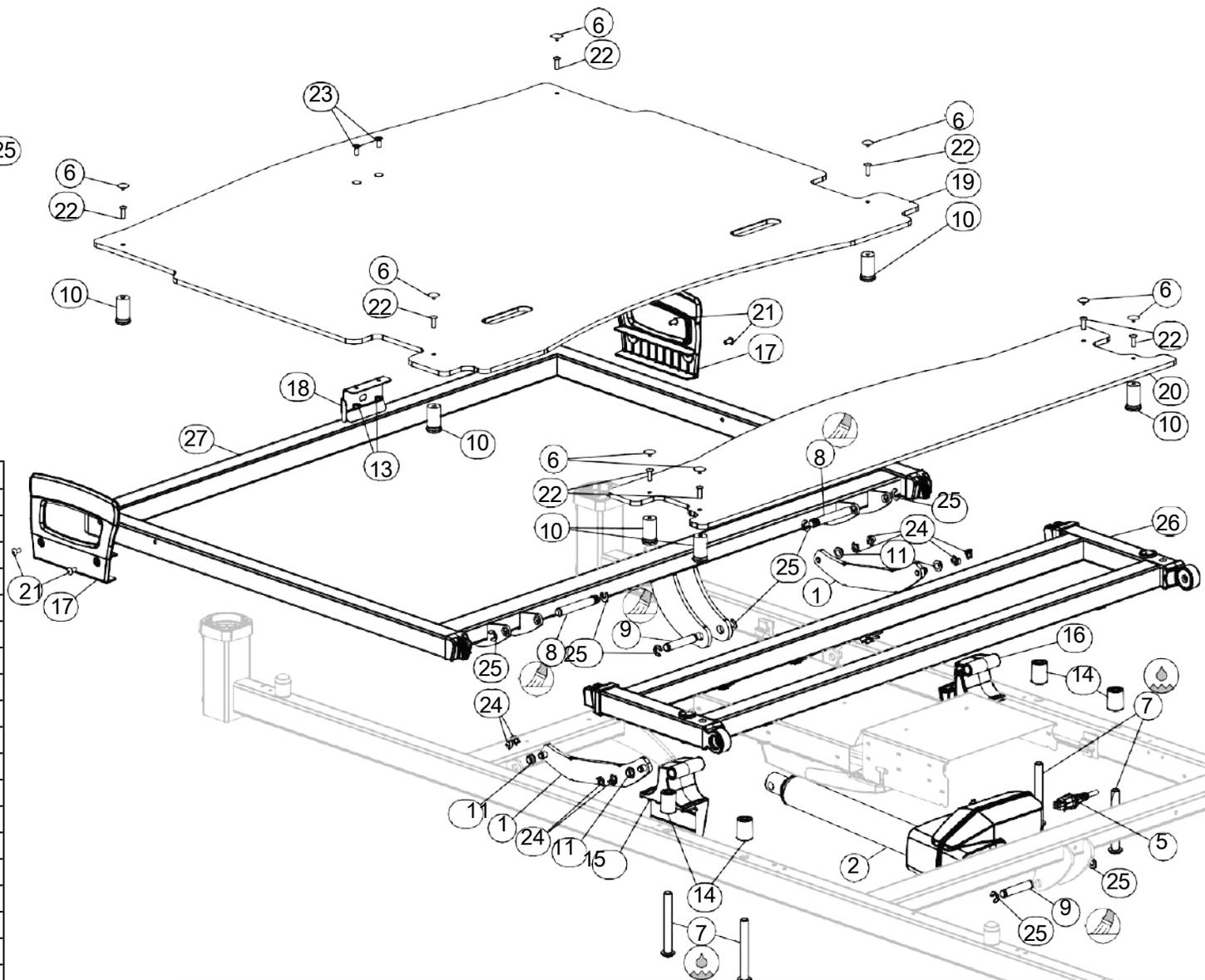

Haelvoet
Descripción:

montaje colchón plataforma laminado macizo - respaldo y parte fija

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

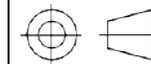 Diseñador:
Lucas V.

 Fecha: 23/04/2020
Dibujo nr: T-039142


 Escala: 1 : 8
Número de
revisión: c

T-039145

C

Opcion
es

ID. Descripción

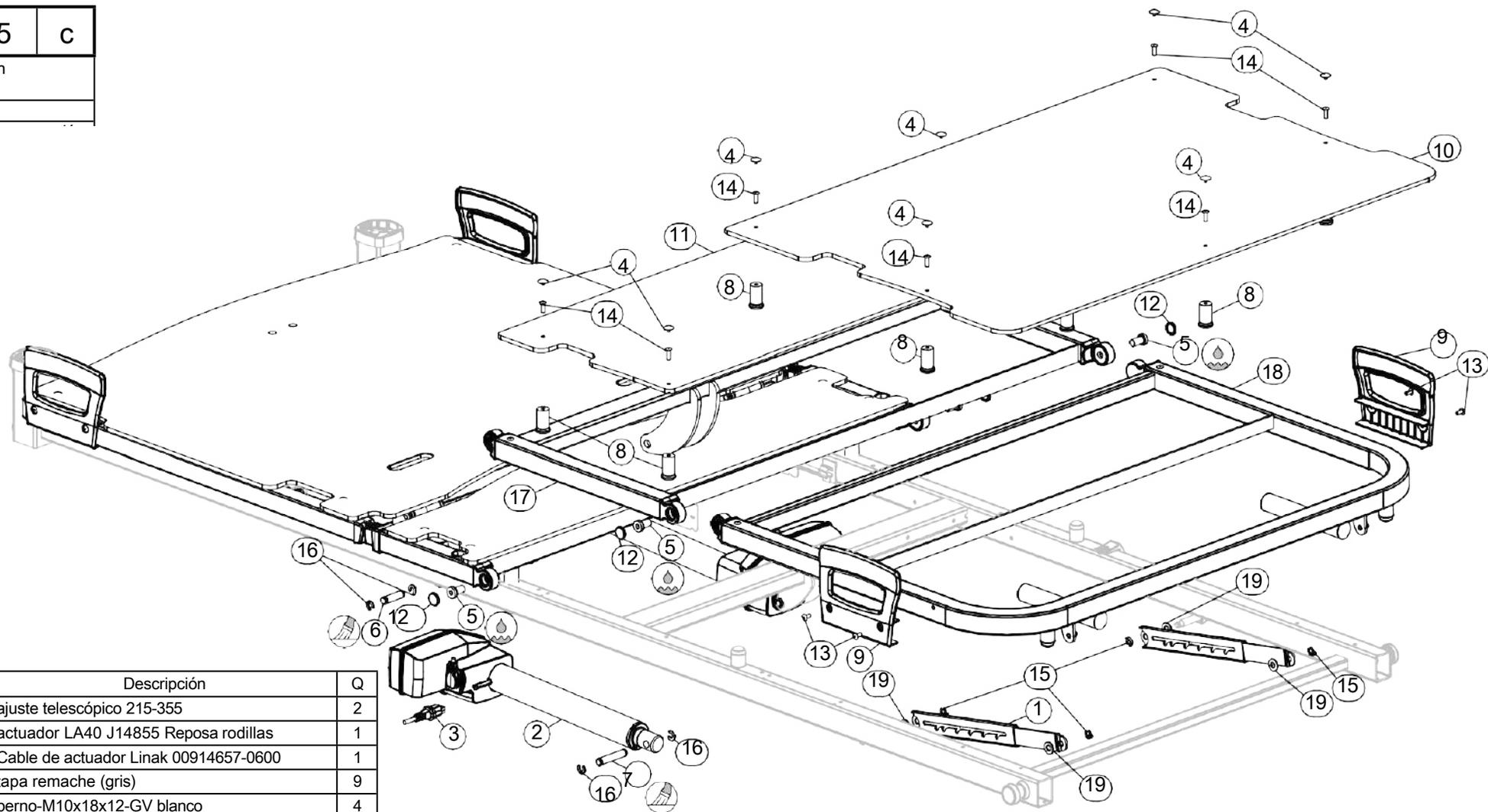

ID	Descripción	Q
1	A-000651 ajuste telescópico 215-355	2
2	A-023488 actuador LA40 J14855 Reposa rodillas	1
3	A-027008 Cable de actuador Linak 00914657-0600	1
4	AD002198 tapa remache (gris)	9
5	B-003317 perno-M10x18x12-GV blanco	4
6	DC010663 eje tipo 1-10x30	1
7	DC015887 motor de eje	1
8	DC016244 fijación HPL somier	9
9	P-015467 plataforma para colchón de asas	A-2
10	P-016254 reposapiés	1
11	P-016266 reposa rodillas de tabla	1
12	P-020447 tapa colchón plataforma bisagra	4
13	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	A-4
14	R-002201 remache Alu/St 4.8x14	9
15	ST000797 muelle de fijación diam.8	4
16	ST010662 anillo de bloqueo del eje 14/7x1,3	4
17	T-037309 apoya rodillas laminado sintético y macizo	1
18	T-037310 reposapiés laminado sintético y macizo	1
19	VL010643 arandela sintética 17x8.6x2	4

Descripción:

montaje colchón plataforma laminado macizo - reposa rodillas y reposa pies

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito


Haelvoet

Diseñador:
Lucas V.




Fecha: 23/04/2020

Escala: 1 : 8

de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Dibujo nr: T-039145

Número de
revisión: c

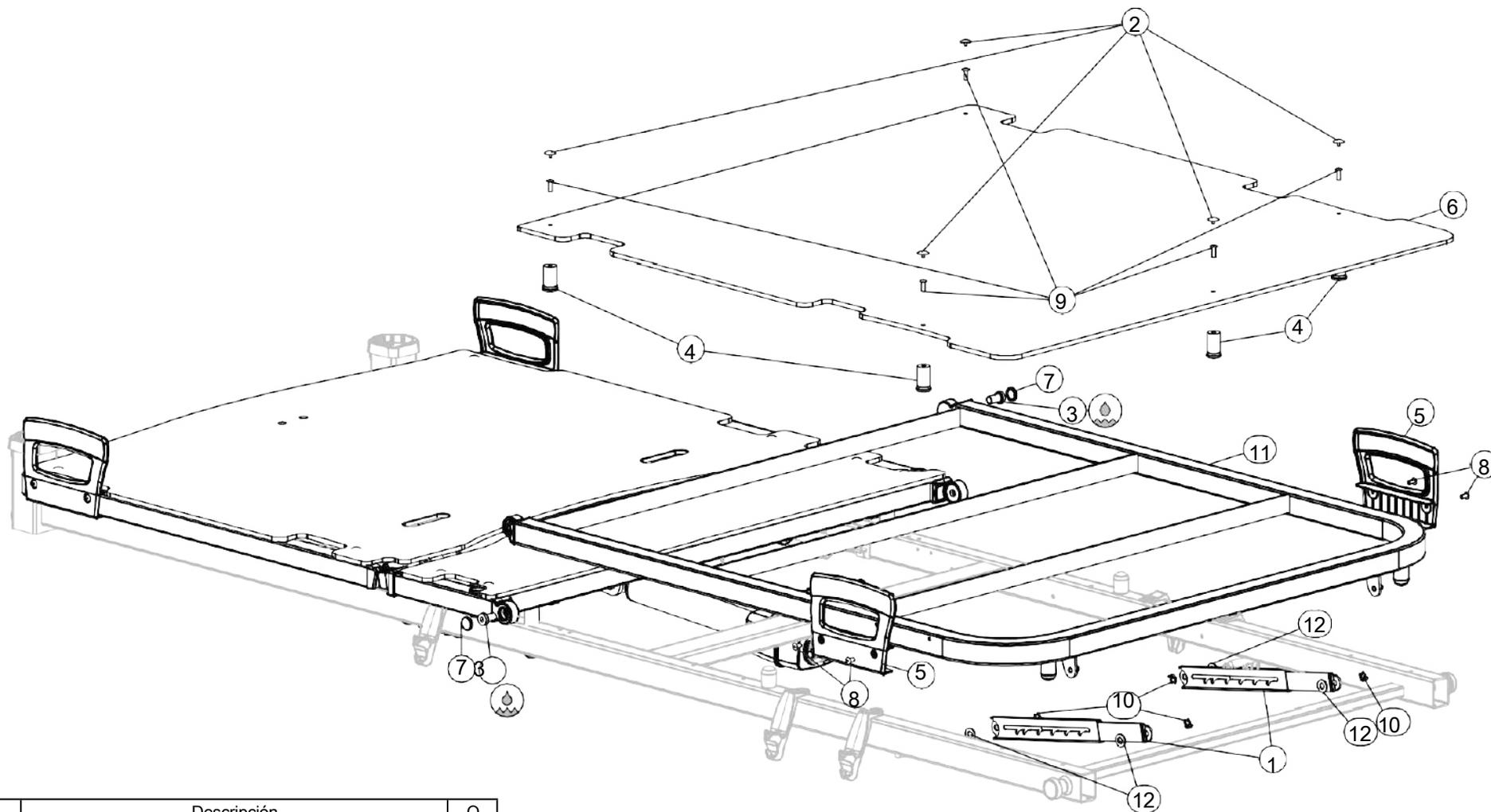

ID	Descripción	Q
1	A-000651 ajuste telescópico 215-355	2
2	AD002198 tapa remache (gris)	5
3	B-003317 perno-M10x18x12-GV negro-LC	2
4	DC016244 fijación HPL somier	5
5	P-015467 plataforma para colchón de asas	2
6	P-016290 reposapiernas de tabla	1
7	P-020447 tapa colchón plataforma bisagra	2
8	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	4
9	R-002201 remache Alu/St 4.8x14	5
10	ST000797 muelle de fijación diam.8	4
11	T-037679 reposapiernas laminado sintético y macizo	1
12	VL010643 arandela sintética 17x8.6x2	4

			
		Descripción: montaje colchón plataforma laminado macizo - reposapiernas	Diseñador: Lucas V.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 23/04/2020 Dibujo nr: T-039152	Escala: 1 : 8 Número de revisión: a

El cable de alimentación estándar tiene un enchufe de tipo E. Compruebe si su país requiere otro tipo de

Cable de red
 Tipo: 2P (Clase II) N°: 05346
 Opción: 2P EPR (Clase II) N°: 16492
 Tipo: 3P EPR (Clase I) N°: 16494

Caja de control
 Tipo: CO61 N°: 15060
 Opción: batería
 Tipo: BA21 N°: 14356
 Cable BA21-185 N°: 14538

Actuador HL
 Tipo: J08908 N°: 12997
 Cable 600 N°: 09200

Caja de conexiones/luz bajo la cama
 Tipo: MJB0005000-1023 N°: 18364
 Tipo: UBL2008 (UBL2) N°: 16423
 Cable 600 N°: 09047

Opción : batería
 Tipo: BA19 N°: 14923
 Cable BA19-1300 N°: 16799

Actuador de apoyo de rodilla
 Tipo: J14855 N°: 15463
 Cable 600 N°: 09200

CO61 de HB
 3-sección: No 15059
 4-sección: No 15488
 Opción: 4 secciones "HD+llave magnética": No 15489

Actuador HL
 Tipo: J08908 N°: 12997
 Cable 750 N°: 08678

Actuador del respaldo
 Tipo: J14854 N°: 15061
 Opción: Liberación rápida
 Tipo: J14408 N°: 15462
 Cable 600 N°: 09200

respaldo
 HL lado
 cabeza
 control
 s batería
 reposa
 rodillas HL
 lado pies

Software:
 SW estándar:
 N°: 16295 / 20600649

Cantidad de MJB
 1 control: no se necesita MJB
 De 2 a 4 mandos: 1 x MJB + 1 x Cable 600 (N°: 09047)

Posibles controles

HB's

Descripción:

Esquema de conexiones Lago Care CO61

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: + 32

Diseñador:



Ionut I.

Fecha: 25/10/2018

T-030695


a

CIERRE TODAS LAS CONEXIONES NO UTILIZADAS CON EL TAPÓN CIEGO CORRESPONDIENTE

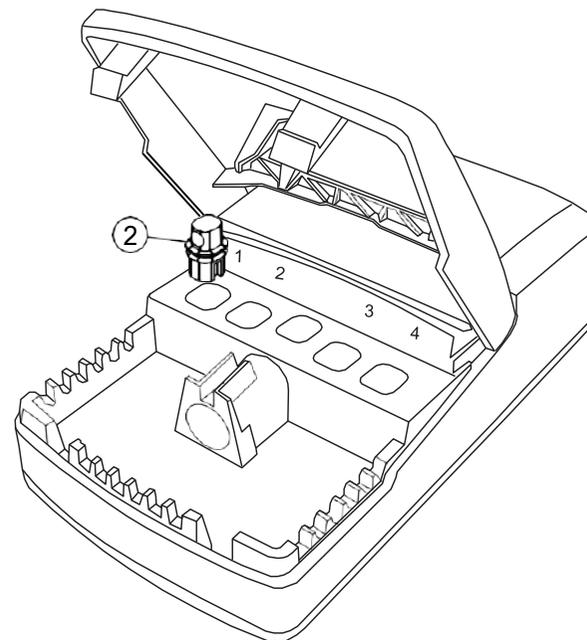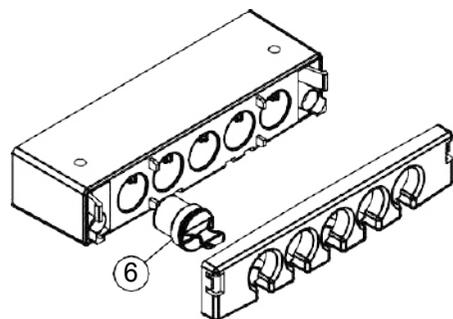

	ID	Descripción	Q
6	MT015941	tapón ciego MJB	1

	ID	Descripción	Q
2	MT028465	tapón ciego CA40/CO61	1

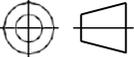		 Haelvoet	
Descripción: visión general tapones ciegos		Diseñador: Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 17/11/2016 Dibujo nr: T-030695	Escala: 1 :4 Número de revisión: a


T-037202

b



Opciones

ID.	Descripción
A	Somier de 4 secciones

montaje del enchufe

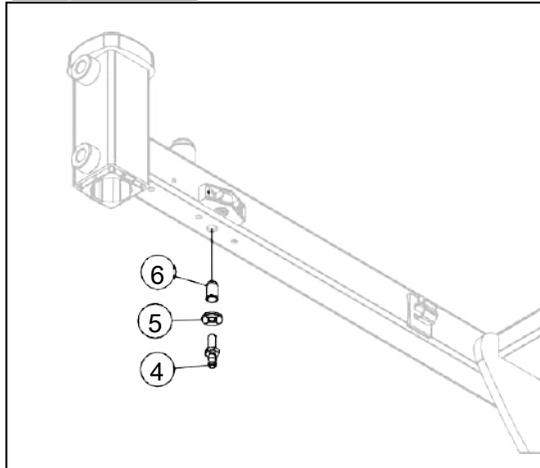

montaje pigtail

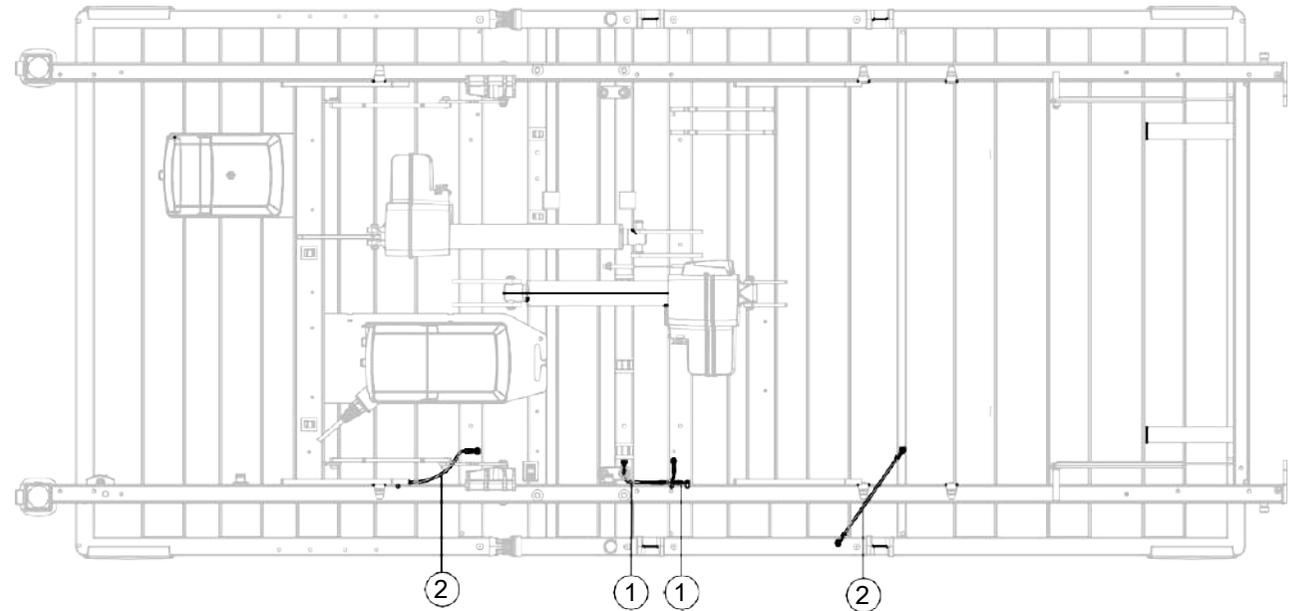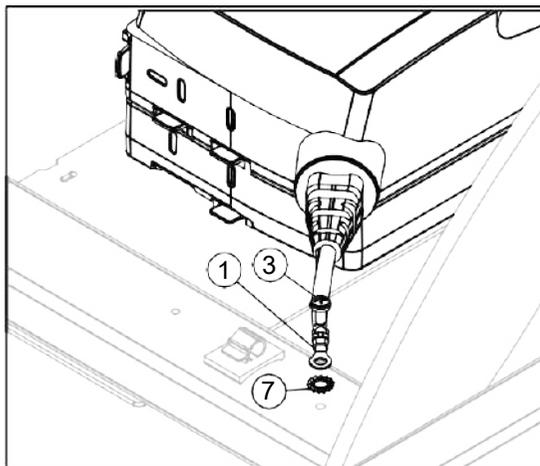

No es posible con ruedas ocultas

ID	Descripción	Q
1	A-001971 conexión equipotencial L150	2
2	A-003884 conexión equipotencial L180	A +1 1
3	S-004413 tornillo Din7500 CE-M4x8	A +2 7
4	ST003904 enchufe Din42801-L30	1
5	ST003905 lavadora conexión equipotencial	1
6	ST013341 inserto avellanado pequeño-M6x14,5-St GV	1
7	VL003951 Arandela Din6798A-M5	A +2 7



	
Descripción: Opción: Lago Care Clase I	Diseñador: Ionut I.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95	Fecha: 10/09/2019 Dibujo nr: T-037202
	Escala: 1 : 12 Número de

T-034608


a

Opciones


ID.	Descripción
A	panel de pie bajo
B	Pollux

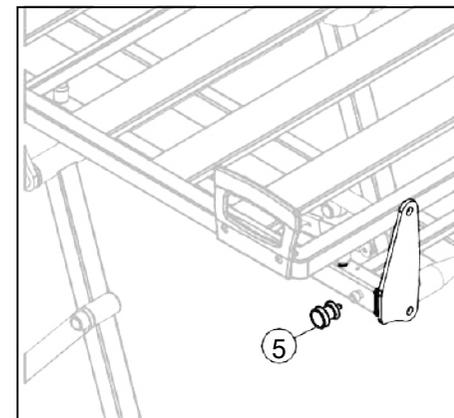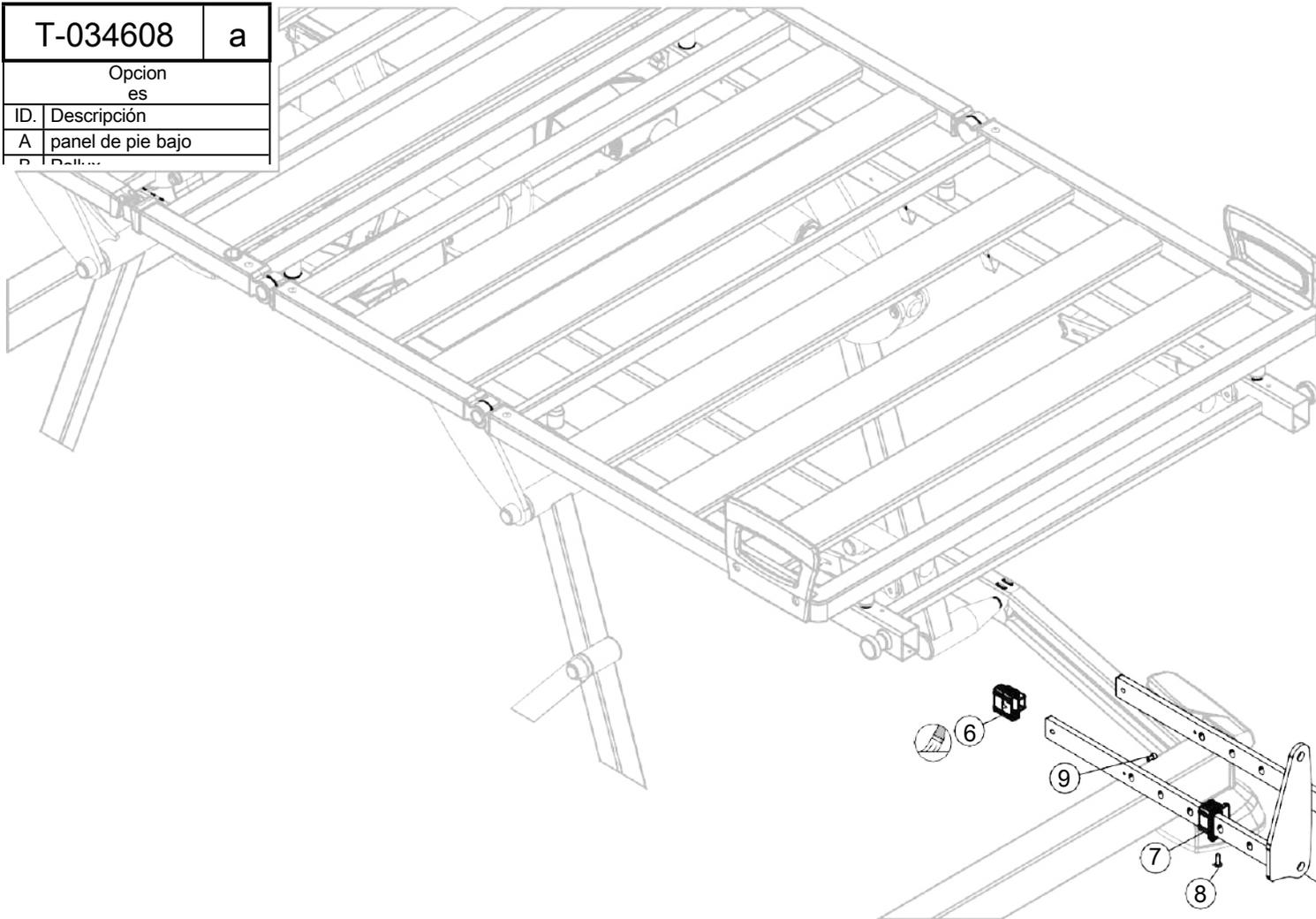

cama de fijación extensión Pollux

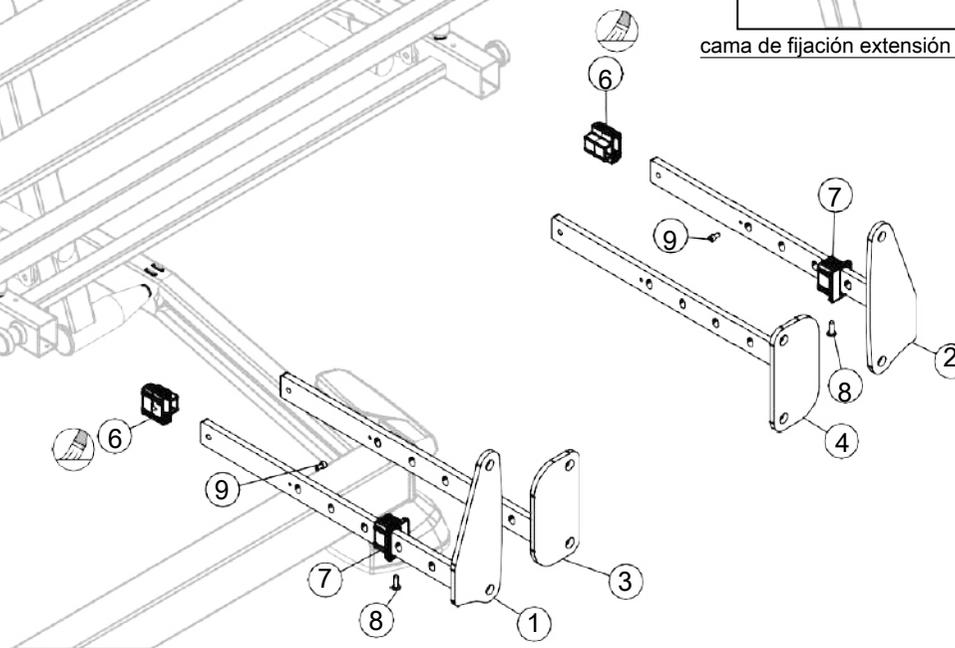

ID	Descripción	Q
1	A-024461 listón de soldadura soporte del panel frontal RA+1	1
2	A-024467 listón de soldadura soporte del panel frontal L A+1	1
3	A-025091 listón de soldadura soporte frontal bajo R A+1	0
4	A-025092 listón de soldadura soporte frontal bajo L A+1	0
5	A-025193 botón de resorte Pollux B+2	0
6	P-030671 extensión de la cama deslizante	2
7	P-031082 extensión de la cama de sombreros	2
8	S-000382 tornillo Din7981C-4.8x16	2
9	S-030324 tornillo Din7500(TT12)-M4x8-GV	2


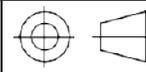
			
Descripción:		Diseñador:	
Prolongación de cama Lago Care		Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 8/10/2018	Escala: 1 : 8
		Dibujo nr: T-034608	Número de

T-014108


d


Opcion
es

ID Descripción

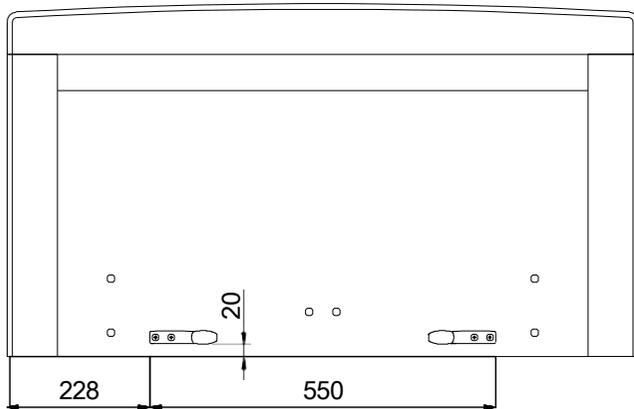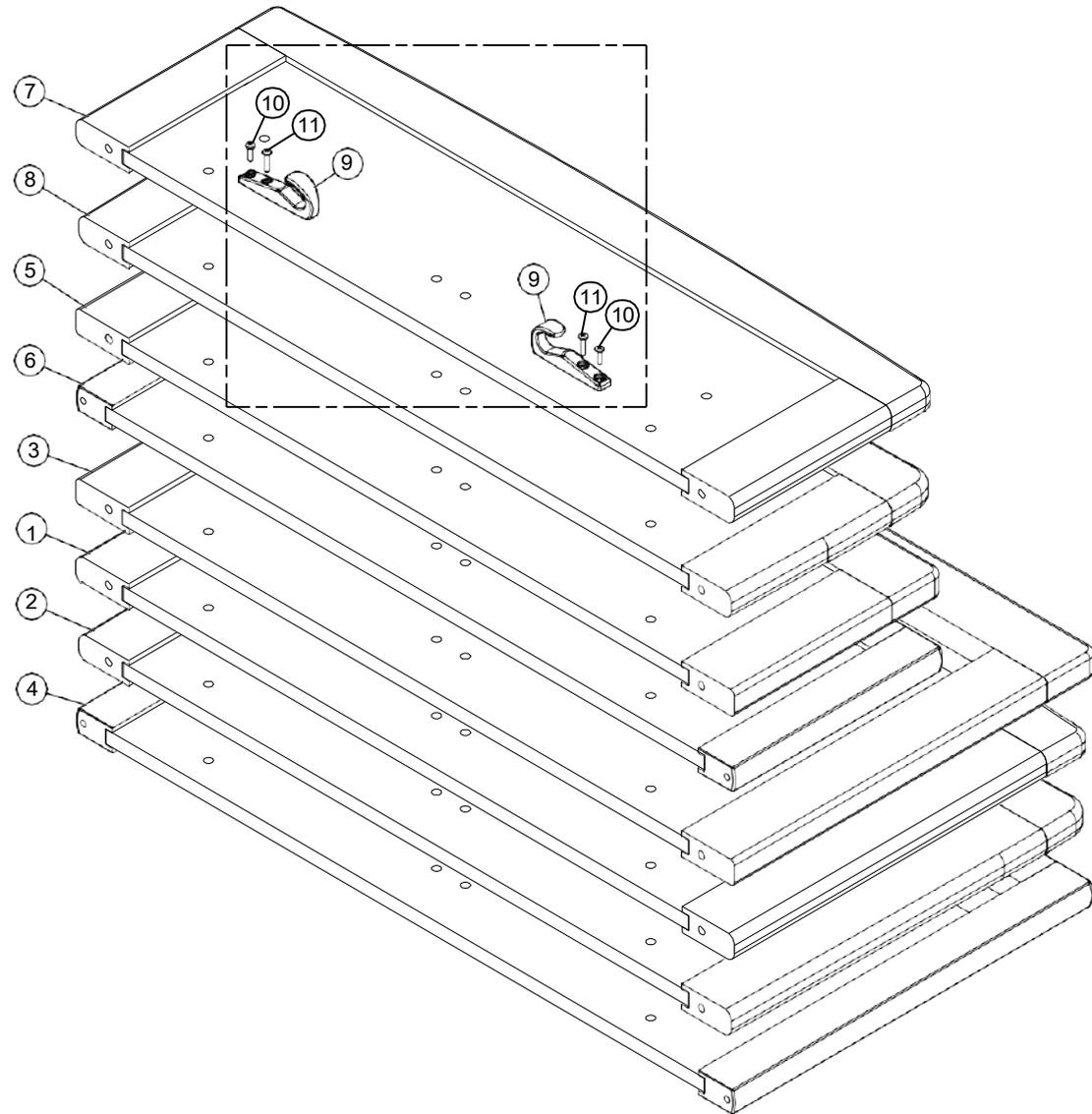

ID	Descripción		Q
1	A-013755	panel frontal Valentino sin railes-lado de la cabeza	1
2	A-013762	panel frontal Felina sin barandillas-lado de la cabeza	1
3	A-014659	panel frontal Puro lado de la cabeza sin railes	1
4	A-022742	panel frontal Eden lado de la cabeza sin railes	1
5	A-025630	panel frontal Puro head side - medium - 86 cm	1
6	A-025781	frontal cabeza lado Eden medio - 86 cm	1
7	A-025786	frontal lado cabeza Valentino mediano - 86 cm	1
8	A-025789	frontal lado cabeza Felina medium - 86 cm	1
9	P-013615	gancho para cable de alimentación	A+2 0
10	S-004449	tornillo Din7505B-5x20-GV blanco	A+2 0
11	S-015083	tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+2 0

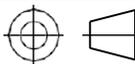Descripción: paneles de cabeza Puro/Valentino/Felina/Eden Atmosphere, Twin y laterales - 86 cm		 Haelvoet	
		Diseñador: David V.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 07/05/2010	Escala: 1 : 12
		Dibujo nr: T-014108	Número de

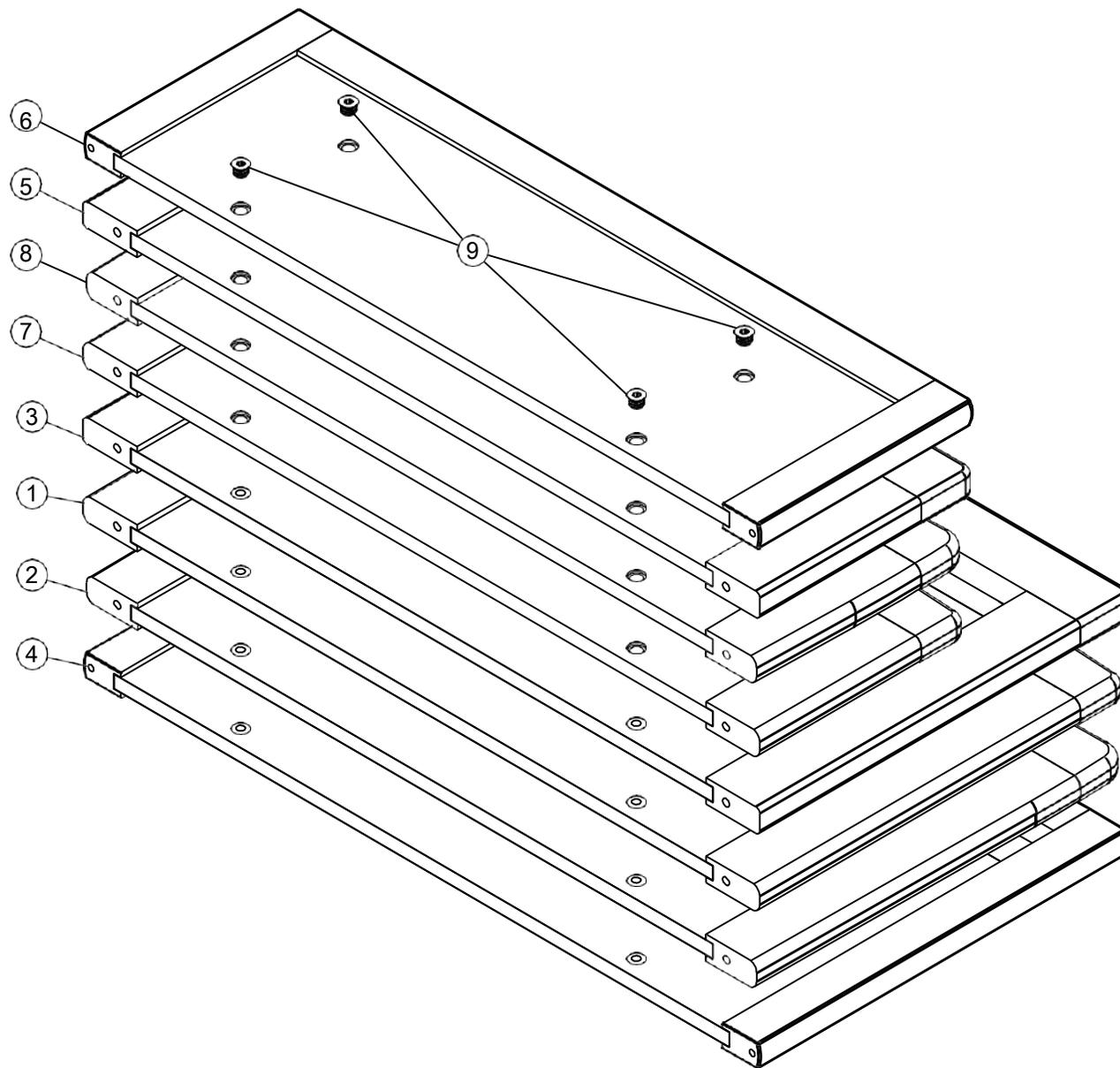

	ID	Descripción	Q
1	A-013753	frontpanel Valentino sin raíles-foot side	1
2	A-013761	panel frontal Felina sin raíles - lado pie	1
3	A-014658	panel frontal Puro lado de los pies sin raíles	1
4	A-023205	panel frontal Eden lado de los pies sin raíles	1
5	A-025631	panel frontal Puro lado pies - medio - 86 cm	1
6	A-025783	panel frontal Eden lado pie medio - 86 cm	1
7	A-025785	frontpanel Valentino pie lado medio - 86 cm	1
8	A-025788	panel frontal Felina pie lateral medio - 86 cm	1
9	DC035669	insertar tuerca paneles frontales	4

		 Haelvoet	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Diseñador: David V.	
		Fecha: 9/11/2018	Escala: 1 : 7
		Dibujo nr: T-034808	Número de


T-020217

f

Opciones

ID.	Descripción
A	Camas eléctricas


Cabe lateral
za

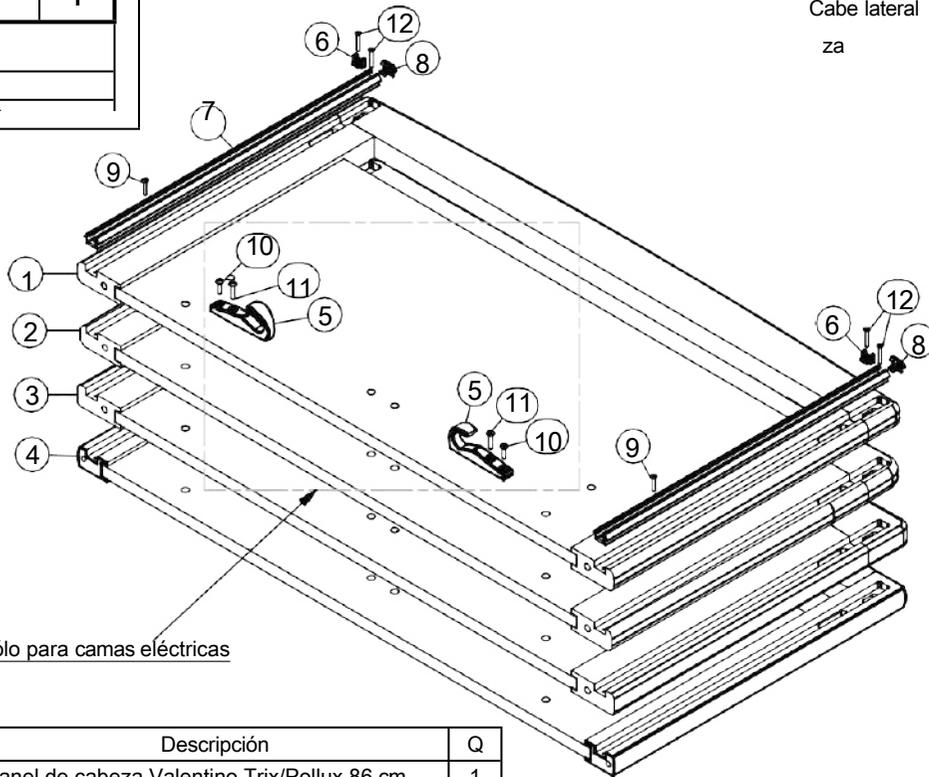


Sólo para camas eléctricas

ID	Descripción	Q
1	A-012515 panel de cabeza Valentino Trix/Pollux 86 cm	1
2	A-012831 panel de cabeza Felina Trix/Pollux 86 cm	1
3	A-014615 panel de cabeza Puro Trix/Pollux 86 cm	1
4	A-023402 panel de cabeza Eden Trix/Pollux 86 cm	1
5	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
6	P-018197 parada Trix III-Pollux III	2
7	P-018487 carril guía Pollux III Valentino-Felina-Puro	2
8	P-018495 tapa carril guía III Valentino-Felina-Puro	2
9	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2
10	S-004449 tornillo Din7505B-5x20-GV blanco	A+2 0
11	S-015083 tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+2 0

Lado de los
pies

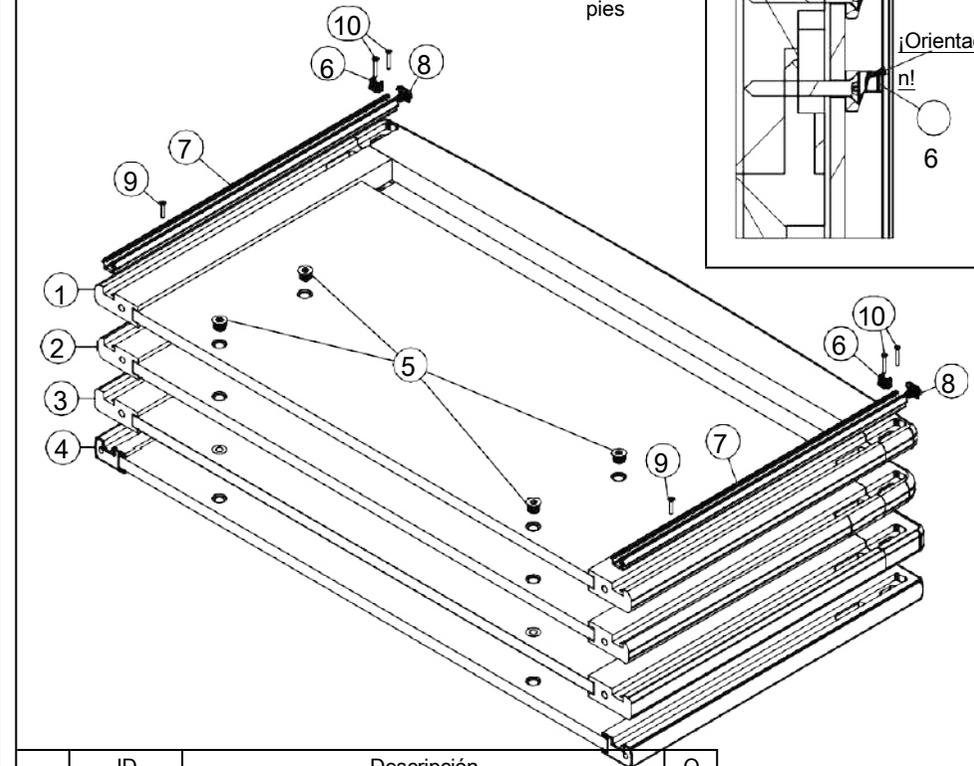

ID	Descripción	Q
1	A-012513 panel de pie Valentino Trix/Pollux 86 cm	1
2	A-012830 panel de pie Felina Trix/Pollux 86 cm	1
3	A-014614 panel de pie Puro Trix/Pollux 86 cm	1
4	A-023403 panel de pie Eden Trix/Pollux 86 cm	1
5	DC035669 insertar tuerca paneles frontales	4
6	P-018197 parada Trix III-Pollux III	2
7	P-018487 carril guía Pollux III Valentino-Felina-Puro	2
8	P-018495 tapa carril guía III Valentino-Felina-Puro	2
9	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2
10	S-038068 tornillo Din7505A-4x30-GV	4

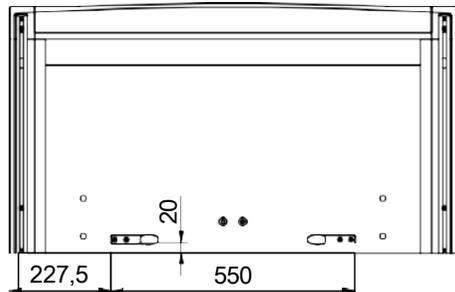


Descripción:

paneles frontales Puro/Valentino/Felina/Eden Pollux - 86 cm

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:
David V.

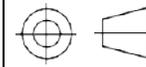

Fecha: 6/07/2012

Escala: 1 : 10

Dibujo nr: T-020217

Número de
revisión: f


T-020224

g

Opciones


ID. Descripción

A Cama eléctrica

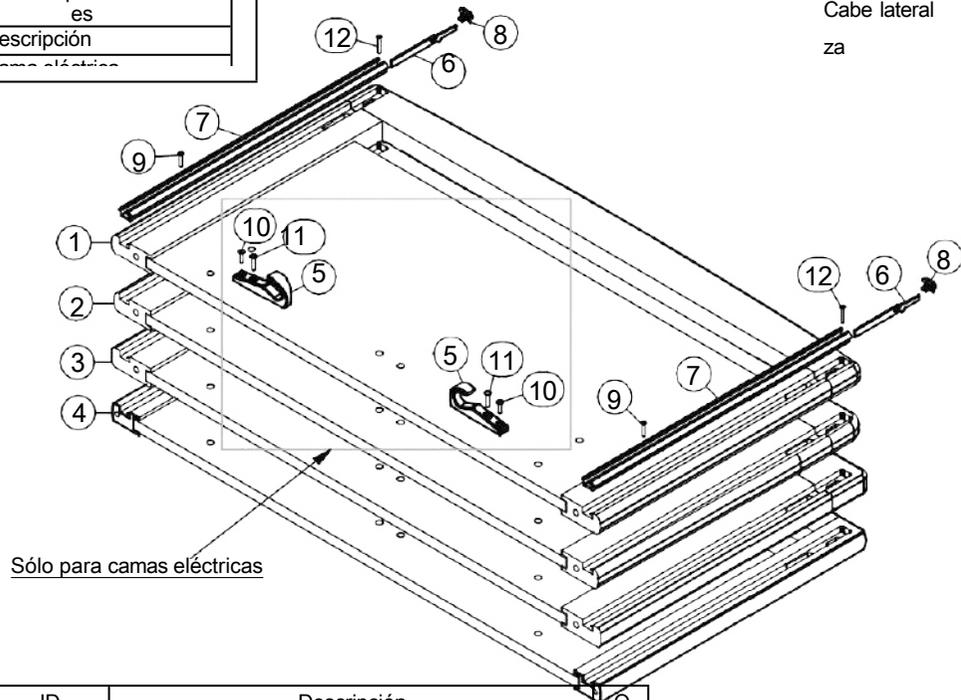
Cabe lateral
za

Sólo para camas eléctricas

ID	Descripción	Q
1	A-012515 panel de cabeza Valentino Trix/Pollux 86 cm	1
2	A-012831 panel de cabeza Felina Trix/Pollux 86 cm	1
3	A-014615 panel de cabeza Puro Trix/Pollux 86 cm	1
4	A-023402 panel de cabeza Eden Trix/Pollux 86 cm	1
5	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
6	P-018144 stop Trix top	2
7	P-018481 carril guía Trix III Valentino-Felina-Puro	2
8	P-018495 tapa carril guía III Valentino-Felina-Puro	2
9	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	4
10	S-004449 tornillo Din7505B-5x20-GV blanco	A+2 0
11	S-015083 tornillo Din7505R-5x25-GV	A+2 0

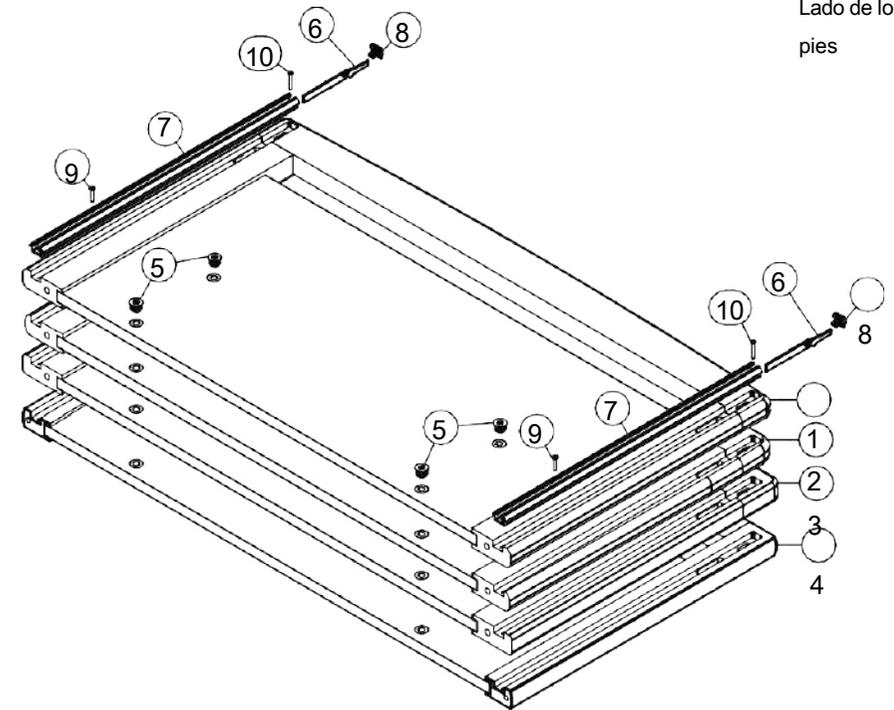Lado de los
pies

ID	Descripción	Q
1	A-012513 panel de pie Valentino Trix/Pollux 86 cm	1
2	A-012830 panel de pie Felina Trix/Pollux 86 cm	1
3	A-014614 panel de pie Puro Trix/Pollux 86 cm	1
4	A-023403 panel de pie Eden Trix/Pollux 86 cm	1
5	DC035669 insertar tuerca paneles frontales	4
6	P-018144 stop Trix top	2
7	P-018481 carril guía Trix III Valentino-Felina-Puro	2
8	P-018495 tapa carril guía III Valentino-Felina-Puro	2
9	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	4
10	S-038068 tornillo Din7505A-4x30-GV	2

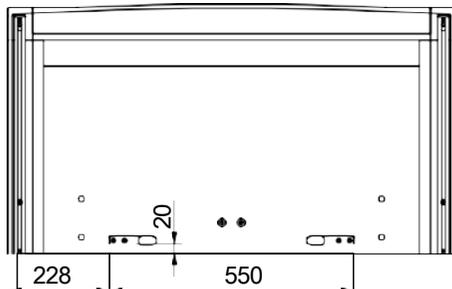


Haelvoet

Descripción:

paneles frontales Puro/Valentino/Felina/Eden Trix - 86 cm

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

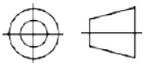Diseñador:
David V.


Fecha: 12/07/2012

Escala: 1 : 11


Dibujo nr: T-020224

Número de
revisión: 9

T-034721		d
Opciones		
ID	Descripción	
A	Ayuda de pie suave	

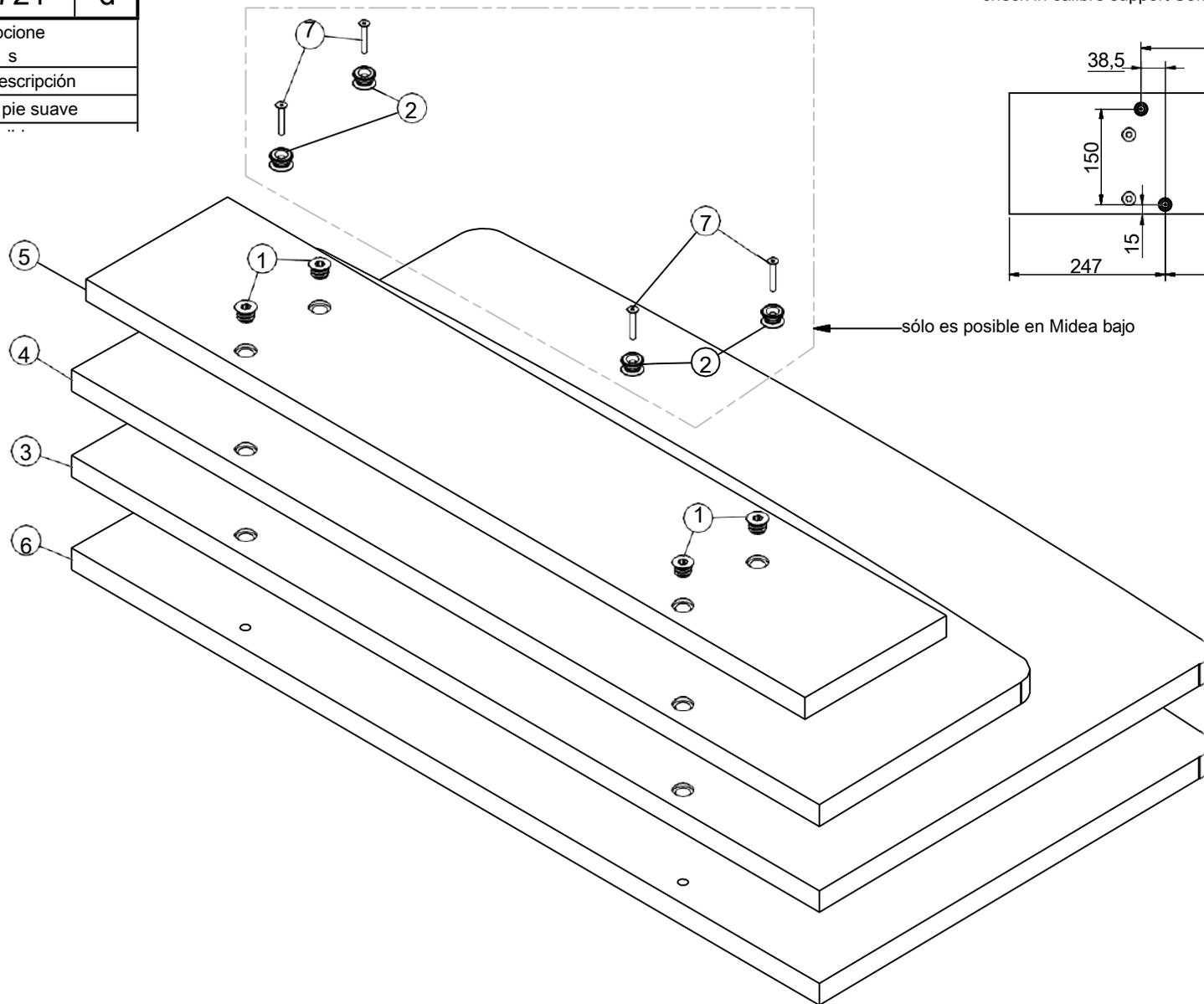

check in calibre support Soft stand-up help position

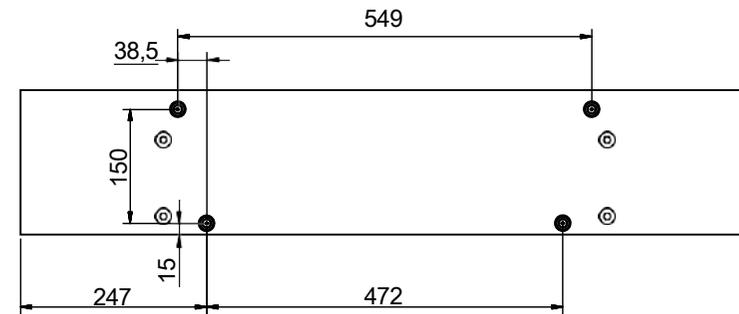



sólo es posible en Midea bajo

ID	Descripción		Q
1	DC035669	insertar tuerca paneles frontales	4
2	P-024627	apoyo Soft stand-up help	A+4 0
3	P-030945	panel de pie Midea alto - 86 cm	B-1 1
4	P-030956	panel de pie Midea medium- 86 cm	1
5	P-030962	panel de pie Midea/Puro/Valentino/Felina/Eden bajo - 86 cm	1
6	P-033048	panel de pie Midea alto con pernos visibles - 86 cm	B+1 0
7	S-000369	tornillo Din7505A-5x35-GV	A+4 0

		Diseñador:	
		Ionut I.	
Descripción: panel de pie Midea Atmosphere, Twin y paneles laterales - 86 cm		Fecha: 24/10/2018	Escala: 1 : 6
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Dibujo nr: T-034721	Número de

T-034722		C
Opciones		
ID	Descripción	
A	Cama eléctrica	

check in calibre support Soft stand-up help position

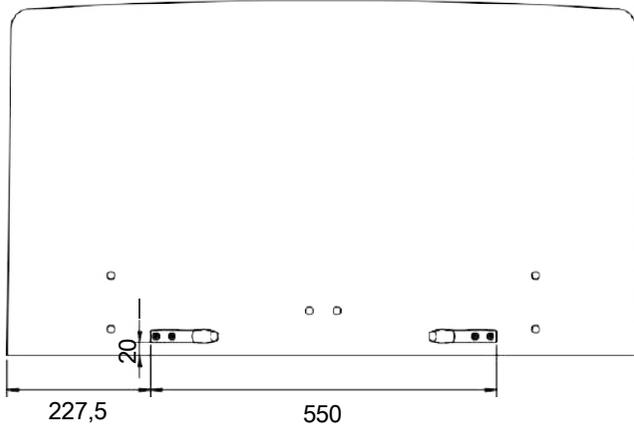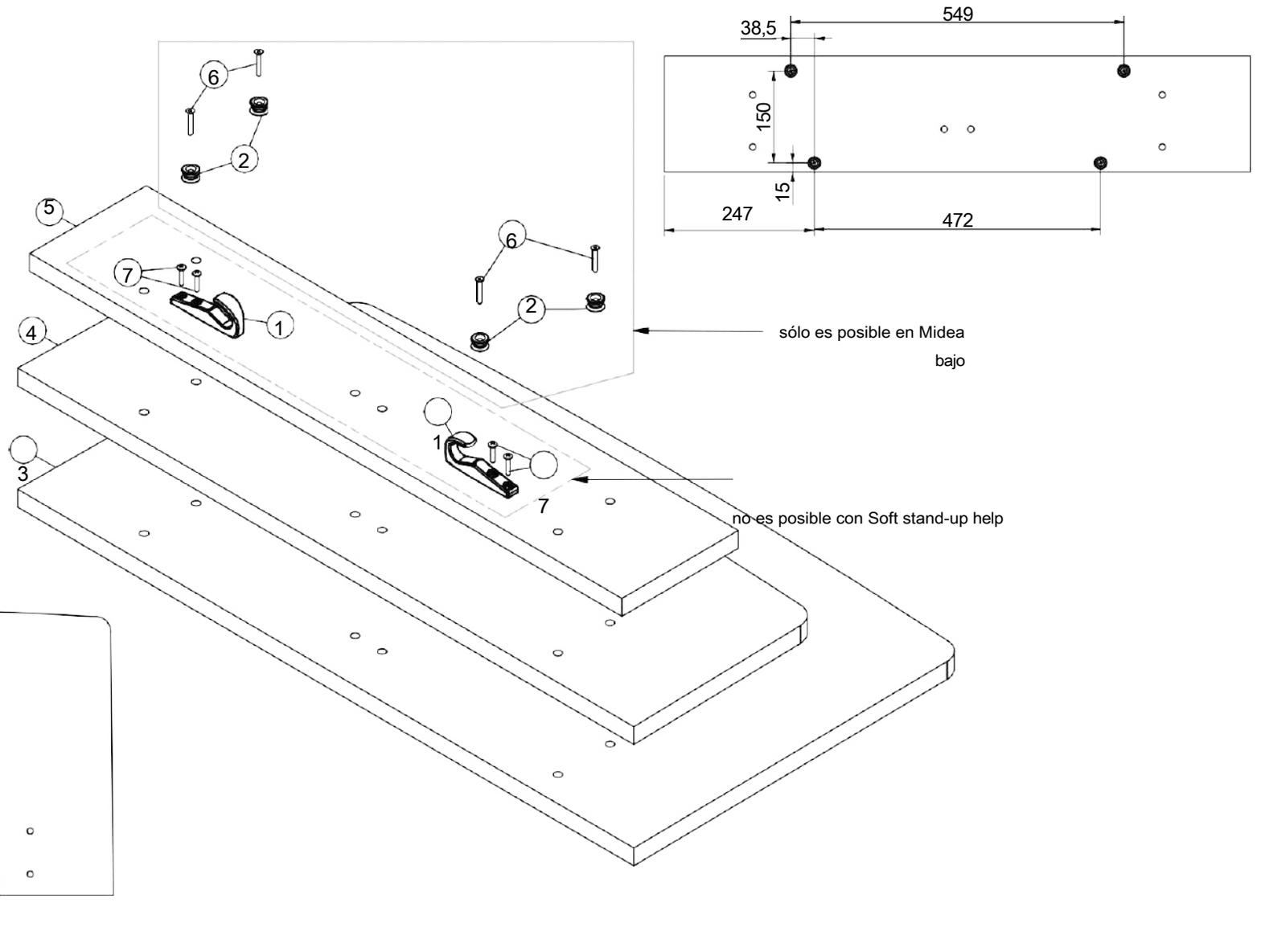

ID	Descripción		Q
1	P-013615	gancho para cable de alimentación	A+2 0
2	P-024627	apoyo Soft stand-up help	B+4 0
3	P-030974	panel de cabeza Midea alto - 86 cm	1
4	P-030978	panel de cabeza Midea medium - 86 cm	1
5	P-030983	panel de cabeza Midea/Puro/Valentino/Felina/Eden bajo - 86 cm	1
6	S-000369	tornillo Din7505A-5x35-GV	B+4 0
7	S-015083	tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+4 0


Descripción:	
paneles de cabeza Midea Atmosphere, Twin & Side paneles - 86 cm	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95	
Diseñador:	Ionut I.
Fecha: 24/10/2018	Escala: 1 : 7
Dibujo nr: T-034722	Número de revisión:

T-026354


d

Opciones


ID.	Descripción
A	Cama eléctrica
B	Panel de pie - pernos visibles

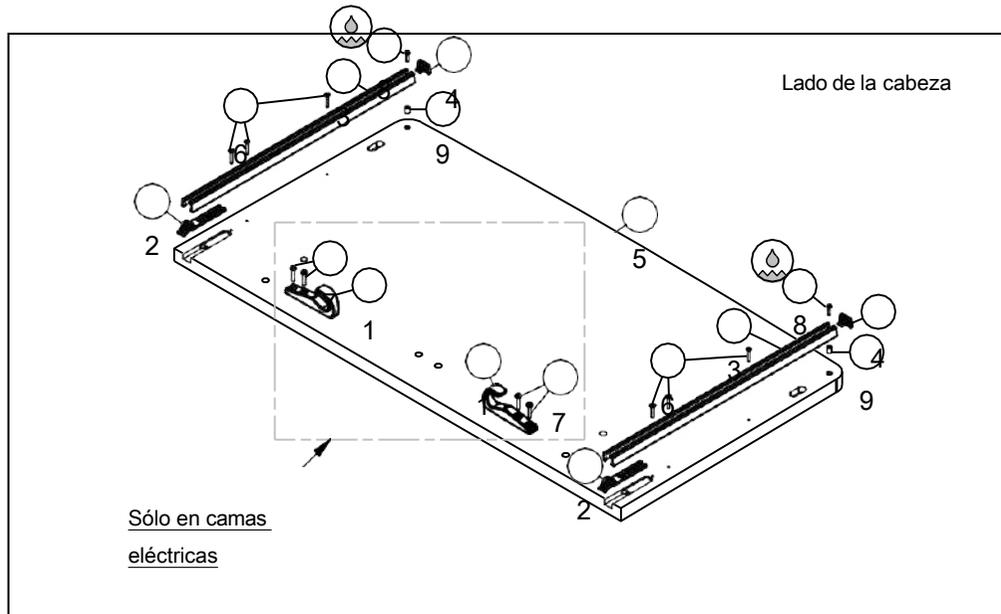

ID	Descripción	Q
1	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
2	P-018205 clip de bloqueo Pollux III	2
3	P-018488 carril guía Pollux III para Calandro/Midea	2
4	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
5	P-024938 panel frontal Midea cabeza lateral - Pollux	1
6	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	6
7	S-015083 tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+4 0
8	S-019306 tornillo Din965-M4x16-4.8 GV blanco	2
9	ST021859 tuerca de inserción M4x10 hexágono interior	2

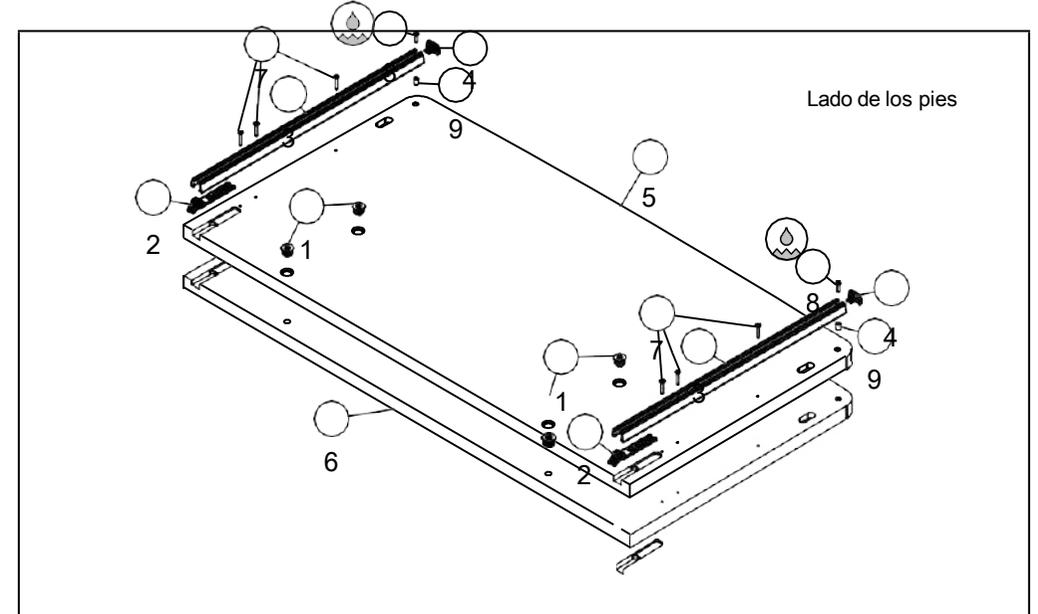

ID	Descripción	Q
1	DC035669 insertar tuerca paneles frontales	B+4 4
2	P-018205 clip de bloqueo Pollux III	2
3	P-018488 carril guía Pollux III para Calandro/Midea	2
4	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
5	P-024931 panel frontal lado pie Midea - Pollux	B-1 1
6	P-033054 panel frontal lado pie Midea con tornillos visibles - Pollux	B+1 0
7	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	6
8	S-019306 tornillo Din965-M4x16-4.8 GV blanco	2
9	ST021859 tuerca de inserción M4x10 hexágono interior	2

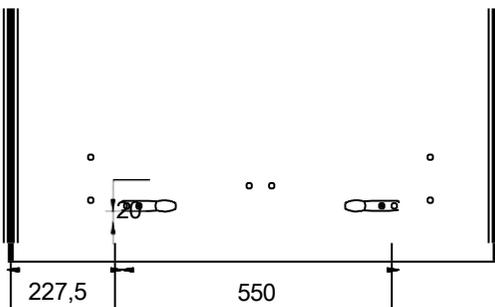

Haelvoet

Descripción:

paneles frontales Midea Pollux - 86 cm

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:

David V.

Fecha: 9/01/2015

Dibujo nr: T-026354

Escala: 1 : 12


Número de

T-026353


c

Opciones


ID.	Descripción
A	Cama eléctrica
B	Panel de pie - pernos visibles

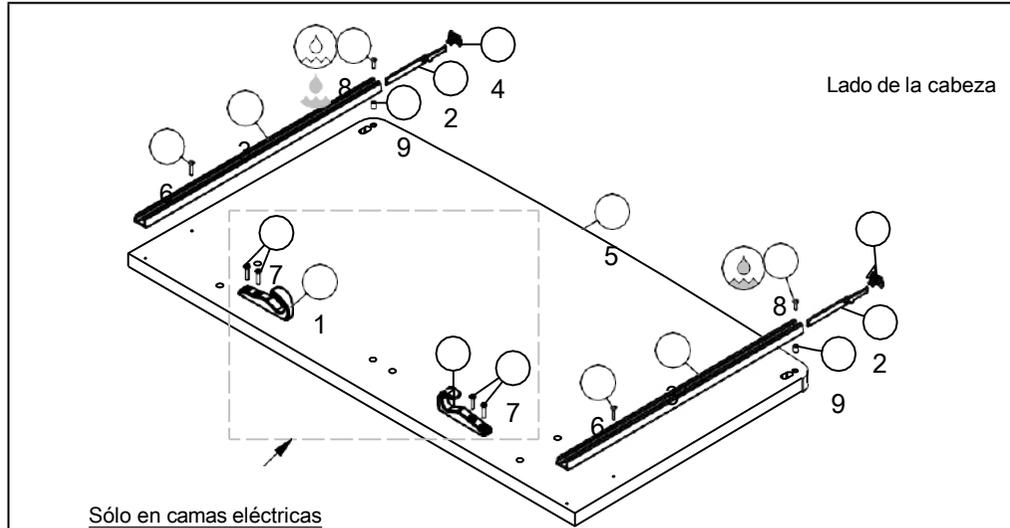

ID	ID	Descripción	Q
1	P-013615	gancho para cable de alimentación	A+2 0
2	P-018144	stop Trix top	2
3	P-018482	carril guía Trix - Midea	2
4	P-018489	tapa carril guía Calandro	2
5	P-024929	frontal lado cabeza Midea Trix - 86 cm	1
6	S-004232	tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2
7	S-015083	tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+4 0
8	S-019306	tornillo Din965-M4x16-4.8 GV blanco	2

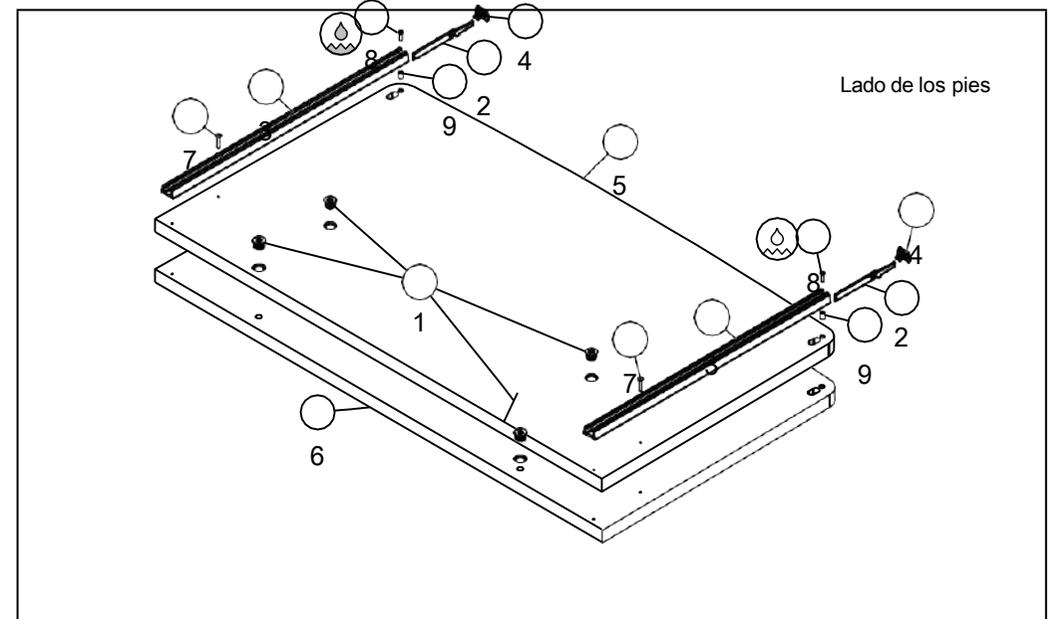

ID	ID	Descripción	Q
1	DC035669	insertar tuerca paneles frontales	B-4 4
2	P-018144	stop Trix top	2
3	P-018482	carril guía Trix - Midea	2
4	P-018489	tapa carril guía Calandro	2
5	P-024925	panel frontal lado pies Midea Trix - 86 cm	B-1 1
6	P-033051	panel frontal lado pie Midea Trix con tornillos visibles - 86 cm	B+1 0
7	S-004232	tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2
8	S-019306	tornillo Din965-M4x16-4.8 GV blanco	2

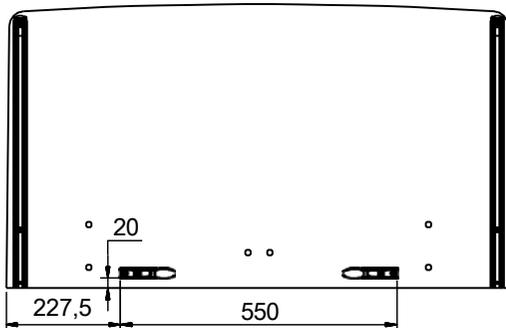

Haelvoet

Descripción:

paneles frontales Midea Trix - 86 cm

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:

David V.

Fecha: 9/01/2015



Dibujo nr: T-026353

Escala: 1 : 12

Número de

T-034667		a
Opciones		
ID	Descripción	

utilizar el calibre para la posición correcta de los apoyos Ayuda al levantamiento suave

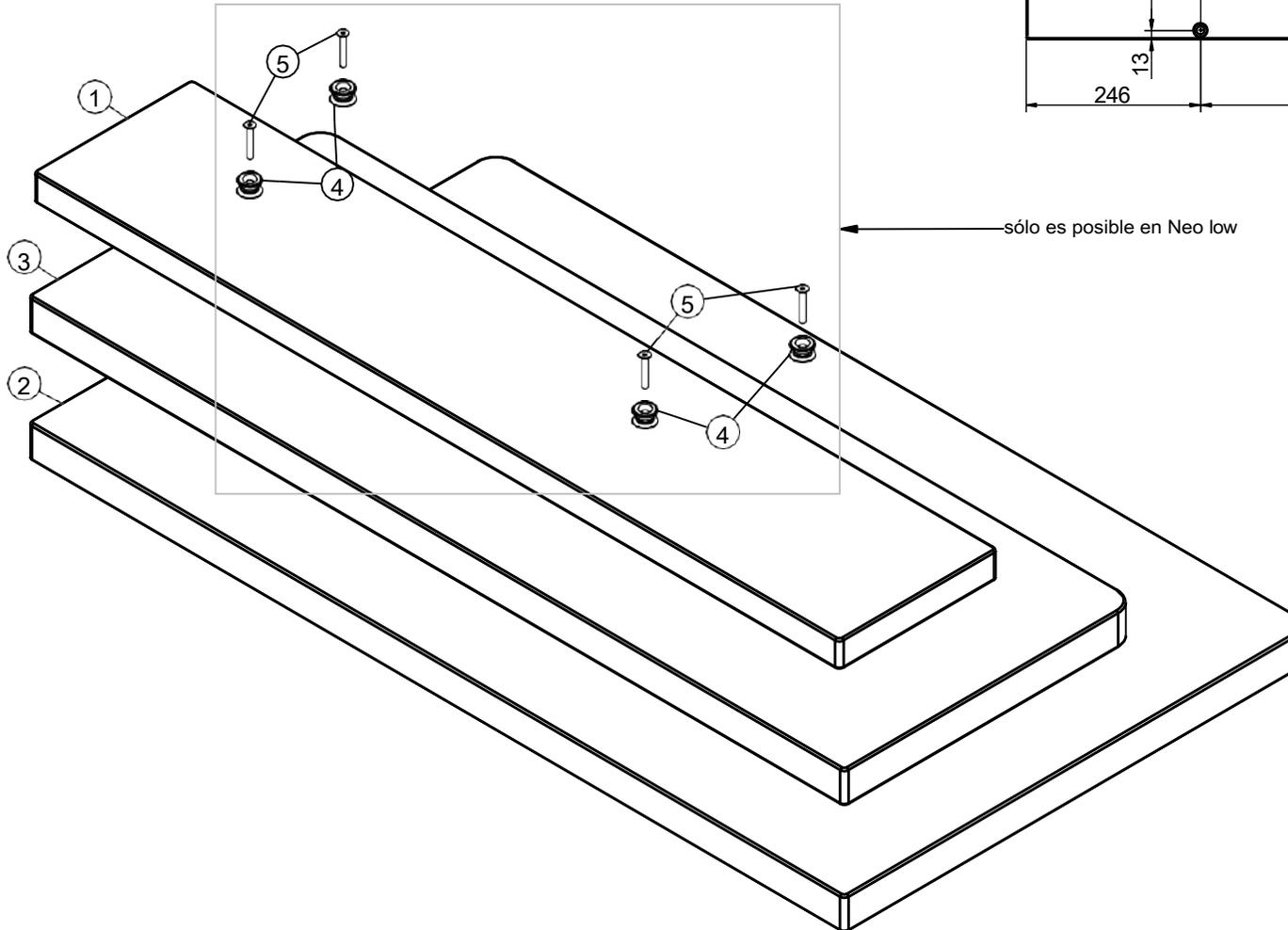
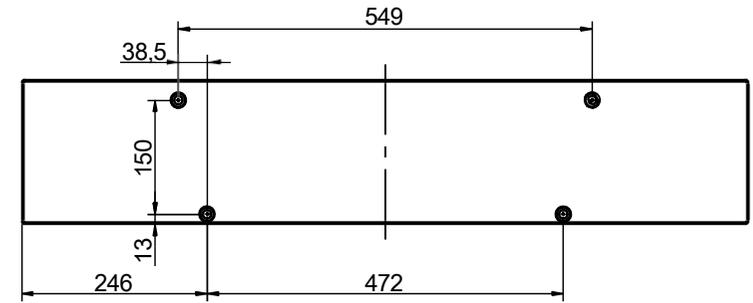


ID	Descripción		Q
1	A-024620	panel de pie Neo bajo - 86 cm	1
2	A-024623	pie panel Neo alto - 86 cm	1
3	A-024627	panel de pie Neo medium - 86 cm	1
4	P-024627	soporte Soft stand-up help	A+4 0
5	S-000369	tornillo Din7505A-5x35-GV	A+4 0


		Diseñador: Ionut I.	Fecha: 17/10/2018
Descripción: panel de pie Neo Atmosphere, Twin y paneles laterales - 86 cm		Dibujo nr: T-034667	Número de
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95			

T-034673		a
Opciones		
ID	Descripción	
A	Cama eléctrica	

utilice calibre para la correcta posición de los soportes Soft stand-up help

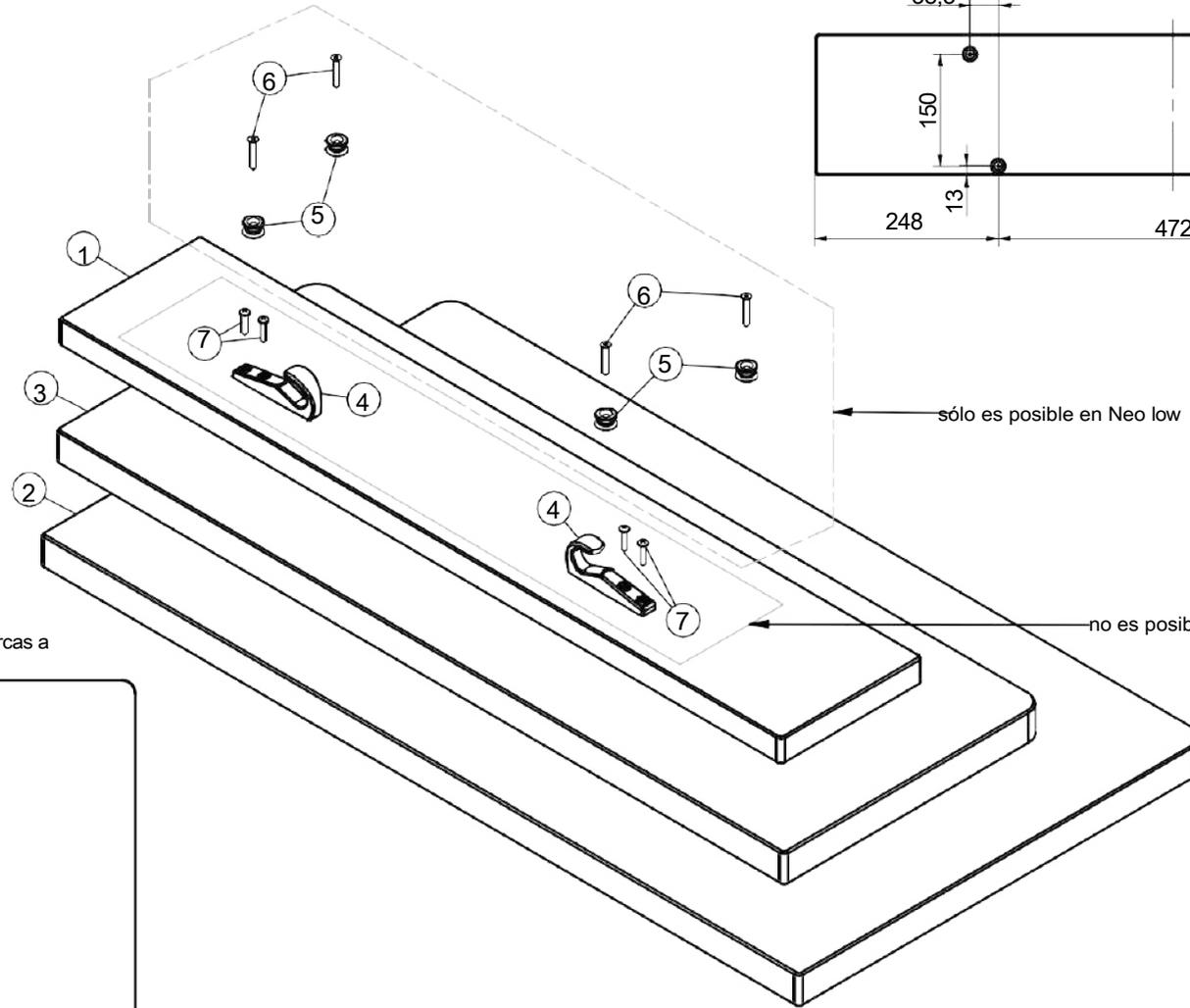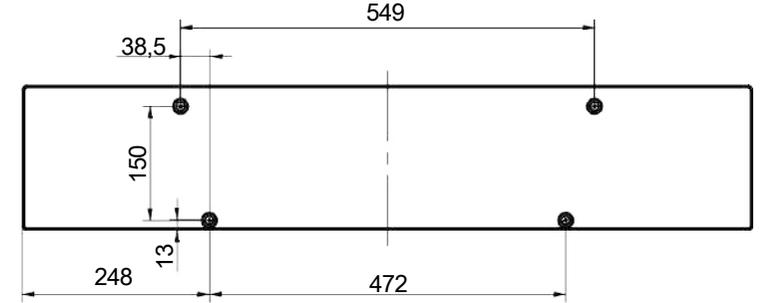

soportes y ganchos en los lados opuestos de las tuercas a presión

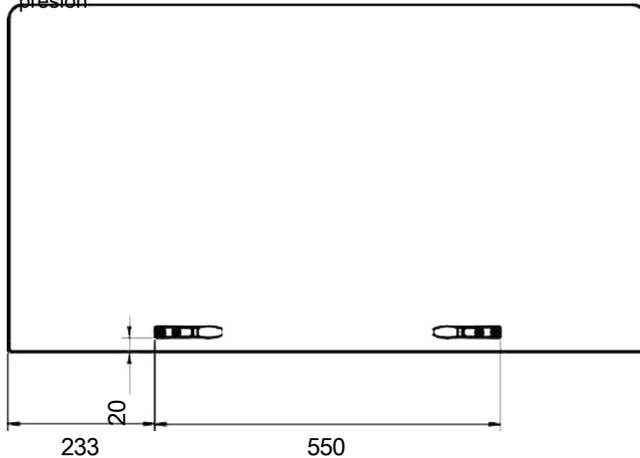

ID	Descripción		Q
1	A-024631	panel de cabeza Neo bajo - 86 cm	1
2	A-024636	panel del cabezal Neo alto - 86 cm	1
3	A-024640	panel de cabeza Neo medium - 86 cm	1
4	P-013615	gancho para cable de alimentación	A+2 0
5	P-024627	soporte Soft stand-up help	B+4 0
6	S-000369	tornillo Din7505A-5x35-GV	B+4 0
7	S-015083	tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+4 0

		Diseñador:	
		Ionut I.	
Descripción:		Fecha: 18/10/2018	
Paneles de cabeza Neo Atmosphere, Twin & Paneles laterales - 86 cm		Escala: 1 :7	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Dibujo nr: T-034673	
		Número de	

T-034646


a

Opcione

ID. Descripción

A Cama eléctrica


Cabeza

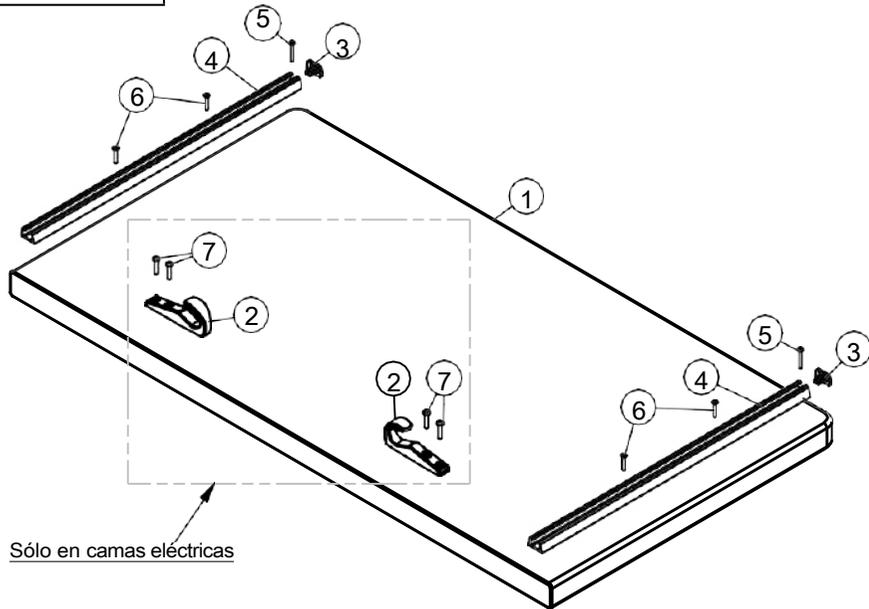


Sólo en camas eléctricas

ID	Descripción	Q
1	A-025205 cabecera Neo Pollux - 86 cm	1
2	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
3	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
4	P-032156 carril guía Pollux III para Neo	2
5	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
6	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	4
7	S-015083 tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+4 0

Lado de los pies

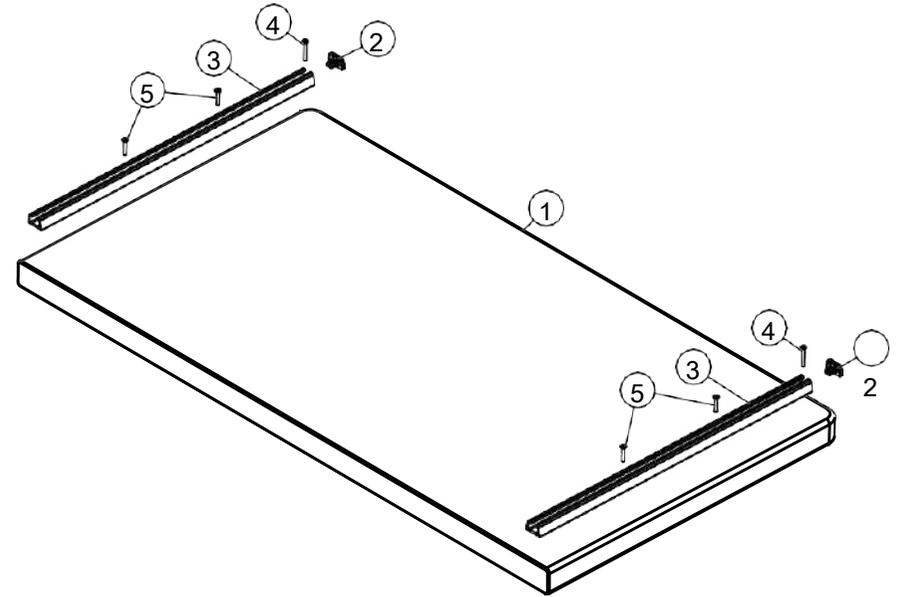

ID	Descripción	Q
1	A-025204 reposapiés Neo Pollux - 86 cm	1
2	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
3	P-032156 carril guía Pollux III para Neo	2
4	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
5	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	4

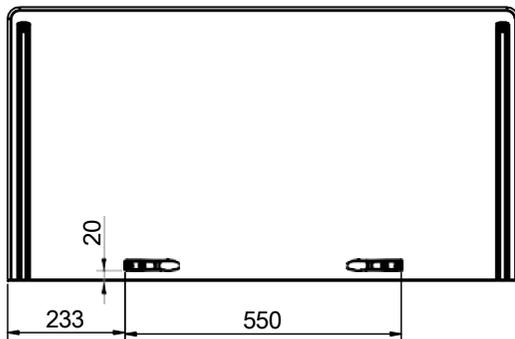

Haelvoet

Descripción:

frontales Neo Pollux - 86 cm


Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:

David V.

Fecha: 16/10/2018

Dibujo nr: T-034646

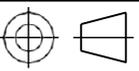

Escala: 1 : 10

Número de
revisión: a


T-034693

a

Opciones

ID.	Descripción
A	Camas eléctricas


Cabe lateral
za al

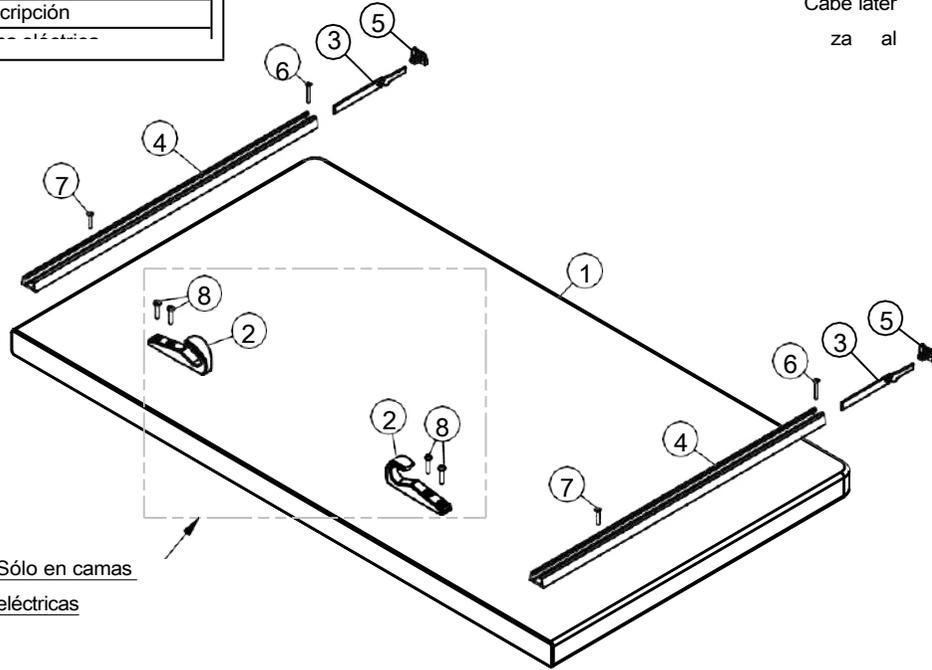


Sólo en camas
eléctricas

ID	Descripción	Q
1	A-025220 cabecera Neo Trix - 86 cm	1
2	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
3	P-018144 stop Trix top	2
4	P-018482 carril guía Trix - Midea	2
5	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
6	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
7	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2

Lado de los
pies

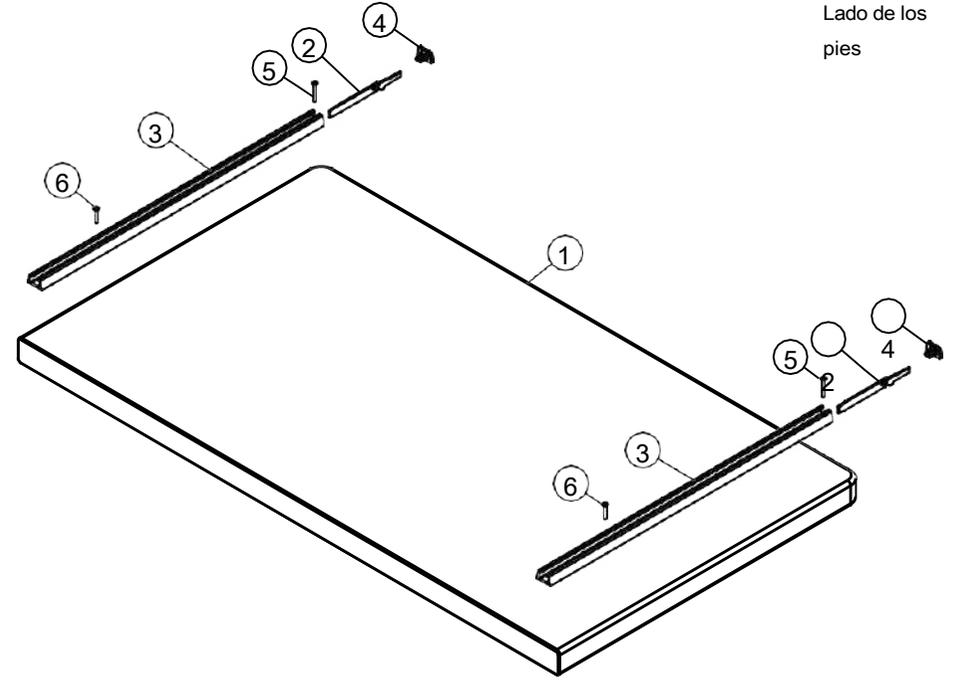

ID	Descripción	Q
1	A-025217 reposapiés Neo Trix - 86 cm	1
2	P-018144 stop Trix top	2
3	P-018482 carril guía Trix - Midea	2
4	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
5	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
6	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2

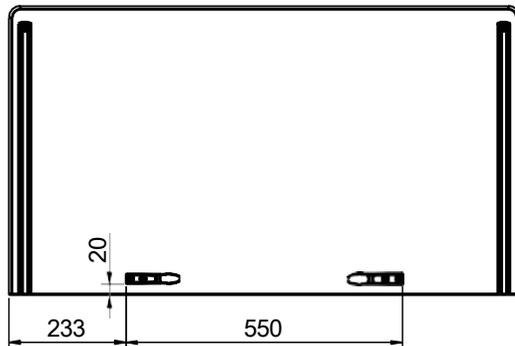

Descripción:

paneles frontales Neo Trix - 86 cm


Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:

David V.




Fecha: 22/10/2018

Dibujo nr: T-034693

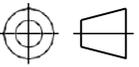


Escala: 1 : 10



Número de
revisión: a

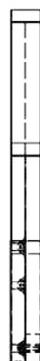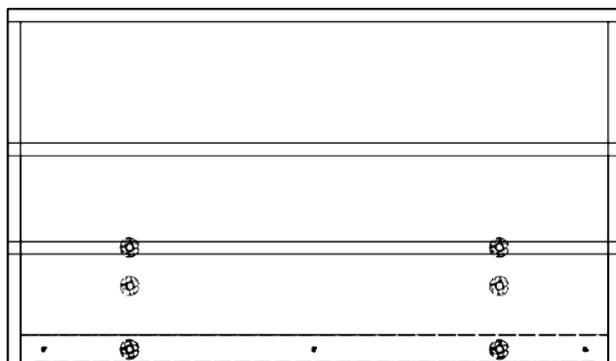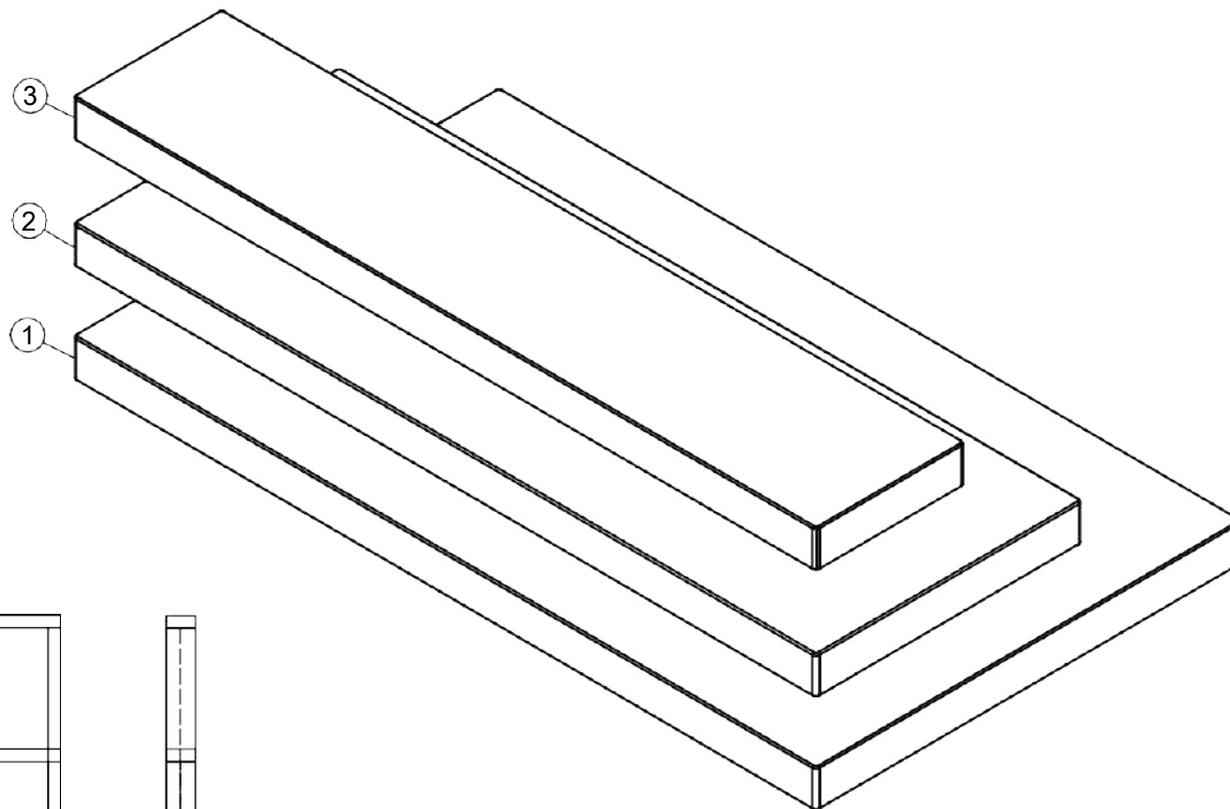


	ID	Descripción	Q
1	A-025343	panel de pie alto Lusso - 86 cm	1
2	A-025399	panel de pie medio Lusso - 86 cm	1
3	A-029058	panel de pie bajo Lusso - 86 cm	1

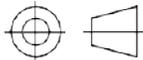		 Haelvoet	
Descripción: panel de pie Lusso Atmosphere, Twin y paneles laterales - 86 cm		Diseñador: Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del autor.		Fecha: 17/10/2018 Dibujo nr: T-035189	Escala: 1 : 7 Número de

T-035190		b
Opciones		
ID	Descripción	
A	Cama eléctrica	

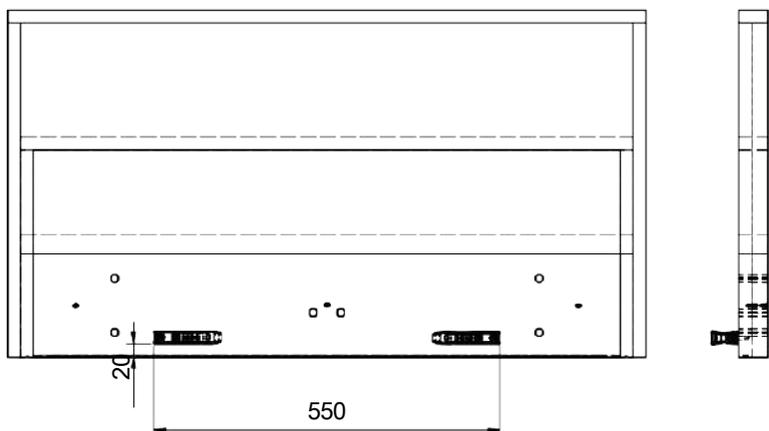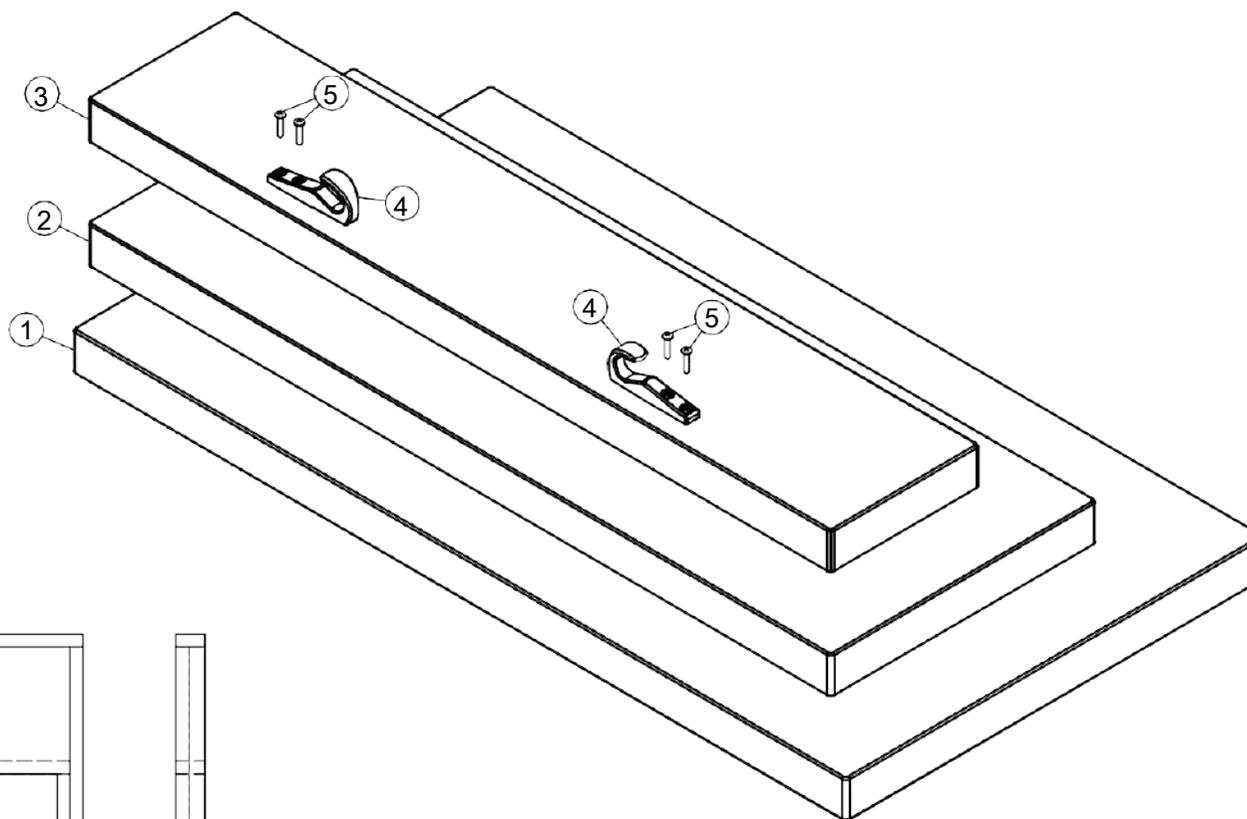

ID	Descripción		Q
1	A-025337	Cabezal alto Lusso - 86 cm	1
2	A-025397	panel de cabeza mediano Lusso - 86 cm	1
3	A-029053	Panel bajo Lusso - 86 cm	1
4	P-013615	gancho para cable de alimentación	A+2 0
5	S-015083	tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+4 0

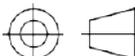			
		Diseñador: Ionut I.	
Descripción: Paneles de cabeza Lusso Atmosphere, Twin & Paneles laterales - 86 cm			
		Fecha: 18/10/2018 Escala: 1 :7	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Dibujo nr: T-035190 Número de	


T-035236

a

Opcion

ID.	Descripción
A	Cama eléctrica


Lado de la cabeza

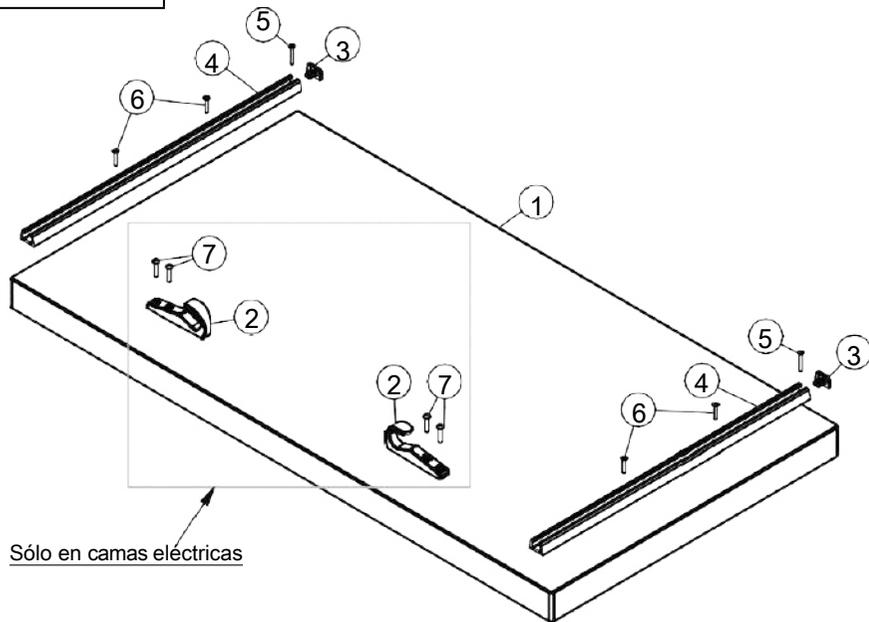


Sólo en camas eléctricas

ID	Descripción	Q
1	A-025412 cabezal Lusso Pollux - 86 cm	1
2	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
3	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
4	P-032156 carril guía Pollux III para Neo	2
5	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
6	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	4

Lado de los pies

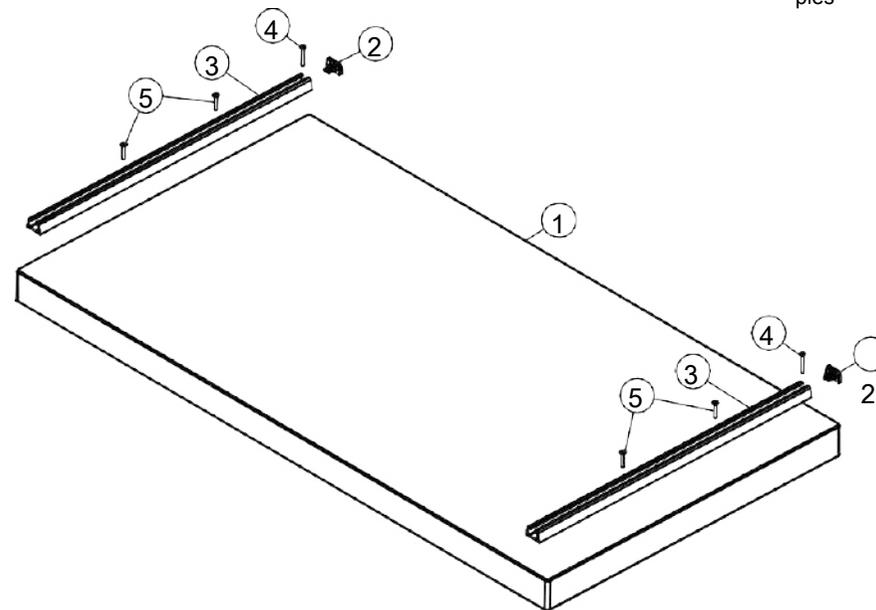

ID	Descripción	Q
1	A-025411 reposapiés Lusso Pollux - 86 cm	1
2	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
3	P-032156 carril guía Pollux III para Neo	2
4	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
5	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	4

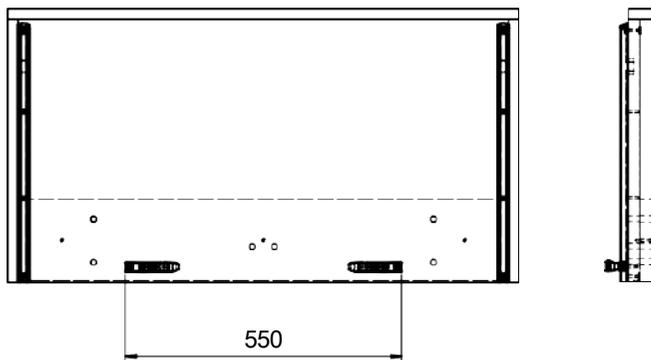


Descripción:

paneles frontales Lusso Pollux - 86 cm

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:
Ionut I.

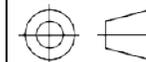

Fecha: 9/01/2019

Escala: 1 : 10

Dibujo nr: T-035236

Número de


T-035253

b

Opciones


ID.	Descripción
A	Cama eléctrica

Lado de la cabeza

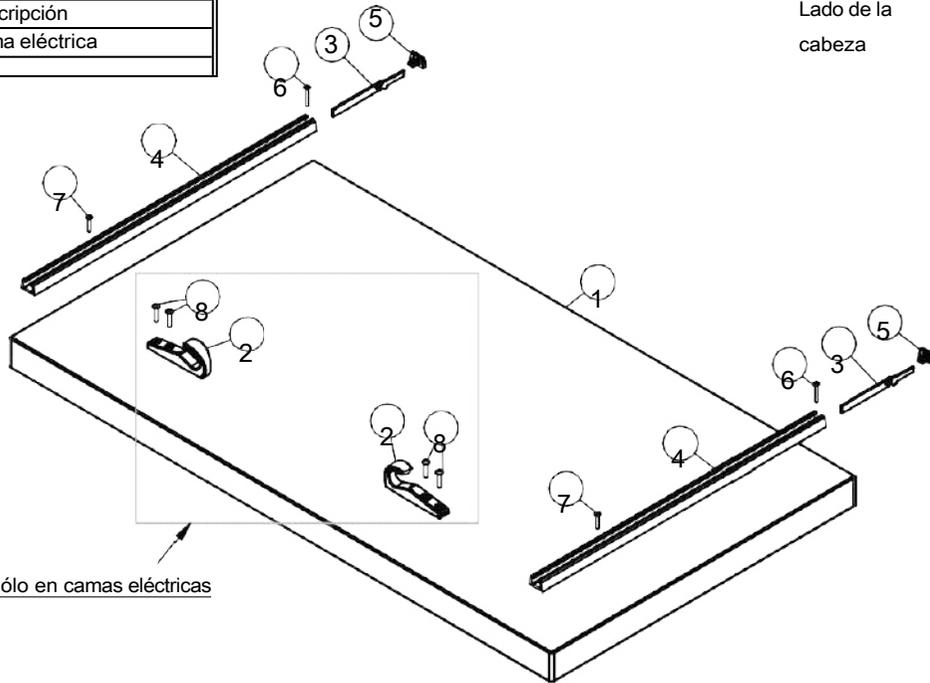


Sólo en camas eléctricas

Lado de los pies

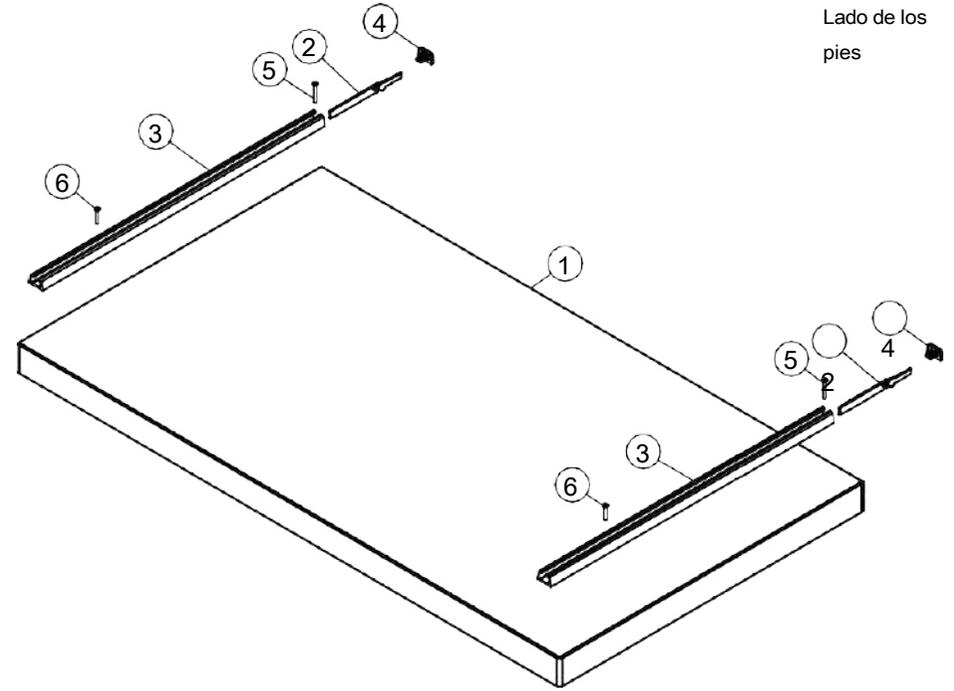

ID	Descripción	Q
1	A-025419 cabecera Lusso Trix - 86 cm	1
2	P-013615 gancho para cable de alimentación	A+2 0
3	P-018144 stop Trix top	2
4	P-018482 carril guía Trix - Midea	2
5	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
6	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
7	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2

ID	Descripción	Q
1	A-025418 reposapiés Lusso Trix - 86 cm	1
2	P-018144 stop Trix top	2
3	P-018482 carril guía Trix - Midea	2
4	P-018489 tapa carril guía Calandro	2
5	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	2
6	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	2

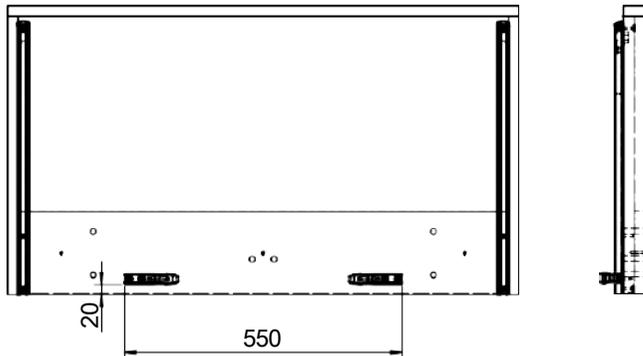


		Descripción: paneles frontales Lusso Trix - 86 cm	Diseñador: David V.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95			

T-033439		g
Configuración - panel lateral		
ID	Descripción	
A	Madera*	
B	Tejido*	
C	Aluminio	


Configuración - listón superior	
ID	Descripción
D	Madera*
* no para camas de hospital	

Opciones	
ID	Descripción
F	Desmontable
G	Cubierta lateral

ID	Descripción	Q
1	A-024355 lateral tapizado Protección lateral doble 96	B+1 0
2	B-005873 perno Iso7380-M6x16x16-10.9 GV blanco-LC	F+8 0
3	B-006478 perno Iso7380-M6x8x8-10.9 GV blanco - LC	F -8 8
4	B-011661 perno Din7991-M4x10x10-8.8-GV blanco	C+6 0
5	DC025247 pasador con agujero Protecciones laterales gemelas	2
6	DC025843 pasador Protecciones laterales gemelas	2
7	DC026358 pin sección 4 Protecciones laterales gemelas	2
8	DC030788 control del eje Protección lateral Twin 96	2
9	P-024799 soporte del mando del eje Protecciones laterales gemelas	2
10	P-025041 tapa L4-T Protecciones laterales dobles	D+1 0
11	P-025088 tapa de protección R4-T Protecciones laterales dobles	D+1 0
12	P-025232 muelle 0,7x7x45,5	1
13	P-025452 cubierta listón superior R Protecciones laterales gemelas	E+1 0
14	P-025477 cubierta listón superior L Protecciones laterales gemelas	E+1 0
15	P-025531 pasador de seguridad R Protecciones laterales dobles	1
16	P-025532 pasador de seguridad L Protecciones laterales dobles	1
17	P-025533 activador R Protecciones laterales dobles	1
18	P-025534 activador L Protecciones laterales dobles	1
19	P-025834 mando manual Protecciones laterales gemelas	2
20	P-027378 excenter for dowels Protecciones laterales gemelas	2
21	P-027422 gancho para accesorios Protecciones laterales gemelas	C+2 0
22	P-030546 guía Twin desmontable	F+2 0
23	P-030560 capuchón Twin desmontable	F+2 0
24	P-030639 perfil Twin desmontable	F+2 0
25	P-030655 perfil transversal protección lateral Twin 96	1
26	P-030657 perfil del panel lateral Protección lateral doble 96	C+1 0
27	P-030658 panel de madera Protección lateral doble 96	A+1 0
28	P-030659 Cinta HPL Protección lateral doble 96	C+1 0
29	P-030768 listón superior de madera Protección lateral doble 96	D+1 0
30	P-033385 imán 30x7x2,5	G+2 0
31	P-035318 alu top lath Twin 96 201910	E+1 0
32	P-035385 alu top lath Twin 96 + tapa 201910	G+1 0
33	S-000146 tornillo Din7505B-4.5x30-GV blanco	D+2 0
34	S-003144 tornillo Din7505A-4x16-GV	A+6,B+6 0
35	S-011430 tornillo Din7982-2.9x13-GV	4
36	S-025249 tornillo prisionero Din914-M5x6 - LC	2
37	ST000464 muelle de fijación diam.5	2
38	T-033430 columna R Protección lateral doble 96	1
39	T-033431 columna L Protección lateral doble 96	1


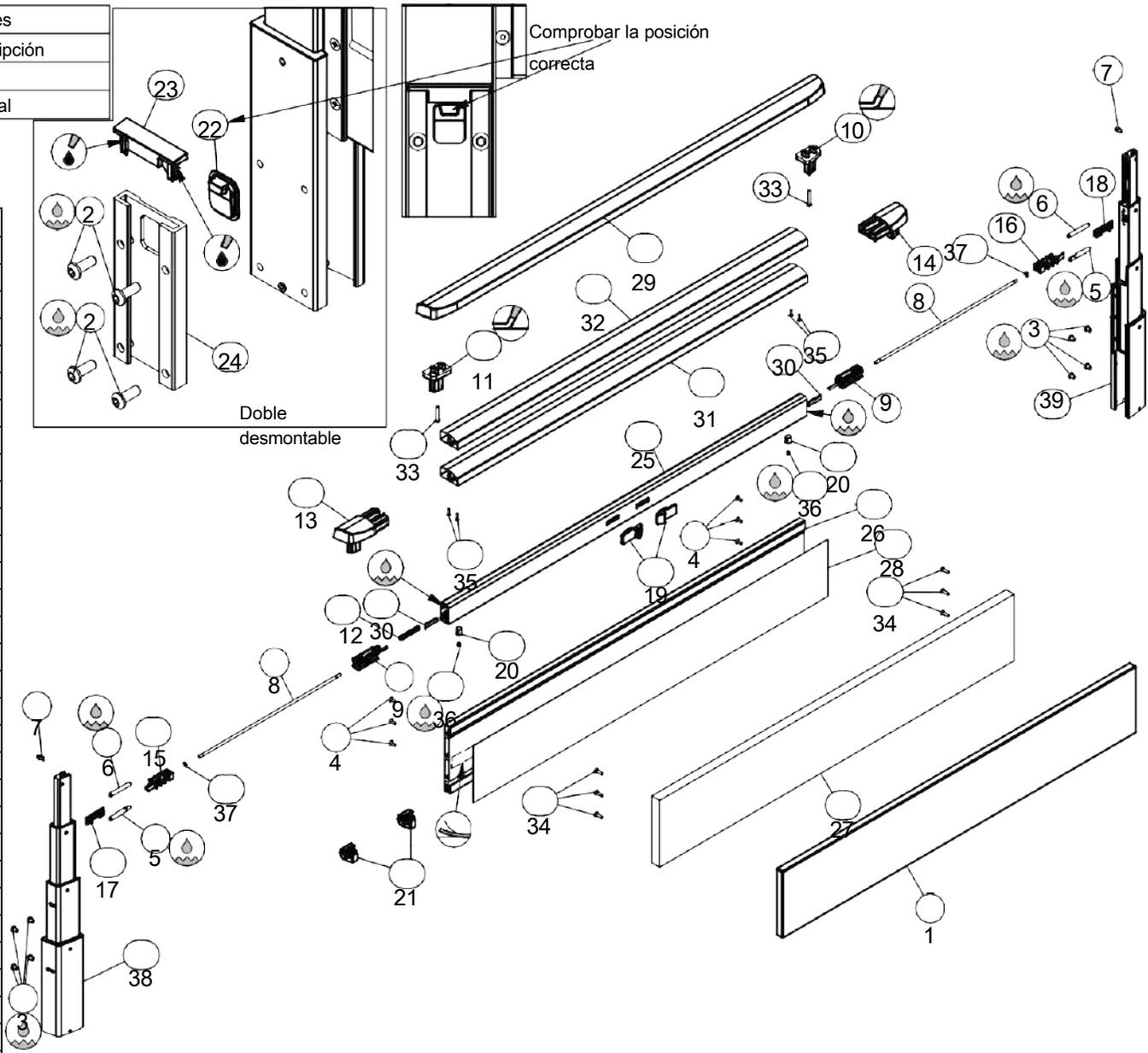


Consulte el manual para obtener instrucciones detalladas para el montaje

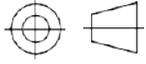Descripción: Protección lateral doble 96			
		Diseñador: Michael D.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 9/03/2018	Escala: 1 : 4
		Dibujo nr: T-033439	Número de

T-034029

d

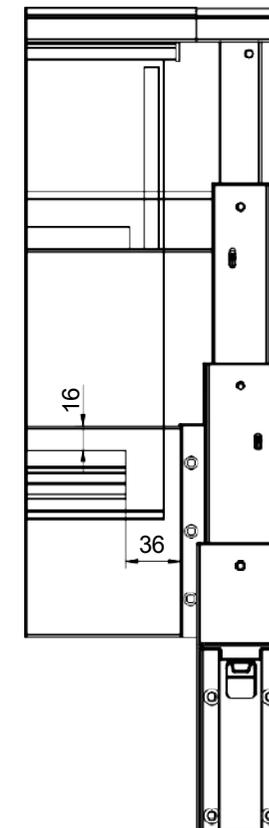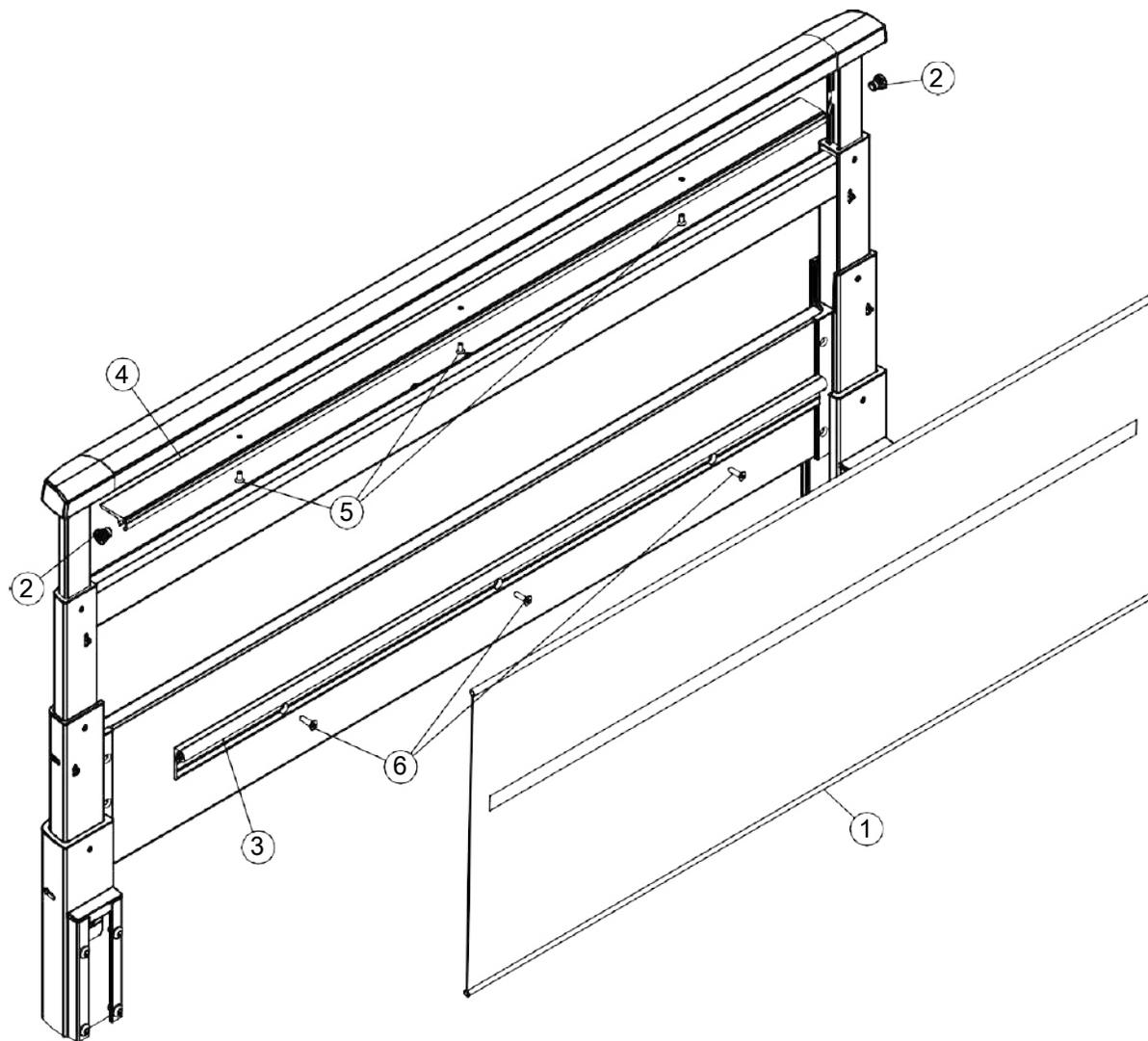

ID	Descripción	Q
1	A-024869 cubierta lateral Twin	1
2	B-031477 perno Din908-M8x1	2
3	P-031265 perfil gasa Twin	1
4	P-035386 perfil superior cubierta Twin 202001	1
5	R-014063 remache Alu/St 3.9x8-CSK	3
6	S-003144 tornillo Din7505A-4x16-GV	9

		 Haelvoet	
		Descripción: Twin 96 + tapa lateral	Diseñador: Michael D.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 8/06/2018 Dibujo nr: T-034029	Escala: 1 : 6 Número de

T-033322

d

Opción
es


Utilice un calibre para atornillar o montar las piezas en el panel lateral de
madera. Haga la versión derecha e izquierda para la opción de extensión
permanente de la cama

ID Descripción

A Versión desmontable


B Ayuda de pie suave

Panel lateral fijo

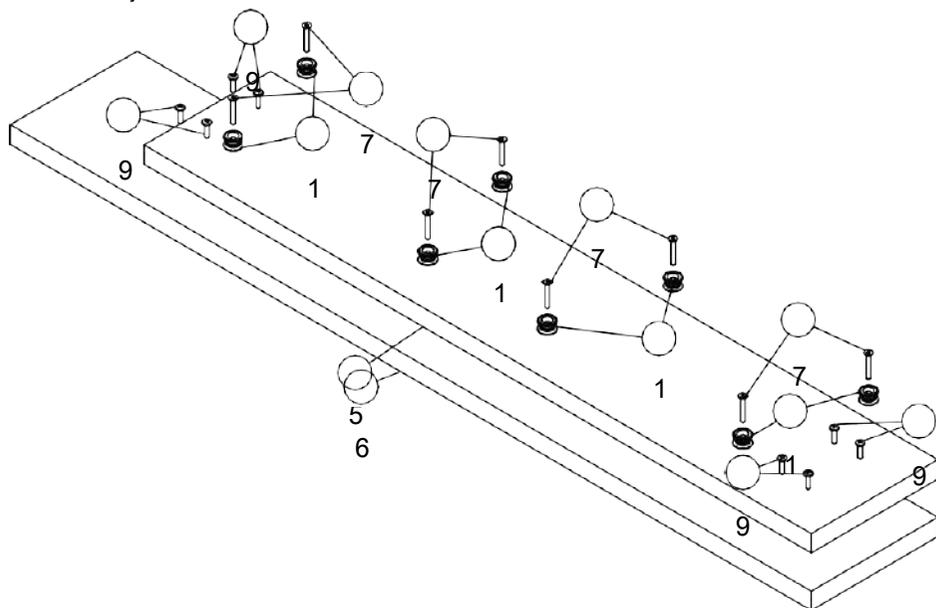

ID	Descripción	Q
1	P-024627 apoyo Soft stand-up help	B+8 0
5	P-030795 acabado lateral de madera - media longitud	C-1 1
6	P-039846 acabado lateral de madera - media longitud - extensión de cama	C+1 0
7	S-000369 tornillo Din7505A-5x35-GV	B+8 0
9	S-004449 tornillo Din7505B-5x20-GV blanco	8

Panel lateral desmontable

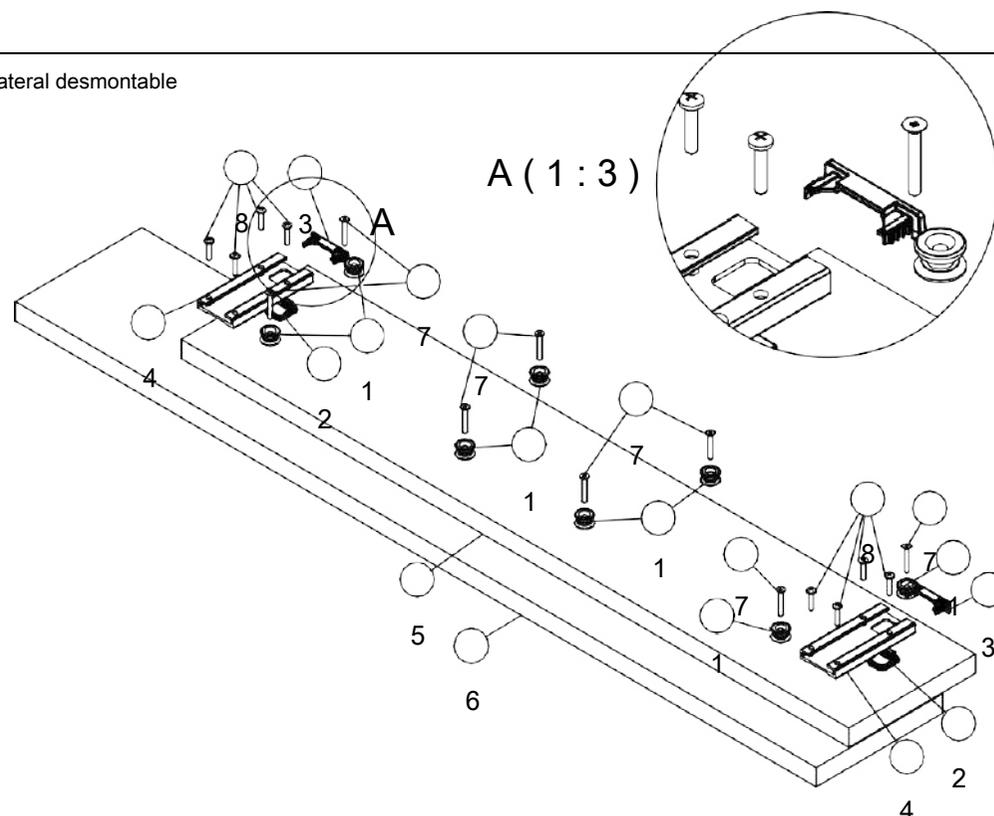

ID	Descripción	Q
1	P-024627 apoyo Soft stand-up help	B+8 0
2	P-030546 guía Twin desmontable	A+2 0
3	P-030560 tapón Twin desmontable	A+2 0
4	P-030639 perfil Twin desmontable	A+2 0
5	P-030795 acabado lateral de madera - media longitud	C-1 1
6	P-039846 acabado lateral de madera - media longitud - extensión de cama	C+1 0
7	S-000369 tornillo Din7505A-5x35-GV	B+8 0
8	S-015083 tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+8 0


Haelvoet

Descripción:

acabado lateral de madera - media longitud

Diseñador:
Michael D.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Fecha: 15/12/2017

Escala: 1 : 8

Dibujo nr: T-033322

Número de
revisión: d

T-033891

d

Opción
es


ID Descripción

A Versión desmontable

B Ayuda de pie suave

Utilice un calibre para atornillar o montar las piezas en el panel lateral de madera. Haga la versión derecha e izquierda para la opción de extensión de cama


Panel lateral fijo

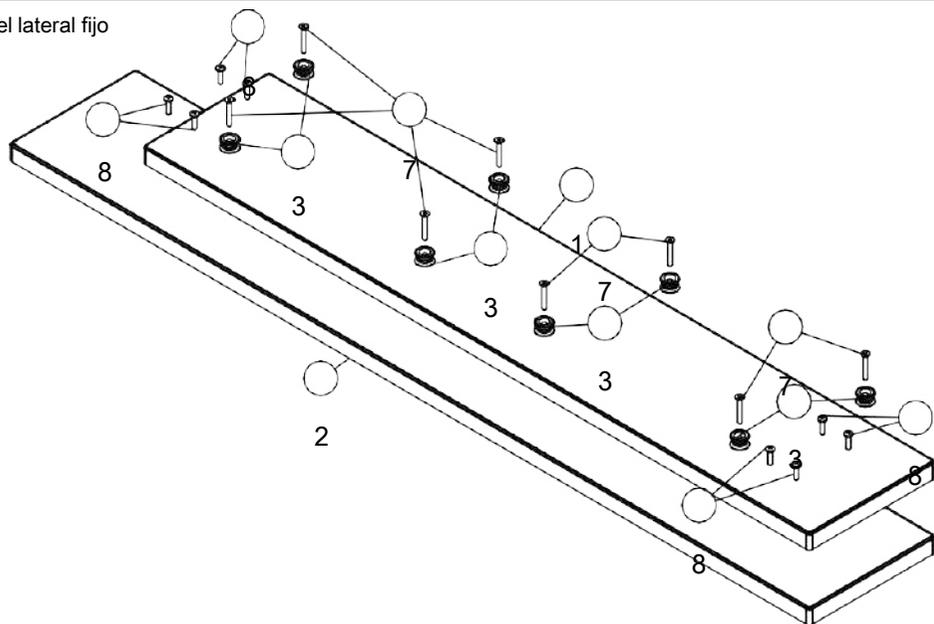

ID	Descripción	Q
1	A-024848 acabado lateral tapizado - media longitud	C-1 1
2	A-029347 acabado lateral tapizado - media longitud - extensión de cama	C+1 0
3	P-024627 apoyo Soft stand-up help	B+8 0
7	S-000369 tornillo Din7505A-5x35-GV	B+8 0

Panel lateral desmontable

A (1:3)

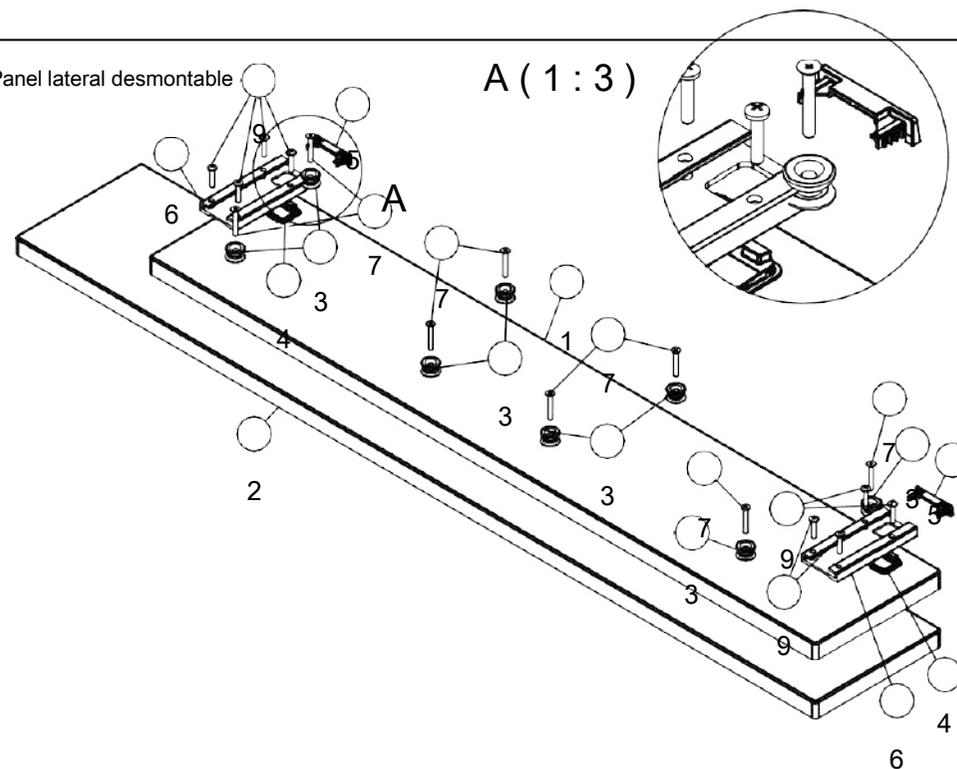

ID	Descripción	Q
1	A-024848 acabado lateral tapizado - media longitud	C-1 1
2	A-029347 acabado lateral tapizado - media longitud - extensión de cama	C+1 0
3	P-024627 soporte Soft stand-up help	B+8 0
4	P-030546 guía Twin desmontable	A+2 0
5	P-030560 tapa Twin desmontable	A+2 0
6	P-030639 perfil Twin desmontable	A+2 0
7	S-000369 tornillo Din7505A-5x35-GV	B+8 0
9	S-015083 tornillo Din7505B-5x25-GV blanco	A+8 0

Descripción:

acabado lateral tapizado - media longitud

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito

Diseñador:

Michael D.

Fecha: 15/12/2017

Escala: 1 : 8

T-034552

b

Haga ambos lados para cada cama cuando la ayuda de pie esté sólo en el lado de la cabeza:

Opción
es


Descripción

A Versión desmontable

B Ayuda de pie suave en el lado de la cabeza




Soft stand-up ayuda a la cabeza IZQUIERDA

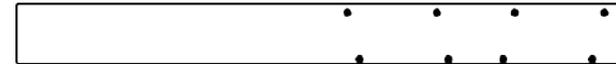

Soft stand-up ayuda en el lado de la cabeza DERECHA


Panel lateral fijo

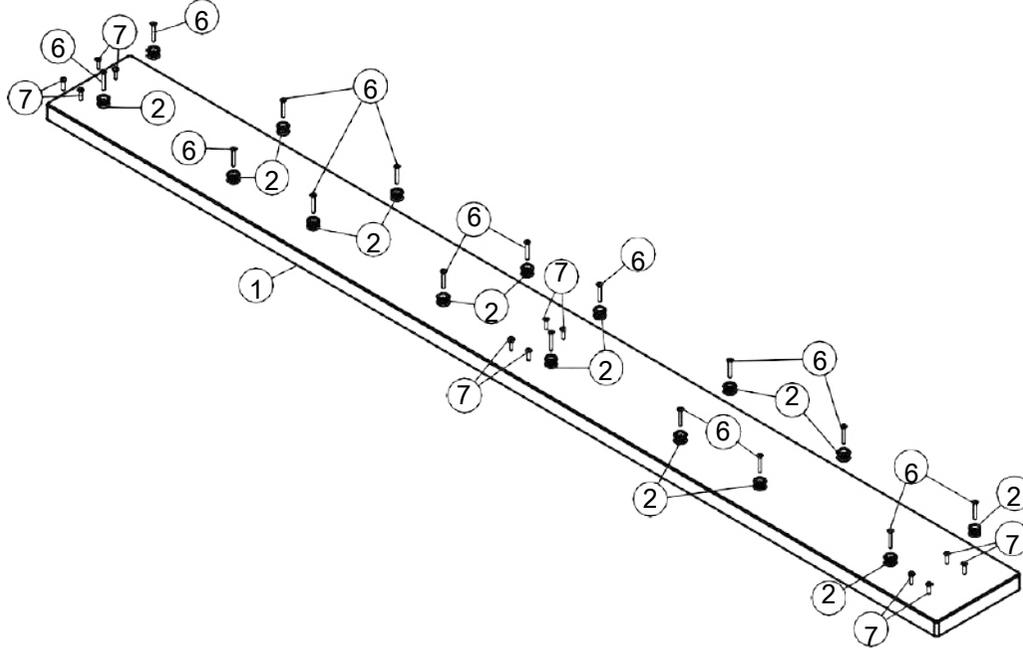

ID	Descripción	Q
1	A-025129 acabado lateral tapizado - longitud completa	1
2	P-024627 apoyo Soft stand-up help B+8,C+16	0
6	S-000369 tornillo Din7505A-5x35-GV B+8,C+16	0
7	S-004449 tornillo Din7505B-5x20-GV blanco	12

Panel lateral
desmontable

A (1 : 2)

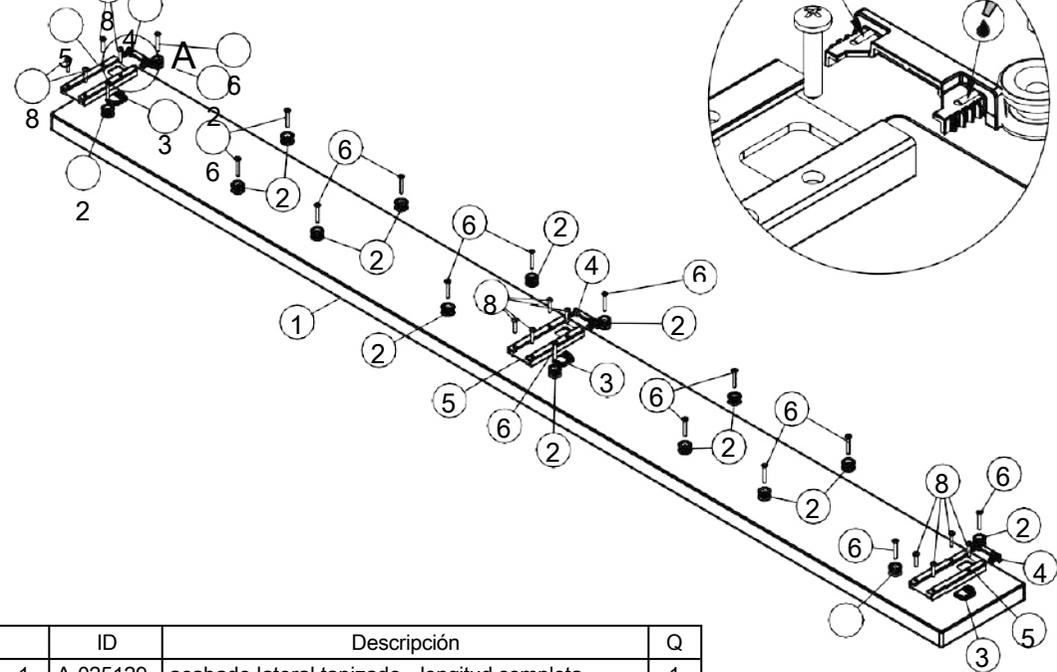

ID	Descripción	Q
1	A-025129 acabado lateral tapizado - longitud completa	1
2	P-024627 apoyo Soft stand-up help B+8,C+16	0
3	P-030546 guía Twin desmontable A+3	0
4	P-030560 tapón Twin desmontable A+3	0
5	P-030639 perfil Twin desmontable A+3	0
6	S-000369 tornillo Din7505A-5x35-GV B+8,C+16	0
8	S-015083 tornillo Din7505B-5x25-GV A+12	0


Utilice un calibre para atornillar o montar las piezas en el panel lateral de madera.



Descripción:

acabado lateral tapizado - longitud completa

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

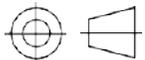Diseñador:
Michael D.

Fecha: 15/12/2017

Escala: 1 : 12


Dibujo nr: T-034552

Número de


T-034605

b

Haga ambos lados para cada cama cuando la ayuda de pie esté sólo en el lado de la cabeza:


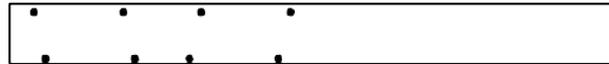


Soft stand-up help at head side

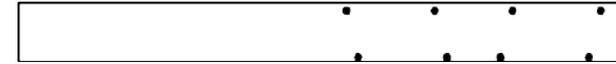

IZQUIERDA Soft stand-up help at head side DERECHA

Opciones	
ID	Descripción
A	Versión desmontable
B	Ayuda de pie suave en el lado de la cabeza

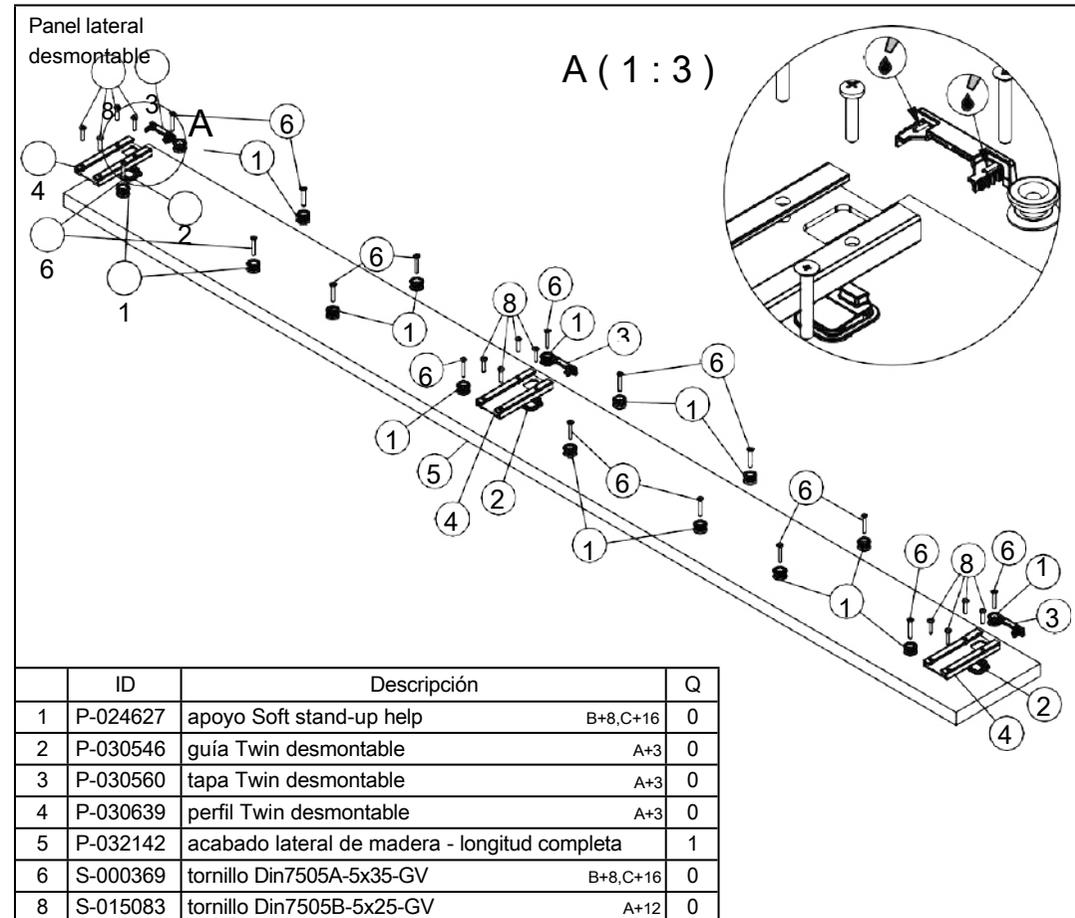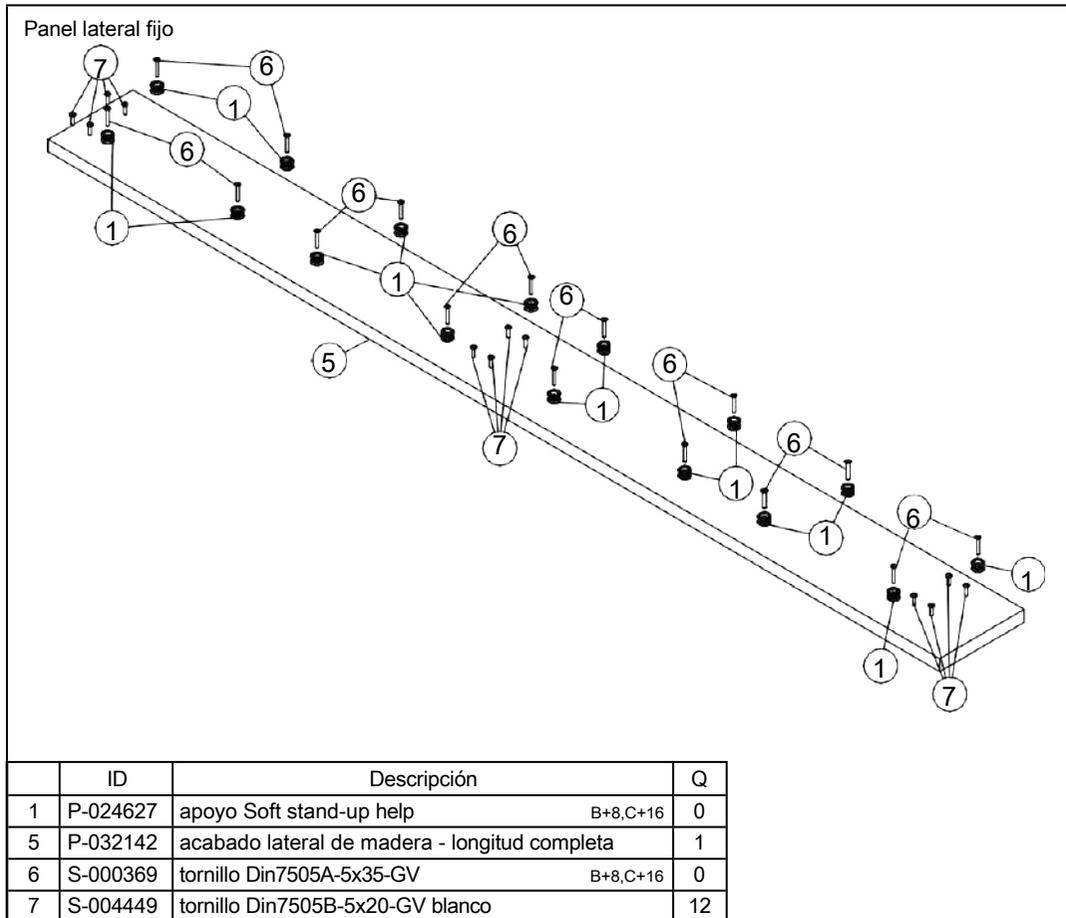

Utilice un calibre para atornillar o montar las piezas en el panel lateral de madera.

Descripción: acabado lateral de madera - longitud completa		Diseñador: Michael D.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 15/12/2017 Dibujo nr: T-034605	Escala: 1 : 12 Número de


T-034779

C


Opciones

ID.	Descripción
A	paneles frontales Puro/Valentino/Felina/Eden
B	paneles frontales Midea
C	frontales Neo
D	paneles frontales Lusso
F	protector de pared


Lusso → 7
 Puro/Valentino/Felina/Eden → 6
 Midea y Neo → 5

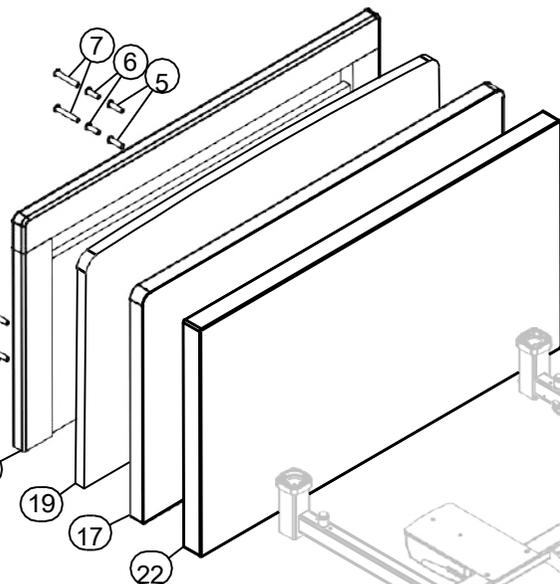

Opción: parachoques

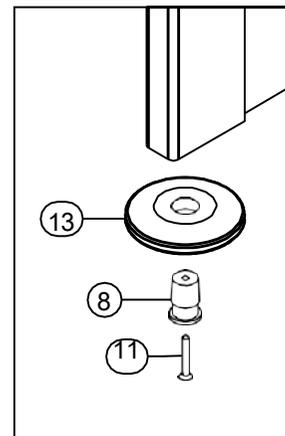


Opción: protector de pared

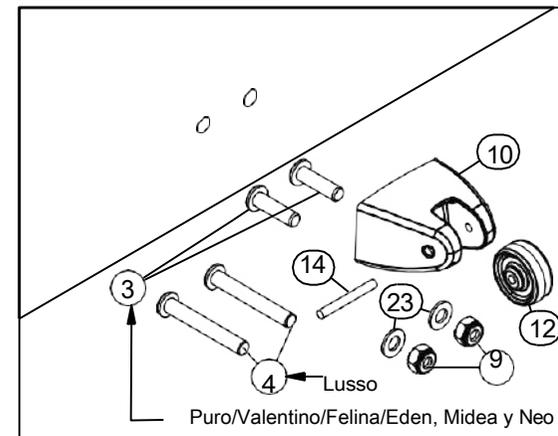

sólo posible con Puro/Valentino/Felina/Eden

ID	Descripción	Q
1	B-000254 perno Iso7380-M10x25x25-10.9 GV blanco	C+4,D+4 0
2	B-000817 perno Iso7380-M10x20x20-10.9 GV blanco	A+4,B+4 0
3	B-000819 perno Iso7380-M10x35x35-10.9 GV blanco	E+A,B,C+2 0
4	B-004987 perno Iso7380-M10x70-10.9 GV blanco	E+D+2 0
5	B-025712 tornillo cabeza baja M10x35-7984LK-10.9 GV negro	B+4,C+4 0
6	B-029033 tornillo cabeza baja M10x30-7984LK-10.9 GV negro	A+4 0
7	B-032760 tornillo cabeza baja M10x60-7984LK-10.9 GV blanco	D+4 0
8	DC014541 fijación amortiguadora-panel de madera	F+2 0
9	M-000136 tuerca de retención Din985-M10	E+2 0
10	P-015482 protector de pared	E+1 0
11	S-000370 tornillo Din7505A-5x40-GV	F+2 0
12	ST002199 tampón 42mm	E+1 0
13	ST002934 rueda parachoques 95/21mm	F+2 0
14	ST015700 pasador Din7-6x50-St-GV	E+1 0
15	T-014108 Paneles de cabeza Puro/Valentino/Felina/Eden Atmosphere ,Twin & Paneles laterales - 86 cm	A+1 0
16	T-034667 panel de pie Neo Atmosphere ,Twin y paneles laterales - 86 cm	C+1 0
17	T-034673 Panel de cabeza Neo Atmosphere ,Twin & Paneles laterales - 86 cm	C+1 0
18	T-034721 panel de pie Midea Atmosphere ,Twin & Side panels - 86 cm	B+1 0
19	T-034722 panel de cabeza Midea Atmosphere ,Twin & Side panels - 86 cm	B+1 0
20	T-034808 Paneles de pie Puro/Valentino/Felina/Eden Atmosphere ,Twin & Paneles laterales - 86 cm	A+1 0

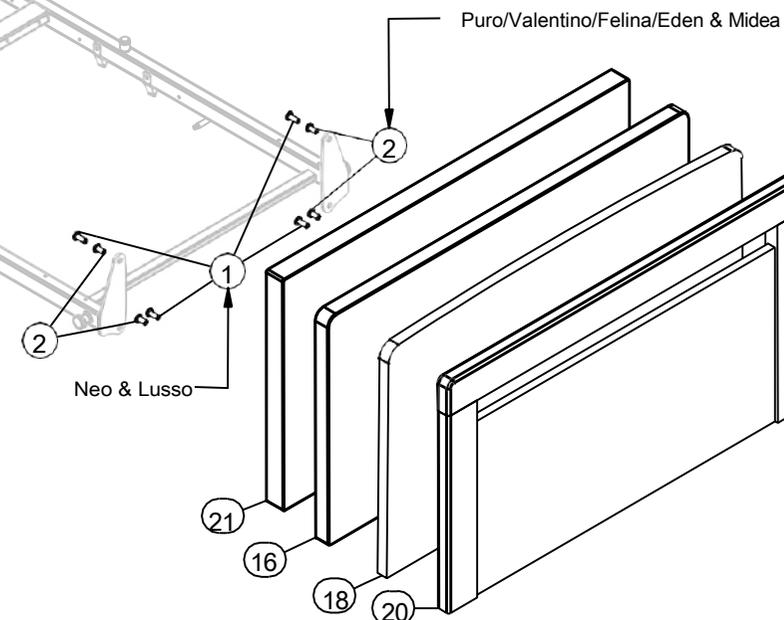

Puro/Valentino/Felina/Eden & Midea

Neo & Lusso

Descripción:

montaje paneles frontales Atmosphere, Twin y laterales


Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

Diseñador:

Ionut I.

Fecha: 05/11/2018

Dibujo nr: T-034779

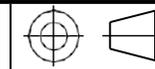

Escala: 1:5

Número de

T-034795

a



Opciones

Descripción

A	acabado lateral de madera - media longitud
B	Protección lateral doble 96
C	acabado lateral tapizado - media longitud
D	acabado lateral tapizado - longitud completa

Para la fijación del panel frontal
comprobar T-034779

Posiciones laterales

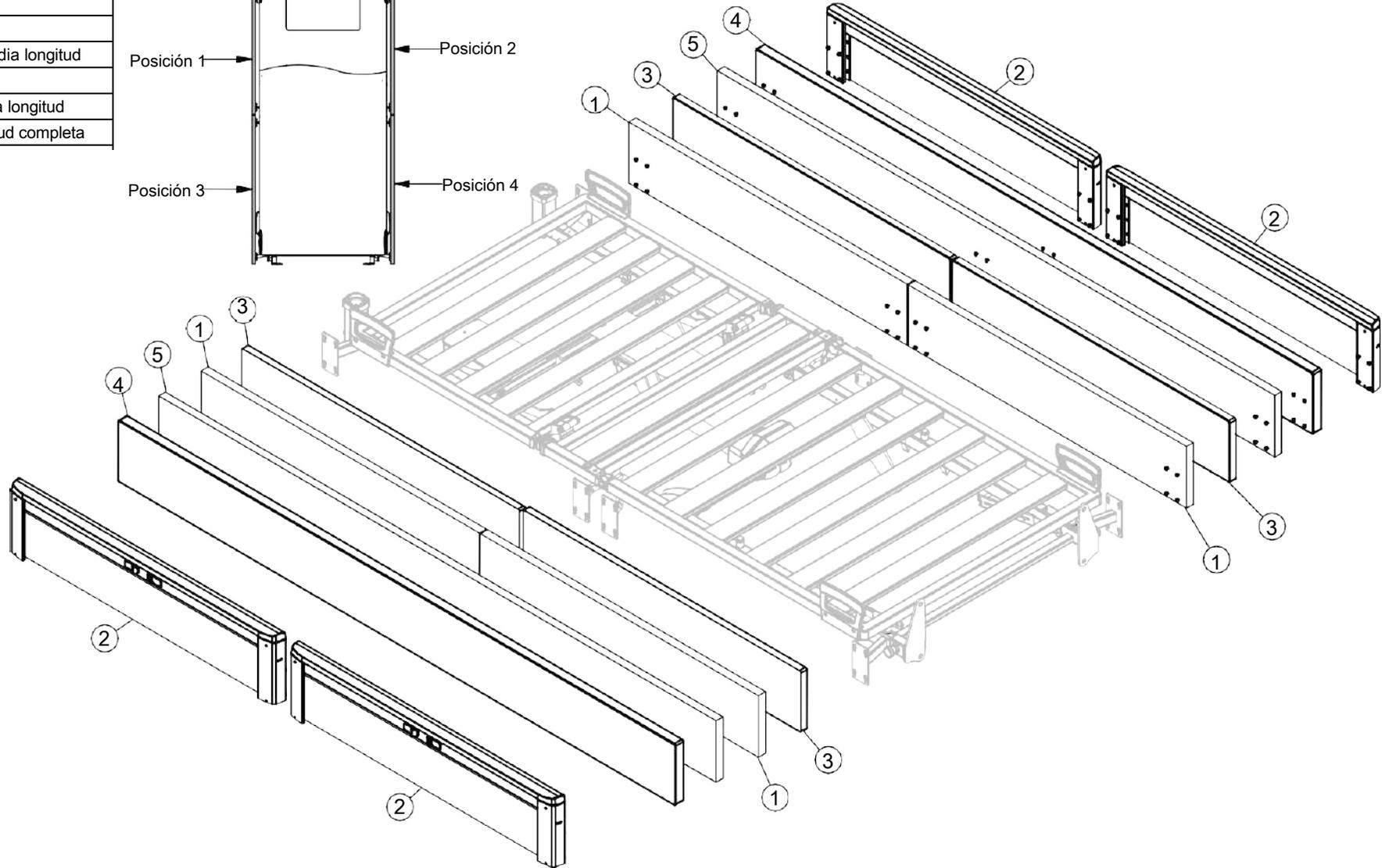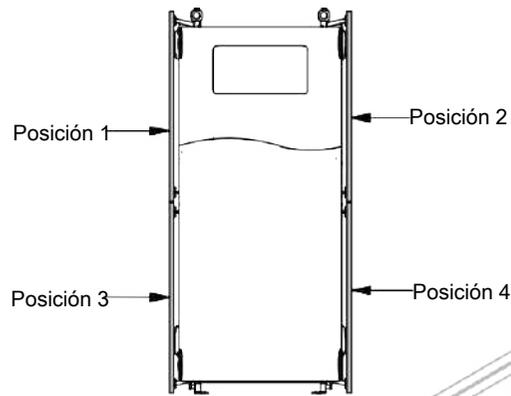


ID	Descripción	Q
1	T-033322 acabado lateral de madera - media longitud A+4	0
2	T-033439 Doble protección lateral 96 B+4	0
3	T-033891 acabado lateral tapizado - media longitud C+4	0
4	T-034552 acabado lateral tapizado - longitud completa D+2	0
5	T-034605 acabado lateral de madera - longitud completa E+2	0


Haelvoet

Descripción:

montajeTwin & Side panels Cuidado - fijación fija

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

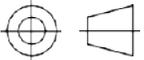Diseñador:
Ionut I.

Fecha: 07/11/2018

Escala: 1 : 15

Dibujo nr: T-034795

Número de

T-034796

a



Opciones

Descripción

ID	Descripción
A	acabado lateral de madera - media longitud
B	Protección lateral doble 96
C	acabado lateral tapizado - media longitud
D	acabado lateral tapizado - longitud completa

Para la fijación del panel frontal
comprobar T-034779

Posiciones laterales

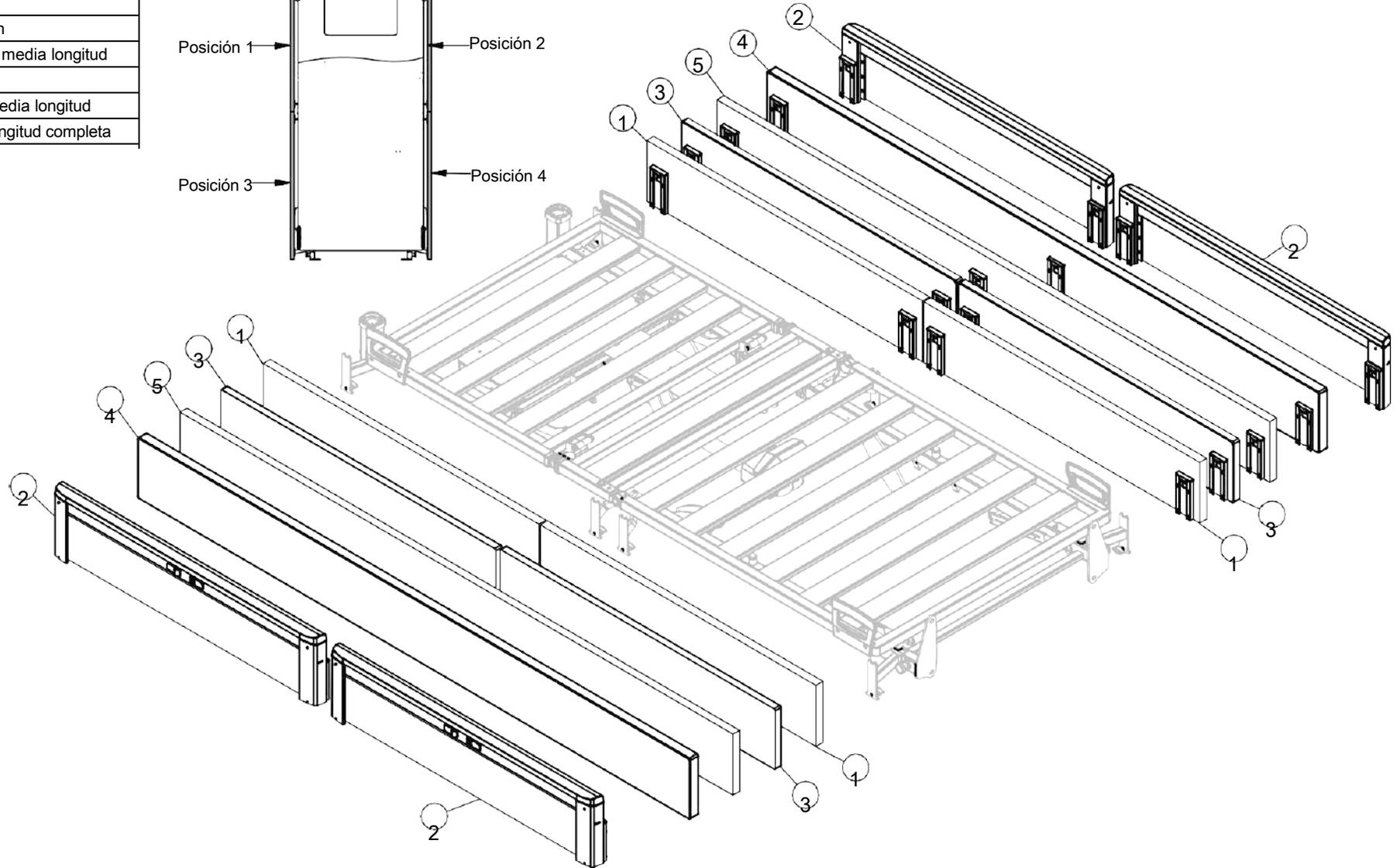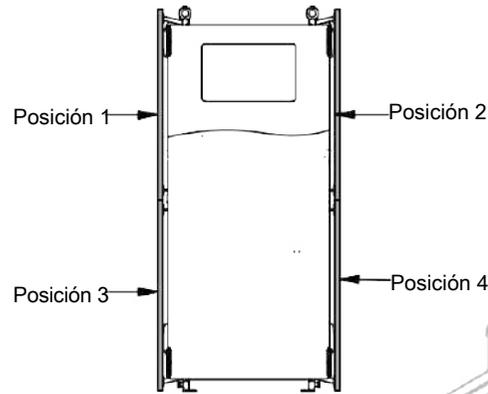


ID	Descripción	Q
1	T-033322 acabado lateral de madera - media longitud	A+4 0
2	T-033439 Protección lateral doble 96	B+4 0
3	T-033891 acabado lateral tapizado - media longitud	C+4 0
4	T-034552 acabado lateral tapizado - longitud completa	D+2 0
5	T-034605 acabado lateral de madera - longitud	E+2 0

Descripción:

montajeTwin & Side panels Care - desmontable

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95

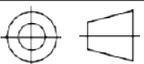Diseñador:
Ionut I.

Fecha: 07/11/2018


Escala: 1 : 15

Dibujo nr: T-034796

Número de

T-034788		C
Opciones		
ID.	Descripción	
A	Puro/Valentino/Felina/Eden	
B	Midea	
C	Neo	
D	Lusso	
E	Pollux + 20 cm	

Para la fijación del panel frontal comprobar T-034779

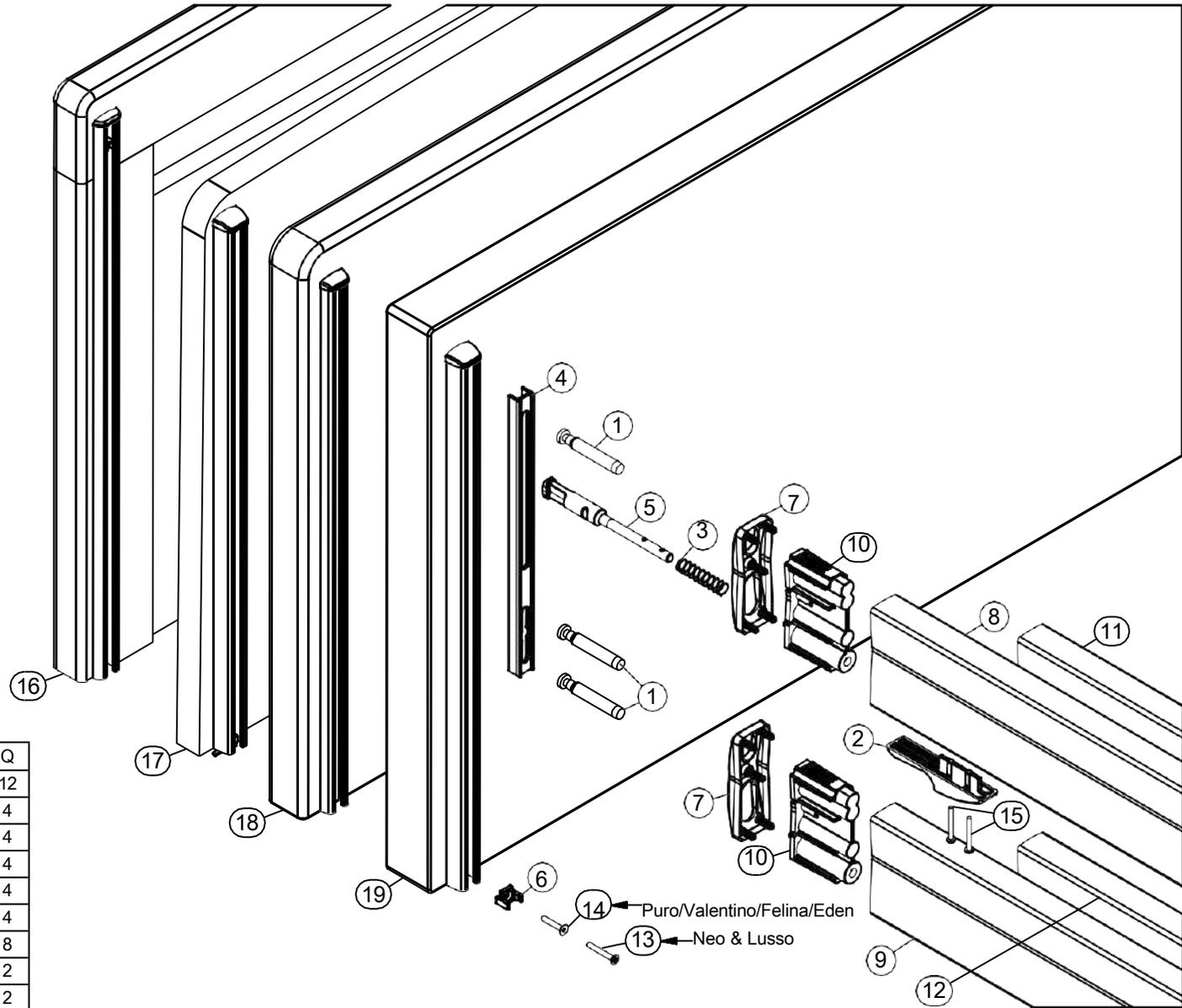

ID	Descripción	Q
1	DC018123 pasador guía Pollux III	12
2	P-010647 asa	4
3	P-012421 muelle de control Pollux	4
4	P-018122 tirante Pollux III	4
5	P-018124 pasador de bloqueo Pollux III	4
6	P-018197 parada Trix III-Pollux III	B4 4
7	P-018515 tapón listón lateral Pollux III	8
8	P-022002 listón Pollux Alu top	E -2 2
9	P-022003 listón Pollux Alu fondo	E -2 2
10	P-022112 insertar carril Pollux	4
11	P-022670 listón Pollux Alu +20 cm superior	E +2 0
12	P-022671 listón Pollux Alu +20 cm fondo	E +2 0
13	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	C+4 0
14	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	A+4 0
15	S-010681 tornillo PLASTITE 7985-3.5x30-GV	8
16	T-020217 paneles frontales Puro/Valentino/Felina/Eden Pollux - 86 cm	0
	A+1	
17	T-026354 paneles frontales Midea Pollux - 86 cm	B+1 0
18	T-034646 frontales Neo Pollux - 86 cm	C+1 0

		 Haelvoet	
Descripción:		Diseñador:	
montaje Pollux		Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 6/11/2018	Escala: 1 : 5
		Dibujo nr: T-034788	Número de


T-034811

b


Opciones

ID.	Descripción
A	Puro/Valentino/Felina/Eden
B	Midea
C	Neo
D	Lusso

Para la fijación de los paneles frontales consulte T-034779

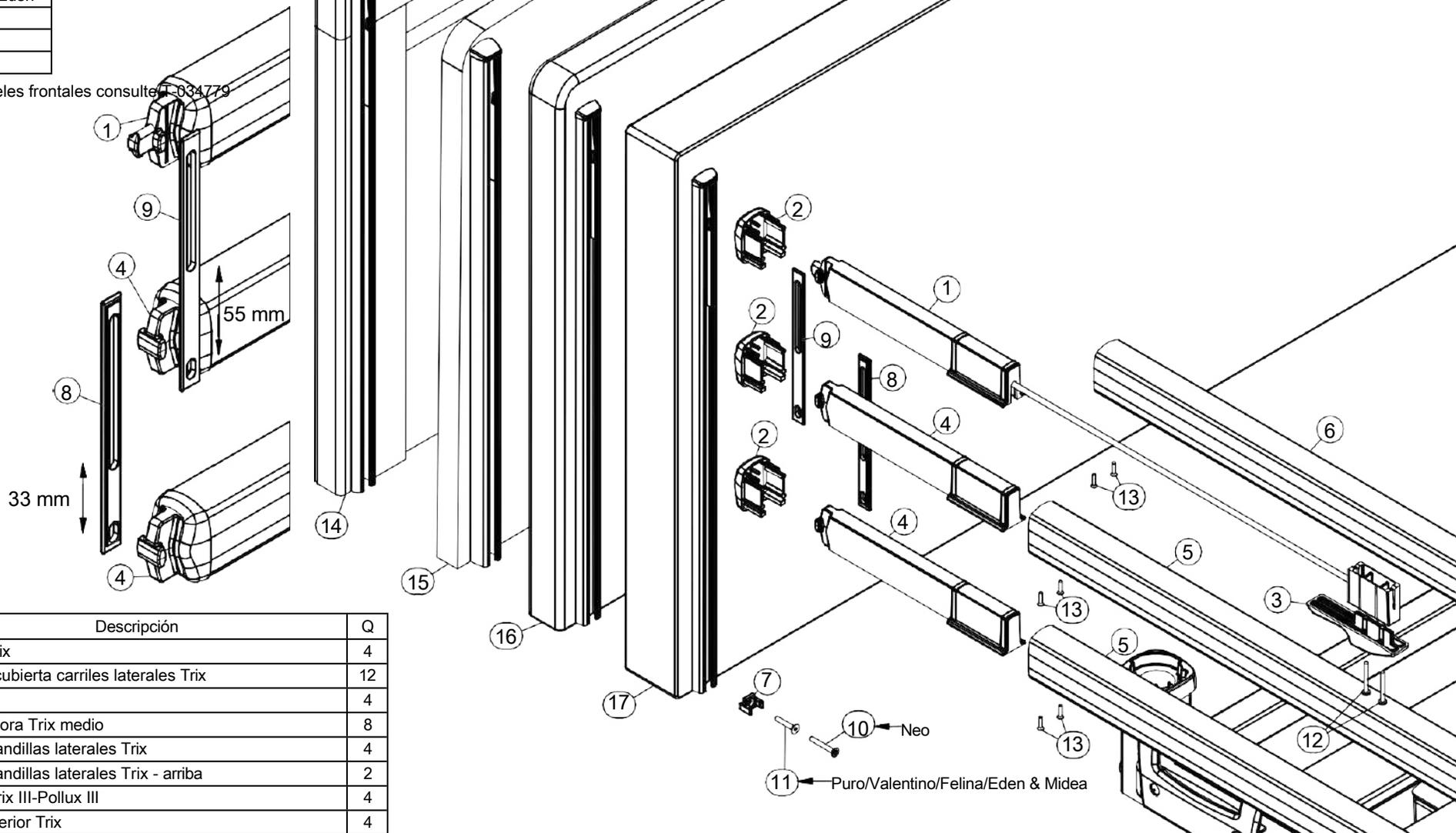


ID	Descripción	Q
1	A-011385 control Trix	4
2	P-010630 perfil de cubierta carriles laterales Trix	12
3	P-010647 asa	4
4	P-010676 parte rectora Trix medio	8
5	P-014712 perfil barandillas laterales Trix	4
6	P-014713 perfil barandillas laterales Trix - arriba	2
7	P-018197 parada Trix III-Pollux III	4
8	P-018198 tirante inferior Trix	4
9	P-018475 tirante superior Trix	4
10	S-001386 tornillo Din965-M4x30-4.8GV	C+4 0
11	S-004232 tornillo Din7982C-4.2x25-GV	A+4,B+4 0
12	S-010681 tornillo PLASTITE 7985-3.5x30-GV	8
13	S-016730 tornillo Din7983-2.9x13-GV	24
14	T-020224 paneles frontales Puro/Valentino/Felina/Eden Trix - 86 cm	A+1 0
15	T-026353 paneles frontales Midea Trix - 86 cm	B+1 0
16	T-034693 paneles frontales Neo Trix - 86 cm	C+1 0

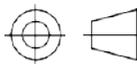
Descripción: montaje Trix			
		Diseñador: Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 10/11/2018	Escala: 1 :5
		Dibujo nr: T-034811	Número de

T-028506

d


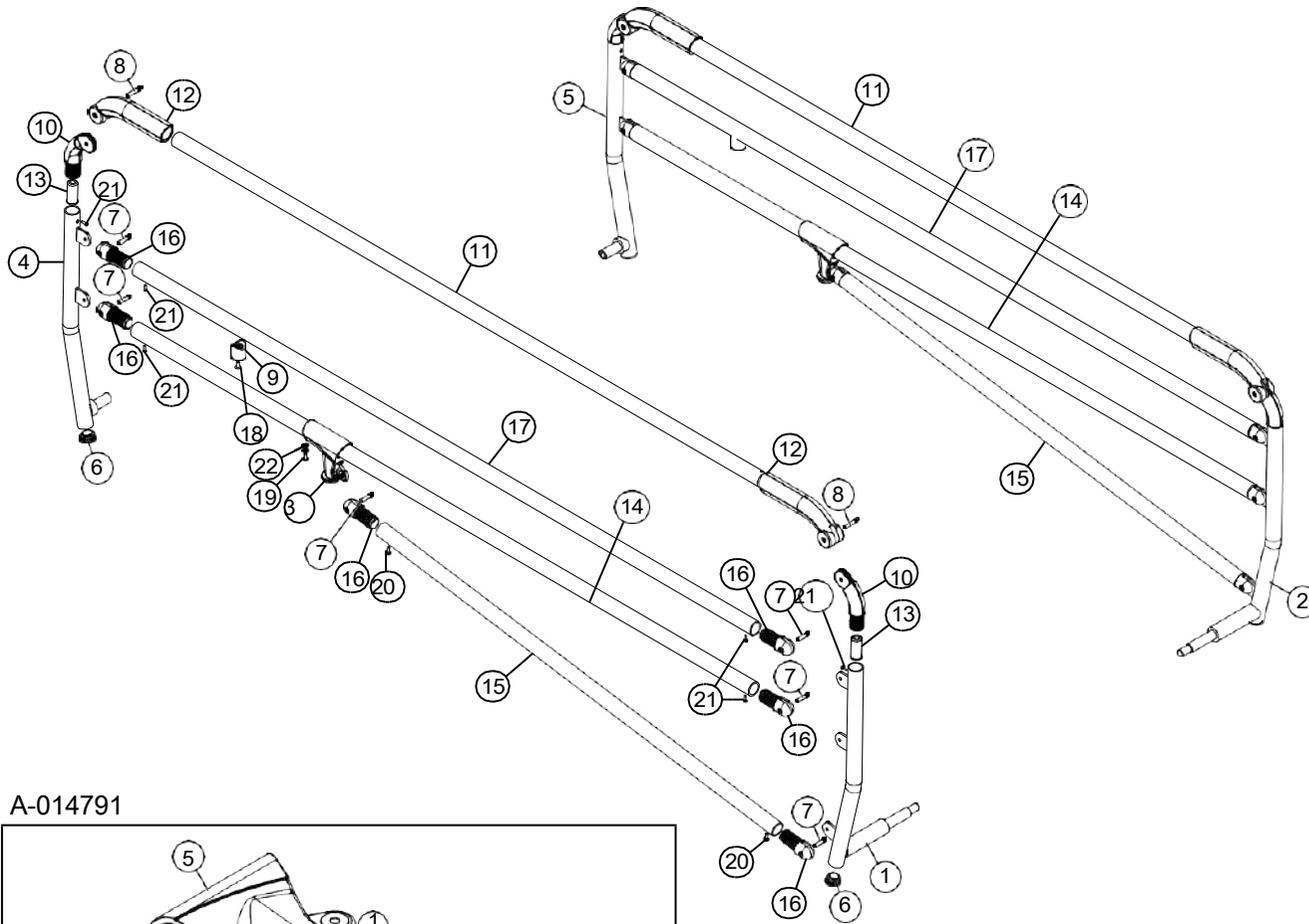


A-014791

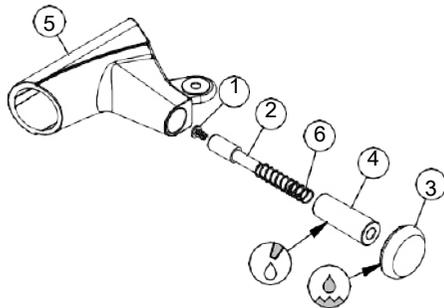

ID	Descripción	Q
1	A-014596 post Atmosphere III std cabeza lado L	1
2	A-014779 post Atmosphere III std cabeza lado R	1
3	A-014791 pieza deslizante atmósfera 25	2
4	A-022810 poste pie lado L Atmósfera III Lago	1
5	A-022811 poste pie lado R Atmósfera III Lago	1
6	AD000890 tapón PR 25mm	4
7	DC021546 Pasador de bisagra Atmósfera	12
8	DC022187 pasador de bisagra tirador Atmósfera	4
9	P-006434 separador	2
10	P-013703 tapa de soporte barandilla lateral	4
11	P-013742 tubo superior Atmósfera	2
12	P-014283 asa barandilla lateral Atmósfera	4
13	P-015851 insertar soporte	4
14	P-018609 tubo inferior Atmósfera III	2
15	P-018610 tubo inclinado Atmósfera III	2
16	P-018905 articulación 25x2,5	12
17	P-018985 tubo intermedio Atmósfera III	2
18	R-000461 remache Alu/St 4.8x10	2
19	R-004530 remache A2/A2 4.8x10	2
20	S-000830 tornillo Din7981C-4.2x13	4
21	S-001139 tornillo Din7505A-3x12-GV	12
22	VL001148 arandela Din125A-M5-GV	4

ID	Descripción	Q
1	AD019228 cap PR 7/4	1
2	DC005179 varilla M6x60	1
3	DC005707 botón de la barandilla lateral	1
4	P-005177 pieza deslizante del maletín	1
5	P-018906 pieza deslizante atmósfera 25	1
6	ST001265 muelle 0.8x8x36/4	1

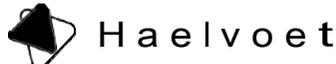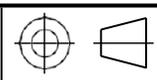
Descripción: barandillas laterales Atmósfera Lago			
		Diseñador: Michael D.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 02/12/2015 Dibujo nr: T-028506	Escala: 1:12 Número de

T-034812


a

Para comprobar la fijación del panel frontal: T-034779 para Lago Care

T-035058 y T-035068 para el Hospital de Lago

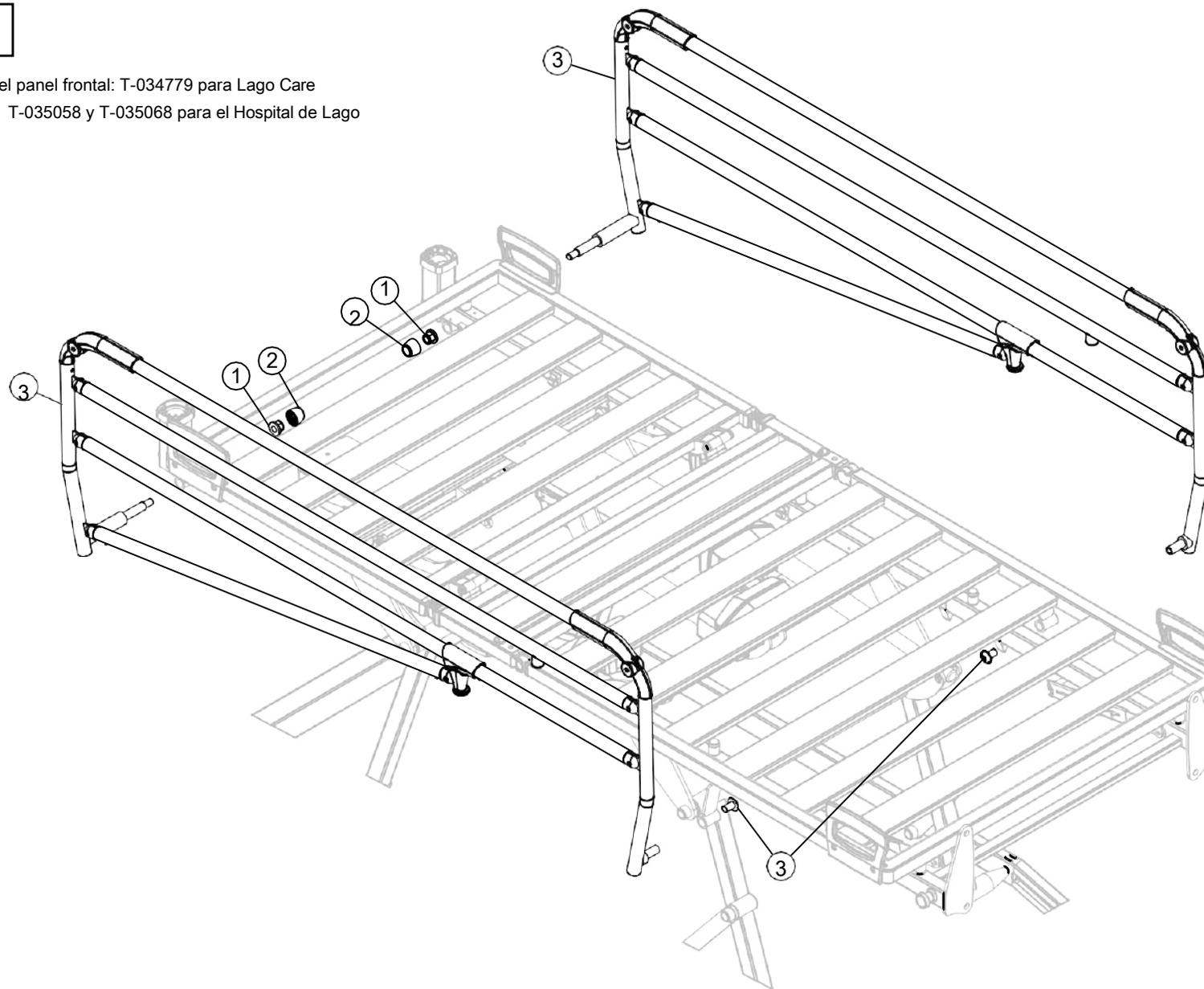

ID	Descripción	Q
1	M-001151 tuerca de retención Din6926-M12	2
2	P-010973 tuerca de retención Din6926-M12	2
3	T-028506 barandillas laterales Atmósfera Lago	1

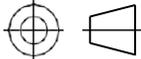		 Haelvoet	
Descripción: montaje Atmósfera Lago		Diseñador: Ionut I.	
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito de Haelvoet NV - L. Bekaertstraat 8 8870 Ingelmunster - Tel: +32 (0)51 48 66 95		Fecha: 10/11/2018 Dibujo nr: T-034812	Escala: 1 :11 Número de